

Oprette et Roger™ netværk i klasseværelset


Reference Sheet

roger



Alt Roger-uddannelsesudstyr er designet til at være nemt at bruge sammen. Det eneste, der kræves, er at det skal tilsluttes med hinanden i et netværk. De kan tilsluttes på flere måder afhængigt af, hvilke enheder du har. Det er helt op til dig.

Tilføj Roger-enheder via Tilslut

Hold Roger uddannelsesmikrofonen inden for 10 cm (4") fra følgende Roger-enheder for at tilslutte dem til klasseværelsets netværk, og klik på **Tilslut**, eller tryk på ikonet for **Tilslut** .

- Roger design-integrerede og universal modtagere
- Roger MyLink
- Roger Focus
- Roger uddannelsesmikrofoner
 - Roger Touchscreen Mic
 - Roger Elevmikrofon
 - Roger inspiro*
 - Roger DynaMc*
- Roger Multimedia Hub
- Roger AudioHub*
- Roger DigiMaster 5000**, 7000** højttalere
- Roger DigiMaster X

* Ved tilslutning af disse enheder til et MultiTalker netværk med en Touchscreen Mic som primær, skal du følge trinene på Touchscreen Mic-displayet, efter at der er trykket på **Tilslut**.

** Ved tilslutning af en Roger DigiMaster-højttaler skal Roger-mikrofonen placeres tæt ved øverste del af Roger DigiMaster.

Tilføjelse af Roger-enheder via Roger WallPilot



Roger modtagere – Børnene skal blot gå hen til Roger WallPilot (ører- og modtagere inden for 30 cm (12") fra WallPilot) og stå over for den i et par sekunder.

Roger-mikrofoner og mediasender – Følgende Roger-mikrofoner og multimedia sender kan blive tilsluttet ved blot at slukke for dem og derefter tænde for dem igen inden for 10 cm (4") fra Roger WallPilot:

- Roger Touchscreen Mic
- Roger Elevmikrofon
- Roger Multimedia Hub
- Roger inspiro
- Roger DynaMic