

# Tilslutning af Roger AudioHub til Roger inspiro

Referenceblad

roger



Skole: \_\_\_\_\_

Underviser: \_\_\_\_\_


Roger-kontaktperson: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_









Serienummer: \_\_\_\_\_

## Tilslutning

1. Tilslut Roger AudioHub til strømkilden.
2. Hold Roger-mikrofonen inden for en afstand af 10 cm fra Roger AudioHub. Tryk på **Tilslut**.
3. Tilslut Roger AudioHub til lyd-kilden ved at sætte lyd-kablet ind i **Audio IN** bag på Roger AudioHub.  
Hvis du kun tilslutter én kilde, skal du bruge stik nr. 1. Tilslut den anden ende af kablet til lyd-kilden, f.eks. MP3, TV, PC m.m.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen på Roger AudioHub, og hold den nede  i 2 sekunder. Tænd derefter for lyd-kildesignalet.
5. Lydstyrken skal først justeres på lyd-kilden og derefter på Roger AudioHub.



## Indikatorlampe på Roger AudioHub

-  **Konstant rød** – Roger AudioHub er slukket
-  **Konstant blå** – Almindelig driftstilstand
-  **Blinker blå** – Roger-mikrofonen er slukket eller uden for rækkevidde
-  **Konstant grøn** – Mikrofonen er slået fra
-  **Grøn til rød** – Lydstyrken er ved at blive justeret +/-
-  **Blinker gult** – Softwareopdatering
-  **Blinker rødt** – Ring til din Roger-kontaktperson
-  **Skifter mellem rød/gul** – Kablet er ikke korrekt tilsluttet