

Brug af Roger X / MLx-lydkontrolenheden

Referenceblad

roger



Skole: _____

Underviser: _____

Roger-kontaktperson: _____

Telefon: _____

Dato: _____

Brugsanvisning

1. MLx-lydkontrolenheden skal oplades inden brug.
2. Sæt Roger X-modtageren i det forreste stik. Den kan kun vende på én måde.
3. Sæt hovedtelefonerne ind i bunden af MLx-lydkontrolenheden. Tænd for lydkontrolenheden.
4. Tænd for Roger inspiro-mikrofonen. Du bør nu kunne høre indgangsllyden fra mikrofonen gennem hovedtelefonerne.
5. Hvis du ikke hører nogen lyd, skal du kontrollere, om der er mulige løsninger på problemet:
 - A. Tryk på **Tilslut** på Roger inspiro. Hvis det nu virker, var modtageren ikke tilsluttet netværket.
 - B. Kontrollér, at mikrofonens lyd ikke er slået fra.
 - C. Hvis ovenstående løsningsforslag ikke løser problemet, skal du kontakte den Roger-kontaktperson, som er anført ovenfor.

