

# Brug af Roger DigiMaster X

Referenceblad

roger



Skole: \_\_\_\_\_

Underviser: \_\_\_\_\_

Roger-kontaktperson: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_



## Tilslutning

### Indledende opsætning

1. Tilslut Roger DigiMaster X til en strømkilde.
2. Tilslut Roger DigiMaster X til lokalets lydforstærkningssystem.
3. Hold Roger inspiro inden for en afstand af 10 cm fra Roger DigiMaster X, og tryk på **Tilslut**.










### Daglig brug

1. Hold tænd/sluk-knappen  på Roger DigiMaster X nede i 2 sekunder for at tænde for den. Tænd for Roger inspiro. Tal ind i Roger inspiro-mikrofonen.
2. Hold tænd/sluk-knappen  på Roger DigiMaster X nede i 2 sekunder for at slukke for den, når du er færdig.



## Indikatorlampe på Roger DigiMaster X

-  **Konstant rød** – Roger DigiMaster X er slukket
-  **Konstant blå** – Almindelig driftstilstand
-  **Blinker blå** – Roger-mikrofonen er slukket eller uden for rækkevidde
-  **Konstant grøn** – Mikrofonen er slået fra
-  **Grøn til rød** – Lydstyrken er ved at blive justeret +/-
-  **Blinker gult** – Softwareopdatering
-  **Blinker rødt** – Ring til din Roger-kontaktperson