

Oprettelse af et Roger MultiTalker Network

Referenceblad

roger



Der kan anvendes flere mikrofoner i et Roger-netværk, således at flere undervisere, børn og lydenheder kan sende til Roger-lyttere. Nedenfor kan du se, at der er flere måder, hvorpå man kan oprette eller koble sig til et netværk med flere talere (MultiTalker Network – MTN). MTN-tilkoblingerne bevares altid, også når mikrofonerne er slukket.

Tilføjelse af Roger-mikrofoner/AudioHub/DigiMaster via tasten Tilslut

1. Placér den primære Roger inspiro inden for en afstand af 10 cm fra en Roger-mikrofon eller en Roger AudioHub, og tryk på **Tilslut**. Roger inspiro bekræfter på LCD-skærmen, at der er oprettet forbindelse.
2. Gentag dette med alle andre Roger-enheder.



Tilføjelse af Roger-mikrofoner via Roger WallPilot

1. Placér Roger-mikrofonen inden for en afstand af 10 cm fra en Roger WallPilot.
2. Sluk for mikrofonen, og tænd den derefter igen.
3. Mikrofonen har nu oprettet forbindelse til undervisningslokalets netværk.



Tilføjelse af Roger inspiro via JoinNet

1. Placér Roger inspiro inden for en afstand af 10 cm fra en Roger-enhed.
2. Tryk på funktionstasten **Opret forbindelse til netværket**.
3. Roger inspiro har nu oprettet forbindelse til undervisningslokalets netværk.

