

Brug af Roger inspiro og Roger X

Referenceblad

roger



Fornavn: _____

Efternavn: _____

Skole: _____

Underviser: _____


Roger-kontaktperson: _____

Telefon: _____

Dato: _____

Mikrofon: Roger inspiro

Brugsanvisning

1. For at tænde for enheden skal du skubbe skydeknappen mod venstre, indtil det grønne mærke bliver synligt, og skærmen oplyses.
2. Sæt mikrofonen fast inden for en afstand af 20 cm fra munden. Eller hæng bøjlemikrofonen korrekt på øret, så mikrofonen sidder foran munden.
3. Skal eleven tilsluttes? Hvis det er tilfældet, skal du placere senderen inden for en afstand af 10 cm fra den ene Roger X-modtager. Tryk på højre funktionstast **Tilslut**. Gentag dette for den anden side, hvis det drejer sig om en binaural bruger.
4. Lås tasterne på Roger inspiro ved at trykke på  og derefter på **OK**. Der vises et nøglesymbol i statuslinjen.
5. Når dagen er slut, skal du slukke for Roger inspiro ved at skubbe den øverste skydeknop mod højre, og tilslutte mini-USB-stikket fra opladeren til Roger inspiro.

Serienummer: _____



Modtager: Roger X

Brugsanvisning

1. Sæt Roger X fast på høreapparatet med en egnet audiosko. Den er nu klar til brug.
2. Hvis modtageren skal blive på skolen, skal du fjerne audioskoen og Roger X fra høreapparatet, når skoledagen er omme.

Serienumre

Højre: _____ Venstre: _____

