

# Brug af Roger til oprettelse af et netværk til en lille gruppe

Referenceblad


roger



Hvis du har brug for at tale med en lille gruppe børn, mens en anden underviser fortsætter med at tale over undervisningslokalets hovednetværk, kan du let oprette et midlertidigt undernetværk ved at bruge en Roger-funktion kaldet SubNet. Det kræver ingen frekvensplanlægning, og både du og børnene i den mindre gruppe kan let slutte jer til hovednetværket igen (EndSub), når I er færdige.

## Opsætning

Tildel funktionen **SubNet/EndSub (Undernetværk/Afslut undernetværk)** til Roger inspiros venstre funktionstast (dette skal kun gøres én gang):

1. Tryk på **OK**.
2. Rul ned til **Indstillinger**. Tryk på **OK**.
3. Hvis **Konfigurer funktionstaster** er fremhævet, skal du trykke på **OK**.
4. Hvis **Venstre funktionstast** er fremhævet, skal du trykke på **OK**.
5. Rul ned til **Undernetværk/Afslut undernetværk**, og tryk på **OK**.
6. Tryk på tasten  for at vende tilbage til hovedmenuen.

## Brug

### Oprettelse af et Undernetværk (SubNet)

1. Tryk på funktionstasten **Undernetværk**. Venstre funktionstast viser nu **Afslut undernetværk**.
2. Hold Roger inspiro inden for en afstand af 10 cm fra modtageren, og tryk på **Tilslut**.

### Afslutning af undernetværket

1. Tryk på funktionstasten **Afslut undernetværk**.
2. Hold Roger inspiro mindre end 10 cm fra modtageren, og tryk på **Tilslut**. Gentag dette for alle de modtagere, som var med i undernetværket.

