

Udførelse af en daglig lyttekontrol af Roger X

Referenceblad

roger



Fornavn: _____

Efternavn: _____

Skole: _____

Underviser: _____

Roger-kontaktperson: _____

Telefon: _____

Skoleår: _____

Lyttekontrol

Skal foretages hver morgen

1. Lyt til høreapparatet. Hvis apparatet ikke virker, skal du følge nedenstående fejlfindingstrin.
2. Hvis apparatet virker, skal du sætte Roger X på høreapparatet og tænde for lærermikrofonen.
 - Høreapparatet skal indstilles til program nr. _____
 - Høreapparatet kræver ingen programændring. Luk bare batteriskuffen/tænd for høreapparatet.
3. Tal ind i lærermikrofonen. Du skal kunne høre din stemme tydeligt gennem høreapparatet.



Fejlfindingsvejledning til Roger

Mest sandsynlig årsag

Ingen lyd i høreapparatet

Ingen lyd i mikrofonen

Hvis ingen af ovenstående trin løser problemet, skal du ringe til din Roger-kontaktperson (telefonnummeret er anført ovenfor).

Løsning

- Prøv at bruge et nyt høreapparatbatteri.
- Er slangen revnet, eller er øreproppen blokeret af fugt eller snavs?
- Træk øreproppens slange af hook'en. Kommer der nu lyd ud? Hvis der gør det, er der en blokering, eller slangen er revnet.
- Sørg for, at mikrofonen er tændt.
- Sæt audioskoen fast på høreapparatet igen.
- Sæt Roger X fast igen.
- Prøv at bruge et nyt høreapparatbatteri.
- Kontrollér, om høreapparatet er indstillet på det rigtige program.
- Kontrollér, at mikrofonens lyd ikke er slået fra.
- Tryk på Tilslut på Roger inspiro.