


# マイフォナック アプリ 4.0.4 改良点のご案内


2021年8月26日

## 新機能

- タップコントロールの設定をアプリで調節できるようになりました（パラダイスのみ）。  
例：タップの感度を3段階で調節可能。

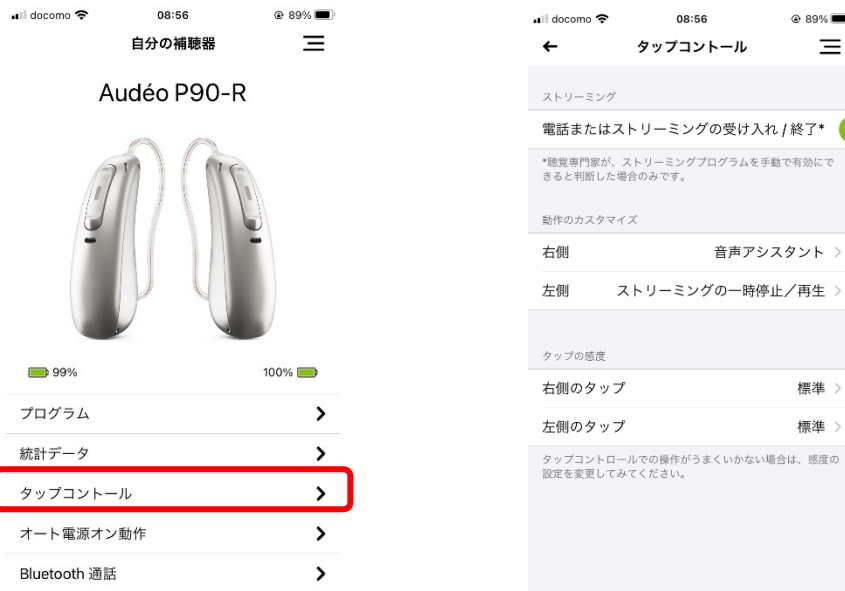

- 「お手入れ時期のお知らせ」が追加されました。この機能を有効にすると、ユーザー自身が設定した頻度でお手入れのタイミングを定期的に通知します。

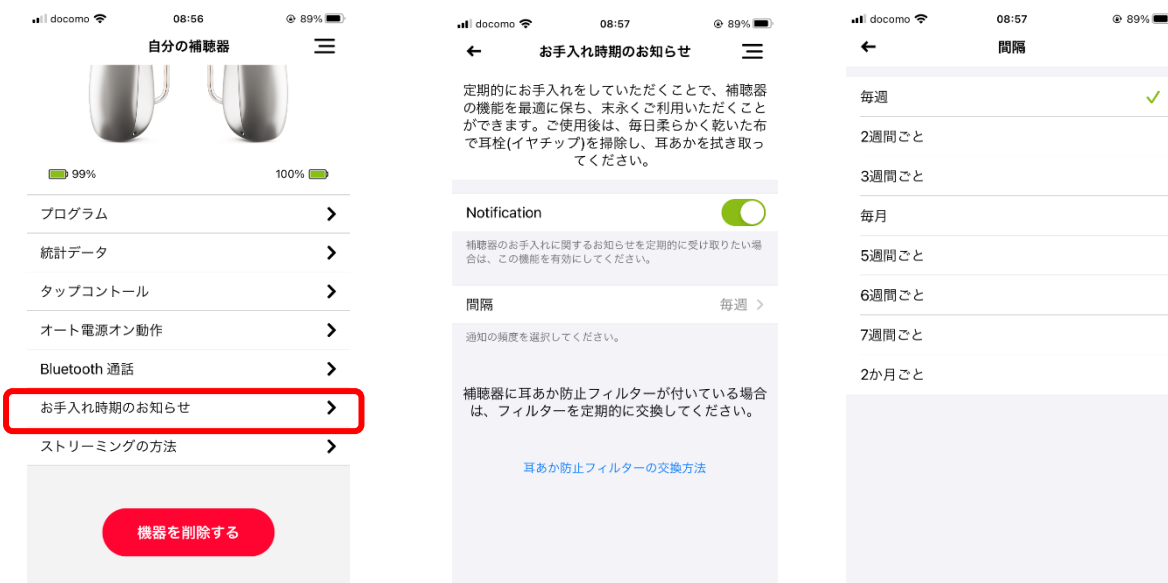

## 改良点

- リモコンのメイン画面に表示されるオートセンス OS が「自動」と表示されるようになりました。



- リモコンの設定画面にある周波数スライダーのレイアウトを改良しました。



- 音楽や電話などの音声ストリーミングを終了した後、オートセンス OS ではなく直前のプログラムへ戻るようになりました（パラダイスのみ）。
- Target 上でオートマッチプログラムが変更された場合、ユーザーがアプリで作成した関連するカスタムプログラムは従来のように削除されず、リセットされて残ります。これにより、ユーザーはカスタムプログラムを作りなおさなくても、調整後のオートマッチプログラムを基本にして設定し直すことができます（パラダイスのみ）。
- 個人情報保護方針を更新しました。

## 修正点

- 特定の状況下で「設定」ボタンが利用できない問題を修正しました。
- 片耳装用時やテレビコネクターを使用する際に環境バランスの画面にあるスライダーが利用できない問題を修正しました。
- T-コイルに関連するいくつかの問題を修正しました。
- iOS 端末でリモートサポートを行っている最中、電話がかかってくるとリモートサポートセッションが中断されてしまう問題を修正しました。
- Android 端末でリモートサポートの利用後、リモコン機能が利用できなくなる不具合を修正しました。
- Android 端末でヘルスのページをスクロールするとページ自体が再読み込みされてしまう問題を修正しました。