

マイフォナック アプリで作成する“マスク専用プログラム”

ダイレクト接続可能なフォナック補聴器（スカイ マーベル除く）を使用しているユーザーは、リアルタイムでの聞こえの環境を改善するのに役立つ「マイフォナック アプリ」を使って、自分だけのカスタムプログラムを作ることが可能です。ことばの明瞭度、低・中・高音調節、ノイズリダクション、ことばの指向性などを簡単に調節できます。

ステップ1：ダイレクト接続可能なフォナック補聴器とマイフォナック アプリがアプリ内でペアリングされていて、リモコンが使用状態にあることを確認します。

ステップ2：画面右下の**〔設定〕**  をタップします。

ステップ3：**〔明瞭度〕** をタップして選択します。

ステップ4：さらに細かい調節が必要な場合は、以下の内容を行ってみてください：

- 中音と高音を少しだけ上げます。
- 騒がしい中での会話では、ことばの指向性スライダーを右側へ移動させます。
- 静かな環境では、ダイナミクスを少しだけ右側へ移動させ、小さい音を上げます。

※ ご使用のモバイル端末によってはリモコンの全項目が見えない場合があります。その場合はスクロールしてください。



ステップ5：**〔保存〕** をタップすると、今調節した内容でカスタムプログラムを作成する準備に入ります。プログラムを別の名前に変更しておくと、カスタムプログラムが複数あってもどのプログラムかすぐに認識できるので非常に便利です（例：マスク専用プログラム）。

名前を変更したら再度**〔保存〕** をタップするとプログラムが作成されます。

〔自分の補聴器〕 の**〔プログラム〕** をタップすると作成したプログラムのベースプログラム名（例：静かな環境）が小さく表示されます。



ステップ6：必要に応じて**“マスク専用プログラム”** をご利用ください。作成したこのプログラムは後で微調節&更新して使用することも可能です。

