


# QUICKGUIDE

## Slik kobler du ditt Phonak Marvel høreapparat til myPhonak-appen

For å kunne bruke dine Marvel-høreapparater med myPhonak app må mobiltelefonen hovedsakelig ha Bluetooth-versjon 4.2 eller nyere. Les mer hva Bluetooth er og hvilke telefoner som kan kobles til myPhonak-appen på siste side.

- 1** Last ned appen "myPhonak" på din telefon.  
Har du en Android, går du inn i din appbutikk, f.eks. "Google Play".  
Har du en iPhone, går du inn i appen "App Store".  
Skriv inn "myphonak" i søkefeltet og installér appen.
- 2** Åpne appen på mobilen din. Du vil da få beskjed om å starte høreapparatene dine på nytt. Skru høreapparatene dine av og på og trykk "Fortsett" (se bildet).

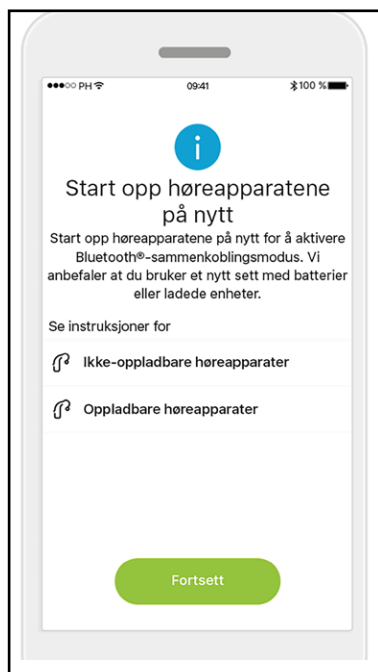

### Hvordan skruer man av og på høreapparatene?

Dette gjøres forskjellig om du har høreapparater med batteri, eller om de er oppladbare.


- For høreapparater med utskiftbare batterier må batteriluken åpnes og lukkes.
- Oppladbare høreapparater kan settes i laderen (tilkoblet strømuttak), deretter ta høreapparatene ut igjen. Alternativt kan apparatene slås av manuelt ved å holde inne den nederste knappen i 3-4 sekunder. Indikatorlyset i midten av trykkknappene vil lyse rødt når høreapparatet slår seg av. Slå deretter høreapparatene på igjen ved å holde inn den samme knappen i 3-4 nye sekunder til det lyser grønt.

- 3** Appen vil nå søke etter dine høreapparater. Dersom du har to apparater, vent til appen har funnet begge høreapparatene dine og trykk "Velg".



- 4** Du vil nå få opp en beskjed som sier «Parkobling fullført». Trykk «OK».

- 5** Når du får opp fjernkontroll-vinduet, kan du bruke appen som normalt. Når du åpner appen i ettetid vil det kunne ta noen sekunder før den kobler seg til høreapparatene, og vil se ut som bildet under når alt er som det skal.

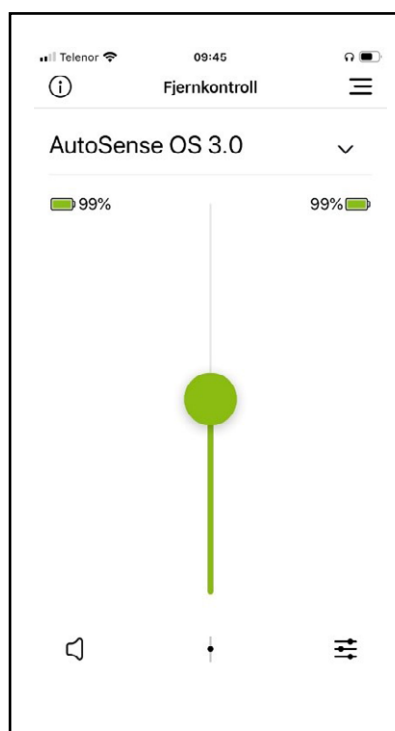

## Tilleggsopplysninger

Tilkoblingen til myPhonak-appen er ofte mest stabil om du også har koblet seg til for streaming og telefonsamtaler gjennom Bluetooth-menyen. Følg veiledning for tilkobling for telefonsamtaler og annen lydoverføring.

## Hva er Bluetooth?

Bluetooth er en metode for trådløs datautveksling som kan brukes for å sende og motta data trådløst mellom enheter, f.eks. mellom en mobil og et høreapparat.

## Hvilke mobiltelefoner kan kobles til myPhonak-appen?

Noen mobiltelefoner med eldre Bluetooth-versjon fungerer, men ikke alltid. Det er ikke alltid mobiltelefoner med nyere Bluetooth-spoler fungerer med appen heller.

For å forsikre deg om at din mobiltelefon kan brukes med dine høreapparater kan du søke på din mobiltelefon i søkefeltet på denne nettsiden: <https://marvel-support.phonak.com/en/audeo-m-cell-phone-compatibility/>

## Har du spørsmål?

Kontakt oss på telefon: +47 960 98 600 eller  
e-post: [norge@phonak.com](mailto:norge@phonak.com)