

Phonak

Steg-for-steg-veiledning

Hvordan unngår du autoavspilling i Apple-produkter?

Apple-produkter, som Mac og iPhone, har som standard autoavspilling av videoer og reklamer i nettleseren. Dette kan være forstyrrende for høreapparatbrukere med Phonak Paradise som tillater 2 aktive Bluetooth-tilkoblinger. Autoavspilling kan medføre at Mac-en «stjeler» streaming-aktiviteten din via en nettleser, selv om du har en annen Bluetooth-tilkobling aktivert.

Reklamer på ulike sider kan være uhørbare, men likevel telles de som et streamingsignal. Det kan dermed være vanskelig å lokalisere kilden, da reklamen/videoen kan avspilles i en annen fane eller i bakgrunnen, selv når Safari ikke aktivt benyttes.

Slik slår du av autoavspilling på iPhone:

Innstillinger → Tilgjengelighet → Bevegelse → forhåndsvis video automatisk.

--> Se neste side for å slå av på Mac

Slik slår du av autoavspilling på Mac:

1. Åpne et hvilket som helst nettsted i nettleseren, og velg deretter "Safari" i hovedverktøylinjen øverst på skjermen.
2. Velg "Innstillinger" og bytt deretter til "Nettsteder" -fanen i det nye vinduet.
3. Velg "Auto-Play" i panelet til venstre.
4. Til slutt velger du "Aldri automatisk spill" under "Aktuelt åpne nettsteder".

