

## Starte høreapparatet på nytt

**Bruk denne teknikken hvis høreapparatet har en feiltilstand. Dette vil ikke fjerne eller slette noen programmer eller innstillinger.**

1. Trykk og hold inn den nedre delen av knappen i minst 15 sekunder. Det spiller ingen rolle om høreapparatet er slått på eller av før du trykker på knappen. Det er ikke noe lys eller lydsignal etter de 15 sekundene.

2. Sett høreapparatet i laderen som er koblet til strømnettet og vent til indikatorlyset blinker grønt. Dette kan ta inntil 30 sekunder. Høreapparatet er nå klart til bruk.

**Hvis apparatet er fortsatt ikke gjenopprettet:**

1. Sett apparatet i lader og vent 1 minutt.

2. Ta ut apparatet. Vent 15 sekunder.

3. Sett apparatet i lader igjen og vent 4 minutter. Da begynner det å blinke og apparatet lader.