

QUICKGUIDE

Hvordan starte høreapparatet på nytt

Bruk denne teknikken hvis høreapparatet har en feiltilstand. Dette vil ikke fjerne eller slette noen programmer eller innstillinger.

- 1** Trykk og hold inn den nedre delen av knappen i minst 15 sekunder. Det spiller ingen rolle om høreapparatet er slått på eller av før du trykker på knappen. Det vil ikke være noe lys eller lydssignal etter de 15 sekundene.
- 2** Sett høreapparatet i laderen som er koblet til strømmettet og vent til indikatorlyset blinker grønt. Dette kan ta opptil 30 sekunder. Høreapparatet er nå klart til bruk.
- 3** Hvis apparatet fortsatt ikke er gjenopprettet:
 1. Sett apparatet i laderen og vent 1 minutt.
 2. Ta ut apparatet. Vent 15 sekunder.
 3. Sett apparatet i laderen igjen og vent 4 minutter. Da skal det begynne å blinke og apparatet lader.

A Sonova brand



PHONAK
life is on