

Slik kobler du din iPhone til ditt Phonak Marvel eller Paradise høreapparat

Velg ikonet "Innstillinger" på din iPhone.

- 1** I innstillinger skal du velge menypunktet "Bluetooth".
Aktivér Bluetooth.
- 2** På ditt Marvel/Paradise-høreapparat skal batteriluken nå åpnes i cirka 5 sekunder, før du lukker den igjen. Hvis du har et oppladbart Marvel/Paradise-høreapparat, skal du slå det av – og slå det på igjen.
- 3** Vent noen sekunder til navnet på høreapparatet dukker opp på skjermen. Du skal kun koble et av høreapparatene til telefonen, velg det høyre høreapparatet om audiografen ikke har informert om annet. Trykk på «koble til» når du får beskjeden «forespørsel om Bluetooth-sammenkobling».

Når enhetene er koblet sammen, hører du et kort pip i høreapparatet. Forbindelsen mellom din iPhone og ditt Marvel/Paradise-høreapparat er nå opprettet.

A Sonova brand



PHONAK
life is on

Slik kobler du din Android-telefon til ditt Phonak Marvel eller Paradise-høreapparat

Velg ikonet "Innstillinger" på din Android-telefon.

- 1** I innstillinger skal du velge ikonet for "Bluetooth". Aktivér Bluetooth.
- 2** På ditt Marvel/Paradise-høreapparat skal batteriluken nå åpnes i cirka 5 sekunder, før du lukker den igjen. Hvis du har et oppladbart høreapparat, skal du slå det av – og slå det på igjen.
- 3** På din Android-telefon vil du nå se beskjeden «tilgjengelige enheter». Navnet på høreapparatet vil stå på skjermen sammen med et telefonikon. Du skal kun koble et av høreapparatene til telefonen, velg det høyre høreapparatet om audiografen ikke har informert om annet.

Når enhetene er koblet sammen, hører du et kort pip i høreapparatet. Forbindelsen mellom din Android-telefon og ditt Marvel/Paradise høreapparat er nå opprettet.



A Sonova brand

PHONAK
life is on