

## Slik kobler du din iPhone til ditt Phonak Marvel høreapparat

Velg ikonet **"Innstillinger"** på din iPhone.

**1** I innstillinger skal du velge menypunktet **"Bluetooth"**. Aktiver Bluetooth.

**2** På ditt Marvel høreapparat skal batteriluken nå åpnes i cirka 5 sekunder, før du lukker den igjen. Hvis du har et oppladbart Marvel høreapparat, skal du slå det av – og slå det på igjen.

**3** Vent noen sekunder og navnet på høreapparatet vil dukke opp på skjermen. Du skal kun koble et av høreapparatene til telefonen, velg høyre høreapparatet om audiografen ikke har informert om annet. Trykk på **«koble til»** når du får beskjed **«forespørsel om Bluetooth-sammenkobling»**.

Når enhetene er koblet sammen, hører du et kort pip i høreapparatet. Forbindelsen mellom din iPhone og ditt Marvel høreapparat er nå opprettet.



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## Slik kobler du din **Android** telefon til ditt **Phonak Marvel** høreapparat

Velg ikonet **"Innstillinger"** på din Android telefon.

- 1** I innstillinger skal du velge ikonet for **"Bluetooth"**. Aktiver Bluetooth.
- 2** På ditt Marvel høreapparat skal batteriluken nå åpnes i cirka 5 sekunder, før du lukker den igjen. Hvis du har et oppladbart Marvel høreapparat, skal du slå det av – og slå det på igjen.
- 3** På din Android telefon vil du nå se beskjeden **«tilgjengelige enheter»**. Navnet på høreapparatet vil stå på skjermen sammen med et telefon-ikon. Du skal kun koble et av høreapparatene til telefonen, velg høyre høreapparatet om audiografen ikke har informert om annet.

Når enhetene er koblet sammen, hører du et kort pip i høreapparatet. Forbindelsen mellom din Android telefon og ditt Marvel høreapparat er nå opprettet.



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on