


QUICKGUIDE

Slik kobler du dine Phonak Paradise- eller Marvel-høreapparater til myPhonak-appen

For å kunne bruke Phonak Paradise eller Marvel-høreapparater med myPhonak-appen, må mobiltelefonen din støtte Bluetooth-versjon 4.2, og bør også være oppdatert til nyeste firmware-versjon.

- 1** Last ned appen "myPhonak" på din telefon.
Har du en Android, åpner du appbutikken "Google Play".
Har du en iPhone, åpner du appbutikken "App Store".
Skriv inn "myphonak" i søkefeltet og installer appen.
- 2** Åpne appen på mobilen din. Du vil da få beskjed om å starte høreapparatene dine på nytt. Skru høreapparatene dine av og på og trykk "Fortsett" (se bildet).

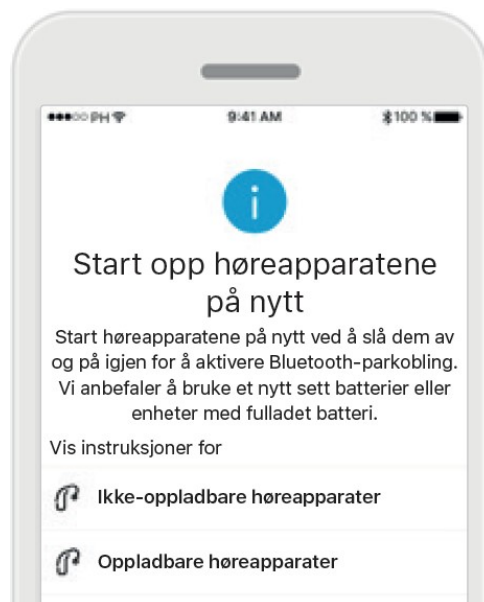

Hvordan skrur man av og på høreapparatene?

Dette gjøres forskjellig om du har høreapparater med batteri, eller om de er oppladbare.


- For høreapparater med utskiftbare batterier, må batteriluken åpnes og lukkes.
- Oppladbare høreapparater kan settes i laderen (tilkoblet strømuttak), deretter ta høreapparatene ut igjen. Alternativt kan apparatene slås av manuelt ved å holde inne den nederste knappen i 5 sekunder. Indikatorlyset i midten av trykknappene vil lyse rødt når høreapparatet slår seg av. Slå deretter høreapparatene på igjen ved å holde inn den samme knappen i 3 nye sekunder til det lyser grønt.

- 3 Appen vil nå søke etter dine høreapparater. Dersom du har to apparater, vent til appen har funnet begge høreapparatene dine og trykk "Velg".



- 4 Du vil nå få beskjeden «Parkobling fullført». Trykk «OK».

- 5 Når du får opp fjernkontroll-vinduet, kan du bruke appen som normalt. Når du åpner appen i ettetid vil det kunne ta noen sekunder før den kobler seg til høreapparatene, og vil se ut som bildet under når alt er som det skal.

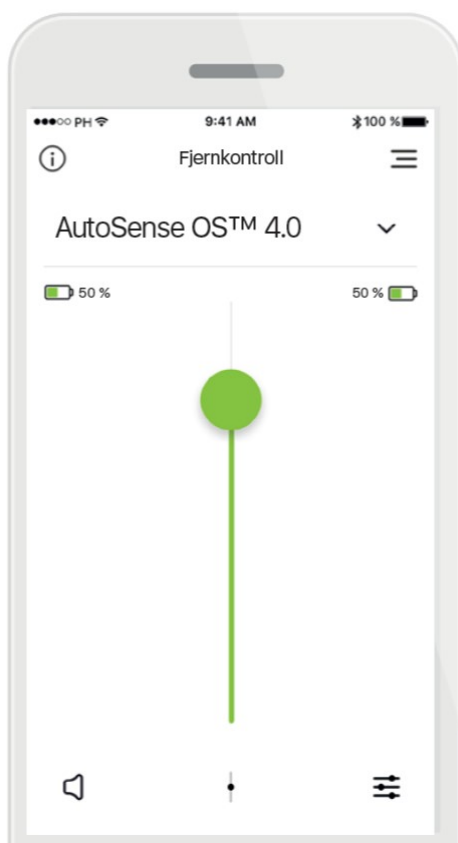

Tilleggsopplysninger

Tilkoblingen til myPhonak-appen er ofte mest stabil om du også har koblet til for streaming og telefonsamtaler gjennom Bluetooth-menyen. Følg annen veiledning for tilkobling for telefonsamtaler og annen lydoverføring.

Hva er Bluetooth?

Bluetooth er en metode for trådløs datautveksling som kan brukes for å sende og motta data trådløst mellom enheter, f.eks. mellom en mobil og et høreapparat.

Hvilke mobiltelefoner kan kobles til myPhonak-appen?

Noen mobiltelefoner med eldre Bluetooth-versjon fungerer, men ikke alltid. Det er ikke alltid mobiltelefoner med nyere Bluetooth-spoler fungerer med appen.

For å forsikre deg om at din mobiltelefon kan brukes med dine høreapparater, kan du søke opp din mobiltelefon i søkefeltet på denne nettsiden: <https://www.phonak.com/no/no/brukerstotte/produktstotte-for-phonak/mobiltelefoner-kompatibel-med-horeapparat.html>

Har du spørsmål?

Kontakt oss på telefon: +47 960 98 600 eller
e-post: norge@phonak.com