

QUICKGUIDE

-Hvordan kobler jeg opp mine høreapparater til PC?

1

MED PHONAK PARADISE APPARATER:

1. Slå høreapparatene av og på.
2. Søk i bluetooth-menyen på PC-en og koble til.

2

MED PHONAK MARVEL APPARATER:

1. Slå av bluetooth på den allerede tilkoblede mobiltelefonen.
2. Slå høreapparatene av og på.
3. Søk i bluetooth-menyen på PC-en og koble til.

Hva er Bluetooth?

Bluetooth er en metode for trådløs datautveksling som kan brukes for å sende og motta data trådløst mellom enheter, f.eks. mellom en mobil og et høreapparat.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på telefon: +47 960 98 600 eller
e-post: norge@phonak.com

A Sonova brand



PHONAK
life is on