

Wykorzystanie urządzenia Roger X / MLx Audio Checker

Reference Sheet

roger



Szkoła: _____

Nauczyciel: _____

Kontakt Roger: _____

Telefon _____

Data: _____

Instrukcja użycia

1. Urządzenie MLx Audio Checker powinno zostać naładowane przed użyciem.
2. Włóż odbiornik Roger X do gniazda znajdującego się z przodu. Będzie pasował tylko w jedną stronę.
3. Włóż słuchawki do gniazda znajdującego się w dolnej części urządzenia MLx Audio Checker. Włącz Audio Checker.
4. Włącz mikrofon Roger inspiro. Przez słuchawki powinno być słychać dźwięk z mikrofonu.
5. Jeśli nie słyszysz dźwięku, sprawdź co może być przyczyną i jak ten problem rozwiązać:
 - A. Naciśnij **Connect** na mikrofonie Roger. Jeśli teraz działa, oznacza to, że odbiornik nie był w sieci.
 - B. Upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony.
 - C. Jeśli żadne z powyższych nie pomaga skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

