

Roger™ Touchscreen Mic i odbiorniki Roger

Instrukcja

roger

Roger Touchscreen Mic jest prostym i intuicyjnym mikrofonem do wykorzystania w klasie. Pozwala zarówno nauczycielom jak i uczniom łatwo zorientować się kiedy mikrofon jest włączony i nadaje dźwięk.

Mikrofon



Roger Touchscreen Mic

Aby włączyć naciśnij przycisk włączenia znajdujący się z boku obudowy przez 3 sekundy. Podczas uruchamiania wskaźnik zaświeci na zielono.

- Zawieś Roger Touchscreen Mic wokół szyi rozmówcy i dostosuj wysokość tak, by górna część mikrofonu znalazła się w odległości 20 cm od ust.
- Jeśli konieczne jest podłączenie ucznia zbliż Roger Touchscreen Mic na odległość 10 cm od odbiornika i wybierz opcję Connect (Połącz). Powtórz to samo dla odbiornika na uchu przeciwnym.
- Mikrofon Roger Touchscreen Mic może zostać wyciszony poprzez wybranie przycisku Wycisz. Wskaźnik świetlny znajdujący się wokół przycisku będzie wówczas świecił na czerwono.
- Na koniec dnia wyłącz mikrofon Roger Touchscreen Mic przyciskając wyłącznik przez 3 sekundy. Na mikrofonie zostanie wyświetlone pytanie o potwierdzenie wyłączenia. Zaznacz zielony znak tak. Ładuj urządzenie codziennie z wykorzystaniem odpowiedniej ładowarki USB lub urządzenia Charging Rack.

Odbiornik



Roger X

- Podłącz Roger X do aparatu z wykorzystaniem odpowiedniej stopki audio. Jest on teraz gotowy do użycia.
- Gdy odbiorniki podłączone są do sieci Roger nie ma konieczności ich ponownego łączenia.
- Jeśli odbiorniki muszą pozostać w szkole, na koniec dnia odłącz je od aparatów według wskazówek przekazanych przez protetyka słuchu



Zintegrowane kształtem odbiorniki Roger

- Odbiorniki zintegrowane kształtem są wykonywane do konkretnych modeli aparatów słuchowych i implantów ślimakowych.
- Gdy odbiorniki podłączone są do sieci Roger nie ma konieczności ich ponownego łączenia, nawet po wyłączeniu i ich ponownym włączeniu.
- Odłączanie odbiorników zintegrowanych kształtem w szkole nie powinno być konieczne.