

Wykorzystanie Roger™ Touchscreen Mic w małych grupach

Instrukcja

roger



Nowy innowacyjny tryb małej grupy wykorzystuje system 3 inteligentnych mikrofonów współpracujących ze sobą w sposób adaptacyjny. Gdy Roger Touchscreen Mic znajduje się na stoliku pomiędzy 2-5 uczniami, mikrofony automatycznie będą ustawiały się w kierunku ucznia, który mówi.

Tryb małej grupy

- Wyczep Roger Touchscreen Mic z pętli noszonej na szyi.
- Umieść Roger Touchscreen Mic na stoliku w środku grupy*.
- Mikrofon automatycznie zacznie przekazywać głosy osób znajdujących się w pobliżu.
- Po zakończeniu aktywności w małej grupie, ponownie podłącz zawieszkę Roger Touchscreen Mic

* Gdy główny mikrofon Roger Touchscreen Mic znajduje się w trybie małej grupy nie będzie nadawał sygnału do głośników DigiMaster ani w sieci MultiTalker.

