

Wykorzystanie zaawansowanych opcji sieci w Roger™ Touchscreen Mic

Instrukcja

roger

Jeśli wielu uczniów i nauczycieli wykorzystuje urządzenia Roger w jednej klasie, konieczne może okazać się wykonanie czegoś więcej niż tylko wybrania opcji Connect (połącz). Czasami nauczyciel może chcieć sprawdzić wiele urządzeń, bądź współprowadzący może chcieć rozmawiać tylko z jednym uczniem lub wybraną grupą uczniów. Dzięki Roger Touchscreen Mic jest to możliwe do wykonania za pomocą zaledwie kilku kliknięć.



Disconnect (rozłączenie) pozwala nauczycielowi odłączyć urządzenie od sieci. W sytuacji gdy dziecko nie musi już odbierać sygnału Roger np. by pracować w indywidualnym trybie, nauczyciel będzie w stanie nadal przekazywać sygnał Roger do pozostałych słuchaczy.

- Przejdź do drugiego ekranu i wybierz ikonę Disconnect (rozłącz) w odległości 10 cm od odbiornika Roger, by go rozłączyć.
- Połącz dziecko ponownie w sieć wybierając ikonę Connect (połącz) w tej samej odległości od odbiornika lub poprzez połączenie przez Roger WallPilot.



SubNet (współistniejąca sieć) jest wykorzystywana, by nauczyciel mógł rozmawiać z jednym lub kilkoma uczniami przez krótki czas tak, by inni uczniowie tego nie słyszeli. To doskonała funkcja w sytuacji gdy nauczyciel chce indywidualnie wesprzeć uczniów. Funkcja SubNet pozwala również nauczycielowi wspomagającemu z drugim mikrofonem na stworzenie małej grupy dla części uczniów.

- Wybierz ikonę SubNet z ekranu głównego.
- Połącz odbiorniki uczniów przez wybranie opcji Connect (połącz) na mikrofonie znajdującym się w odległości 10 cm od odbiorników.
- Mikrofon powinien być zawieszony na szyi nauczyciela, by przekazywać jego instrukcje, lub odłożony na stoliku w celu wykorzystania trybu małej grupy do aktywności w grupach.
- Po zakończeniu kliknij ikonę Network (sieć) i połącz ponownie odbiorniki dzieci poprzez wybranie opcji Connect lub poprzez Roger WallPilot.

JoinNet używana jest, by dołączyć mikrofon Roger TouchScreen Mic do sieci bez przeszkadzania prowadzącemu w trakcie lekcji. Funkcja stanowi alternatywę dla urządzenia Roger WallPilot.

- Kliknij na ikonę JoinNet (dołącz do sieci) w odległości 10 cm od dowolnego urządzenia Roger znajdującego się w tej sieci.



NewNet (nowa sieć) funkcja ta jest wykorzystywana gdy Roger Touchscreen mic ma opuścić sieć i/lub sieć w klasie ma być zresetowana.

- Wybierz ikonę **NewNet**
- Połącz nowe urządzenia Roger do tej sieci wybierając **Connect** w odległości 10 cm od mikrofonu Roger Touchscreen Mic



Mass Connect (połączenie masowe) jest wykorzystywane do szybkiego połączenia wielu urządzeń znajdujących się w pobliżu. Opcja ta musi zostać skonfigurowana w menu Ustawienia.

- Zgromadź wszystkie odbiorniki Roger blisko siebie i upewnij się, że są włączone.
- Wybierz **Mass Connect** i przejedź w odległości 10 cm od wszystkich urządzeń. Odbiorniki powinny łączyć się jedno po drugim.
- Kliknij na okienko, by przerwać masowe połączenie.
- By potwierdzić połączenia, kliknij na listę urządzeń.
- Jeśli urządzenie nie zostało połączone, ponownie wybierz funkcję **Mass Connect** w jego pobliżu.



List devices (lista urządzeń): to szybki sposób na zobrazowanie, które urządzenia Roger znajdują się w pobliżu i które są połączone z Roger Touchscreen Mic.

- Wszystkie urządzenia powinny być w zasięgu 10 cm od Roger Touchscreen Mic
- Wybierz **List devices**
- Wszystkie urządzenia Roger znajdujące się w pobliżu zostaną pokazane na liście (czas na wyszukanie może różnić się w zależności od liczby urządzeń do znalezienia). Urządzenia dostępne pojawią się na liście w kolorze szarym natomiast połączone w kolorze czarnym z symbolem połączenia.
- Jeśli pożądane urządzenie Roger nie jest podłączone wystarczy wybrać ikonę Connect w odległości 10 cm od tego urządzenia.