

Använda Roger SF Touchscreen Mic och Roger DigiMaster-högtalare

Lathund

roger



Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att använda Roger™ SF Touchscreen Mic.

Mikrofon



Roger SF Touchscreen Mic

Slå på enheten genom att hålla in på/av-knappen på sidan av mikrofonen i tre sekunder. De gröna indikatorljusen blinkar under uppstarten.

- Häng Roger SF Touchscreen Mic om halsen på läraren och justera längden på halsbandet tills mikrofonens överkant är 20 cm från munnen.
- Om du behöver ansluta en högtalare placerar du Roger SF Touchscreen Mic inom 10 cm från Roger DigiMaster och trycker på **Anslut**-ikonen.
- Roger SF Touchscreen Mic kan sättas i tyst läge genom att man trycker på Mute-knappen. Indikatorljuset runt knappen blinkar nu rött.
- När dagen är slut slår du av Roger SF Touchscreen Mic genom att hålla in på/av-knappen i tre sekunder. Du ombeds sedan att bekräfta att du vill stänga av mikrofonen. Bekräfta genom att klicka på **Ja**.
- Ladda dagligen med rätt USB-laddare eller genom att placera mikrofonen i Roger Charging Rack.

Högtalare



Roger DigiMaster

- Roger DigiMaster behöver endast anslutas till Roger-nätverket en gång. Därefter förblir de anslutna även då de slås av och på igen.
- Då högtalarna används justeras volymen på Roger DigiMaster automatiskt i förhållande till bakgrundsbullret som uppmäts av Roger SF Touchscreen Mic. Volymen kan justeras manuellt genom att trycka på högtalarikonen som visas på startvyn på Roger SF Touchscreen Mic.
- Roger DigiMaster går automatiskt in i vänteläge om ingen ljudsignal tas emot på 60 sekunder.

Indikatorljus för Roger DigiMaster

- Fast grönt sken: Roger-mikrofonen är i tyst läge
- Fast blått sken: Standarddriftsläge
- Blinkande blått sken (blinkar varannan minut): Vänteläge
- Blinkar grönt en gång: när volymen ändras manuellt blinkar indikatorljuset en gång (2 dB per steg)
- Blinkar rött en gång: Högsta eller lägsta möjliga manuellt inställda ljudvolym har nåtts