

PHONAK

life is on

Rengörings- & skötselråd för din bakom-örat-apparat.



Rengörings- och skötselråd gällande din bakom-örat-apparat.

Att undvika:

- Vatten/ hög fuktighet

Din hörapparat innehåller känslig elektronik som förstörs av vatten och fukt.

Har din apparat blivit utsatt för fukt, rengör och torka din apparat. Mikrovågsugn eller annan värmeutrusning får aldrig användas.

- Värme

Låt inte din apparat ligga framme i ett fönster eller i din bil då den riskerar att utsättas för sol och värme som skadar apparaten.

.- Hårspray och smink

Avlägsna din hörapparat innan användning av dessa produkter då kan skada apparaten och täppa till mikrofonerna.

Tips!

Lämna batterifacket öppet när du inte använder apparaten så att eventuell fukt kan avdunsta.

Märker du att din hörapparat låter lite svagare, testa att byta mikrofonfilter om din apparat har ett sådant, samt batteri.

Om din hörapparat har utbytbara mikrofonfilter skall dessa bytas regelbundet (art.nr. långa 054-0312/ korta 054-0310), 1 gång i månaden eller oftare om behovet finns.

Använd dig av fuktabsorberingskapslar (art.nr. 098-0014) och förvara din hörapparat på en torr och ren plats när den inte används.

Skötselråd

Daglig rengöring med våra rengöringsservetter (art.nr.098-0012) rekommenderas varmt. Använd aldrig vanliga rengöringsmedel som tvål/ diskmedel eller liknande då de skadar apparaten.

För rengöring av dome, Slimtip, öroninsats, cShell och ljudslang rekommenderas att en fibertrasa används.

Skölj inte med vatten då det riskerar att stanna kvar i slangen eller insatsen samt skada hörapparatusens elektronik.

Tvätta eller rengör aldrig mikrofonfiltret på din hörapparat då detta kan leda till att filtret förlorar sina speciella ljudegenskaper.

Får din ljudslang färgförändringar, förhårdnader eller sprickor så måste denna bytas ut. Kontakta din audionom om du är osäker på vilken slang du ska använda.

Phonak C&C Line har ett speciellt framtaget rengöringspaket för bakom-örat-apparater (art.nr.098-0041).

Fukt, smuts och svett kan skada hörapparaterna och få dem att fungera sämre.

Genom att ta hand om dina hörapparater med Phonaks rengöringsprodukter säkerställs god funktion samtidigt som hörapparatusens livslängd förlängs.

Noggrann och regelbunden skötsel av din hörapparat bidrar till överlägsen funktion och ökad livslängd.

Rengöring och skötsel av bakom-örat-apparater



Byt ljudslang regelbundet, en gång i månaden eller oftare om behovet finns.

Använd dig av fuktabsorberingskapslar (art.nr. 098-0014) och förvara din hörapparat på en torr och ren plats när den inte används.

För rengöring av dome, SlimTip, öroninsats, cShell och ljudslang rekommenderas att en fiberduk används (medföljer rengöringskit 1, art.nr. 098-0041).

Skölj inte med vatten eftersom det riskerar att stanna kvar i slangen eller insatsen.

Lämna batterifacket öppet när du inte använder apparaten så att eventuell fukt kan avdunsta.



Rengöringskit till bakom-örat-apparater, art.nr 098-0041.