



Instruktioner för RIC Fit'nGo

Anpassningsinstruktioner för RIC-modeller




PHONAK
life is on

Fästa domen i xReceiver


Kontrollera att vaxfiltret har monterats korrekt i ljudutgången på xReceiver innan domen sätts på.




1) Håll xReceiver i ena handen och domen i den andra.

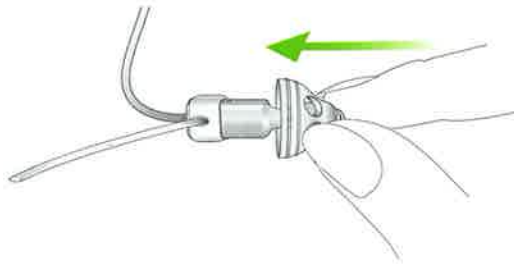

2) Skjut domen över ljudutgången på xReceiver.

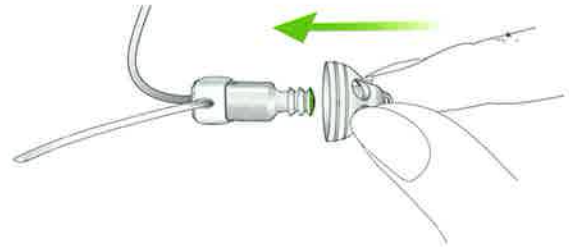

3) xReceiver och domen ska passa perfekt ihop.

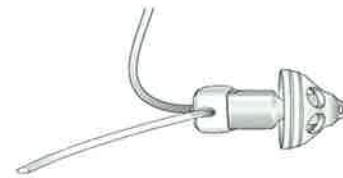



⚠ Det kan hända att domen blir kvar inne i hörselgången när du tar ut xReceiver ur örat. Om det mot förmodan skulle inträffa att någon del blir kvar inne i hörselgången bör man uppsöka läkarvård för att ta bort delen på ett säkert sätt.

Fästa / ta bort SlimTip på / från xReceiver

Så här tar du bort den

1) Placera den smala spetsen på verktyget i SlimTip-utgången.


2) Tryck försiktigt på ljudutgången på xReceiver så att den lossnar från SlimTip.

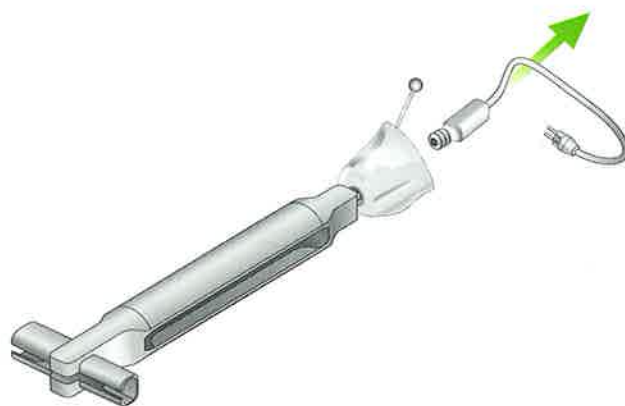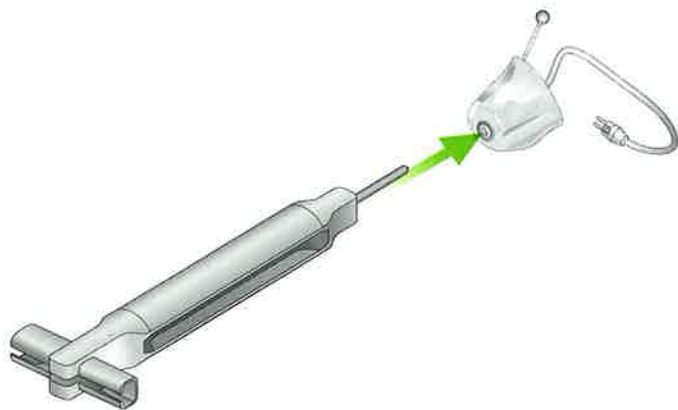

Placera hörapparaten på örat

När du anslutit xReceiver med öroninsats till hörapparaten är det dags att placera hörapparaten på brukarens öra.

- 1) Placera hörapparaten över örat ①.
 - 2) Håll xReceiver-kabeln där den är fäst vid domen och tryck försiktigt in domen i brukarens hörselgång ②. Domen ska placeras tillräckligt långt in i örat så att xReceiver ligger i linje med huvudet. xReceiver ska inte sticka ut när du tittar på brukaren framifrån.
 - 3) Placera xReceiver-hållaren i conchan ③.
- 👂 Om hållaren är för lång, kan du korta av den något. Korta den inte för mycket, eftersom det kan påverka kvarhållningen i örat.

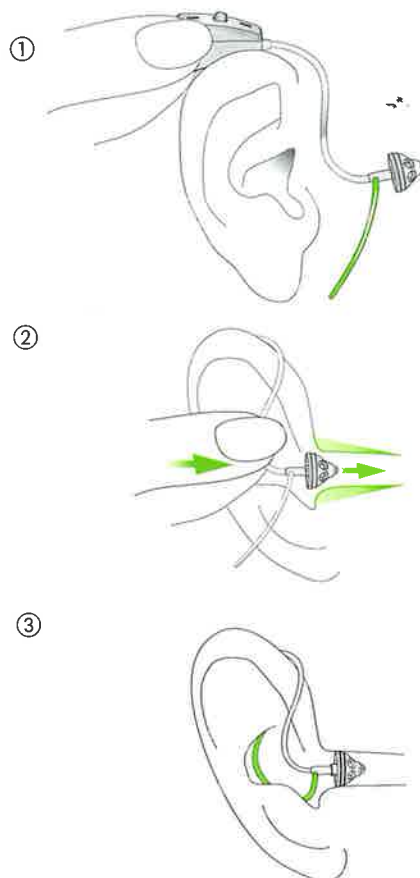


Byta vaxfilterssystemet

Alla xReceiver-enheter är utrustade med ett vaxfiltersystem för att skydda xReceiver från att skadas av öronvax. Det är enkelt att byta vaxfiltret. Eventuellt måste du demonstrera för brukaren hur man byter vaxfiltret.

Vi föreslår att vaxfiltret kontrolleras regelbundet och byts ut när det ser smutsigt ut, eller när hörapparatens ljudstyrka eller ljudkvalitet har försämrats.

- 1) Ta bort domen från xReceiver. Ta bort eventuellt synligt vax från xReceiver. För in utbytesverktygets borttagningssida i det använda vaxfiltret ① så att skaftet på hållaren vidrör vaxfiltrets kant och dra det därefter rakt utåt ②. Vrid inte vaxfiltret från genomföringen.

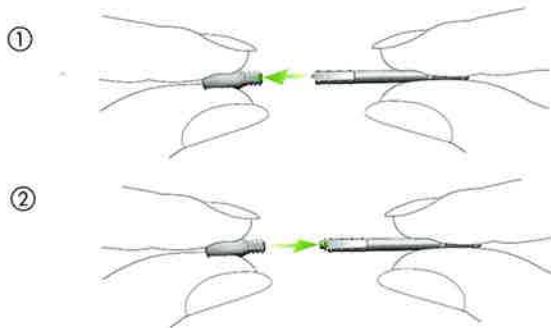

- 2) För att sätta i det nya vaxfiltret trycker du försiktigt utbytesverktygets isättningssida rakt in i hålet på xReceiver ③ tills den yttre ringen ligger jämsn med xReceiver. Dra verktyget rakt utåt ④. Det nya vaxfiltret sitter kvar på sin plats. Sätt nu på en dome på xReceiver.

