

# Använda Roger™ Touchscreen Mic och Roger™-mottagare

Lathund

roger



Roger Touchscreen Mic är enkel och intuitiv att använda i klassrummet och gör det möjligt för både lärare och elever att enkelt veta när mikrofonen är på och sänder.

## Mikrofon



### Roger Touchscreen Mic

Slå på enheten genom att hålla in på/av-knappen på sidan av mikrofonen i tre sekunder. De gröna indikatorljusen blinkar under uppstarten.

- Häng Roger Touchscreen Mic om halsen på läraren och justera längden på halsbandet tills mikrofonens överkant är 20 cm från munnen.
- Om en elev behöver ansluta sig placerar du Roger Touchscreen Mic inom 10 cm från Roger-mottagaren och trycker på **Anslut**-ikonen. Upprepa med mottagaren på andra örat.
- Roger Touchscreen Mic kan sättas i tyst läge genom att man trycker på Mute-knappen. Indikatorljuset runt knappen blinkar nu rött.
- När dagen är slut slår du av Roger Touchscreen Mic genom att hålla in på/av-knappen i tre sekunder. Bekräfta att du vill stänga av mikrofonen genom att klicka på Ja. Ladda dagligen med rätt USB-laddare eller genom att placera mikrofonen i Roger Charging Rack.

## Mottagare



### Roger X

- Anslut Roger X på hörapparaten med hjälp av lämplig audiosko. Nu är den klar att användas.
- När mottagarna en gång har anslutits till Roger-nätverket behöver de inte återanslutas.
- Om mottagaren måste lämnas kvar i skolan ska du ta bort Roger X från hörapparaten vid skoldagens slut, enligt anvisningar från din audionom.



### Designintegrerad Roger-mottagare

- Designintegrerade Roger-mottagare är skräddarsydda för särskilda hörapparater och cochleaimplantat.
- När mottagarna en gång har anslutits till Roger-nätverket behöver de inte återanslutas, även när man har slagit av och på dem igen.
- Det bör inte vara nödvändigt att ta loss designintegrerade mottagare i skolan.