

Använda Roger™ Touchscreen Mic för mindre grupper

Lathund

roger



Det nya gruppläget använder tre intelligenta inbyggda mikrofoner som arbetar tillsammans på ett avancerat och adaptivt sätt. När Roger Touchscreen Mic placeras på ett bord mellan två till fem elever riktar mikrofonerna automatiskt in sig mot den elev i gruppen som talar.

Gruppläge

- Ta loss Roger Touchscreen Mic från halsbandet.
- Placera Roger Touchscreen Mic direkt på bordet mitt i den mindre gruppen*.
- Mikrofonen sänder automatiskt röster från de personer som befinner sig nära den.
- När gruppövningen är slut fäster du Roger Touchscreen Mic på halsbandet igen så att den kan användas av en talare.

* När en primär Roger Touchscreen Mic används i gruppläge kan den inte längre sända till en DigiMaster-högtalare eller användas i ett MultiTalker-nätverk.

