

Skapa ett Roger™-nätverk i klassrummet

Lathund

roger



Alla Roger-enheter för skolan har utformats för att vara enkla att använda tillsammans. Allt som behövs är att ansluta dem i ett nätverk för att de ska fungera tillsammans. Det finns flera olika sätt att ansluta dem, beroende på vilka enheter du har. Valet är ditt.

Lägga till Roger-enheter via Anslut

Håll Roger skolmikrofonen inom 10 cm (4 tum) från följande Roger-enheter för att ansluta dem till klassrumsnätverket och klicka på **Anslut** eller tryck på ikonen **Anslut** .

- Roger öronburna mottagare
- Roger MyLink
- Roger Focus
- Roger-mikrofoner för skolan
 - Roger Touchscreen Mic
 - Roger Pass-around
 - Roger inspiro*
 - Roger DynaMic*
- Roger Multimedia Hub
- Roger AudioHub*
- Roger DigiMaster 5000**, 7000** högtalare
- Roger DigiMaster X

* När du ansluter dessa enheter till ett MultiTalker-nätverk med en Touchscreen Mic som primärt val ska du följa stegen på Touchscreen Mic-displayen när du har tryckt på **Anslut**.

** När du ansluter en Roger DigiMaster-högtalare ska du placera Roger-mikrofonen nära överkanten på Roger DigiMaster.

Lägga till Roger-enheter via Roger WallPilot



Roger-mottagare – Eleverna behöver bara gå fram till Roger WallPilot-enheten (öron och mottagare inom 30 cm från WallPilot) och stå framför den i ett par sekunder.

Roger-mikrofoner och medialink – Följande Roger-mikrofoner och multimediasändare kan anslutas genom att bara stänga av dem och slå på dem igen inom ett avstånd på 10 cm från Roger WallPilot:

- Roger Touchscreen Mic
- Roger Pass-around
- Roger Multimedia Hub
- Roger inspiro
- Roger DynaMic