

# Anslut Roger AudioHub till Roger inspiro

Lathund

roger



Skola: \_\_\_\_\_

Lärare: \_\_\_\_\_


Rogerkontakt: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_









Serienummer: \_\_\_\_\_

## Uppkoppling

1. Koppla in Roger AudioHub till en strömkälla.
2. Håll Roger-mikrofonen inom 10 cm avstånd från Roger AudioHub. Tryck på **Anslut**.
3. Anslut Roger AudioHub till ljudkällan genom att koppla in ljudkabeln till **Audio IN** på Roger AudioHubs baksida. Använd port nr. 1 om du endast kopplar in en källa. Koppla in kabelns andra ända en ljudkälla, som till exempel en MP3, TV, dator o.s.v.
4. Tryck och håll ner Roger AudioHubs strömknapp  i två sekunder. Starta sedan ljudkällans signal.
5. Volymen bör först justeras på ljudkällans enhet och därefter på Roger AudioHub.



## Indikatorlampa för Roger AudioHub

-  Fast rött sken - Roger AudioHub är avstängd
-  Fast blått sken - standarddriftsläge
-  Blinkande blått ljus - Roger-mikrofonen är avstängd eller utom räckvidd
-  Fast grönt sken - mikrofonen är dämpad
-  Grönt till rött sken - volymen justeras +/-
-  Blinkande gult ljus - programvaruuppdatering
-  Blinkande rött ljus - ring din Roger-kontakt.
-  Blinkande rött/gult ljus - kabeln är inte ordentligt inkopplad