

Använda Roger X / MLx Audio Checker

Lathund

roger



Skola: _____

Lärare: _____

Rogerkontakt: _____

Telefonnummer: _____


Datum: _____

Bruksanvisning

1. MLx Audio Checker bör laddas före användning.
2. Koppla in Roger X-mottagaren i den främre kontakten. Den passar endast åt ena hållet.
3. Koppla in hörlurarna längst ner på MLx Audio Checker. Starta Audio Checker.
4. Slå på Roger inspiro-mikrofonen. Du bör kunna höra inputljud från mikrofonen genom hörlurarna.
5. Om du inte hör något ljud bör du undersöka följande lösningar:
 - A. Tryck på **Anslut** på Roger inspiro. Om det fungerar befann sig mottagaren inte inom nätverket.
 - B. Kontrollera att mikrofonen inte är dämpad.
 - C. Kontakta din Roger-kontakt (se ovan) om inget av det ovanstående fungerar.



①

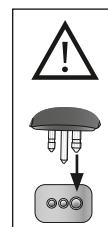

②



③

