

# Skapa ett Roger MultiTalker-nätverk

Lathund

roger



Flera mikrofoner kan användas i samma Roger-nätverk, vilket gör det möjligt för flera lärare, elever och ljudenheter att sända till Roger-lyssnare. Nedan följer olika sätt att skapa eller gå med i ett MultiTalker-nätverk (MTN). MTN-anslutningar upprätthålls ständigt, även när mikrofonerna är avstängda.

## Lägg till Roger-mikrofoner/AudioHub/DigiMaster via Anslut

1. Placera den primära Roger inspiro-enheten inom 10 cm avstånd från en Roger-mikrofon eller Roger AudioHub och tryck på **Anslut**. Roger inspiro bekräftar anslutningen via LCD-skärmen.
2. Gör om samma med alla andra Roger-enheter.



## Lägg till Roger-mikrofoner med Roger WallPilot

1. Placera Roger-mikrofonen inom 10 cm avstånd från en Roger WallPilot.
2. Slå först på mikrofonen och stäng därefter av den.
3. Mikrofonen är nu ansluten till klassrumsnätverket.



## Lägg till Roger inspiro via JoinNet (Gå med i nätverk)

1. Placera Roger inspiro inom 10 cm avstånd från en Roger-enhet.
2. Tryck på skärmknappen **JoinNet/Gå med i nätverk**.
3. Roger inspiro är nu ansluten till klassrumsnätverket.

