

Använda Roger för en privat konversation

Lathund

roger



Om du är den enda läraren i ett klassrum och du behöver tala enskilt med barnet som använder en Roger-mottagare, utan att andra elever hör, kan du snabbt skapa ett nytt nätverk för att tala med barnet. Det kan vara särskilt användbart när klassrumsnätverket har ett ljudförstärkningsystem.

Skapa ett nytt nätverk om du vill koppla bort din mikrofon från andra elever och bara sända till vissa barn.

1. Tryck på **OK**-knappen på Roger inspiro.
2. Bläddra tills **Nätverk** markeras. Tryck på **OK**.
3. Bläddra tills **Skapa Nytt nätverk** markeras. Tryck på **OK**.
4. Håll Roger inspiro 10 cm från barnets Roger-mottagare och tryck på **Anslut**.
5. Gör om med övriga mottagare som du vill ansluta till det nya nätverket.

Återgå till klassrumsnätverket

1. Tryck på **OK**-knappen.
2. Bläddra tills **Nätverk** markeras. Tryck på **OK**.
3. Håll Roger inspiro 10 cm från Digimaster-högtalarens ovansida eller en mottagare som tillhör ett barn som inte tillhör det nya nätverket.
4. Bläddra tills **JoinNet/Gå med i nätverk** markeras. Tryck på **OK**. Roger inspiro ger anvisningar för följande steg när du går med i nätverket.
5. Återanslut barnen som befann sig i privata samtal med klassrumsnätverket genom att hålla Roger inspiro nära barnets mottagare och trycka på **Anslut**. Gör om samma för samtliga mottagare som deltog i det privata samtalet.
6. Barn som befann sig i ett tillfälligt nätverk kan även **ansluta** genom att gå inom 1-3 m avstånd från Roger Wallpilot, om en sådan är installerad i klassrummet.