

Använda Roger inspiro och Roger designintegrerade mottagare

Lathund

roger



Förnamn: _____

Efternamn _____

Skola: _____

Lärare: _____


Rogerkontakt: _____

Telefonnummer: _____

Datum: _____

Mikrofon: Roger inspiro

Bruksanvisning

1. För att slå PÅ för du skjutlisten åt vänster tills den gröna markeringen blir synlig och skärmen börjar lysa.
2. Håll mikrofonen inom 20 cm avstånd från munnen eller häng bommikrofonen på ett lämpligt sätt på örat, med mikrofonen framför munnen.
3. Behöver eleven ansluta sig? Håll i så fall sändaren inom 10 cm från en Roger X-mottagare. Tryck på den högra **Anslutnings**-skärmmknappen. Upprepa på andra sidan om eleven har två Roger-mottagare.
4. Lås knapparna genom att trycka på . Tryck därefter på **OK**. En nyckelsymbol visas i statusfältet.
5. Stäng av inspiro varje dag genom att föra den övre skjutlisten till höger och ansluta mini-USB-kontakten på laddningsenheten till Roger inspiro.

Serienummer: _____



Mottagare: Designintegrerad

Bruksanvisning

1. Designintegrerade Roger-mottagare bör placeras enligt deras bruksanvisningar.
2. De ska inte behöva avlägsnas på skolan. (Mottagarna har utformats för permanent placering på hörapparater).

Serienummer

Höger: _____ Vänster: _____



10



11



13



15



16