

Genomföra en daglig lyssningskontroll på Roger X

Lathund

roger



Förnamn: _____

Efternamn _____

Skola: _____

Lärare: _____

Rogerkontakt: _____

Telefonnummer: _____

Årskurs: _____

Lyssningskontroll

Fyll i varje morgon

1. Lyssna på hörapparaten. Följ nedanstående felsökningssteg om hörapparaten inte fungerar.
2. Fäst Roger X på hörapparaten och slå på lärarmikrofonen om hörapparaten fungerar som den ska.
 - Hörapparaten ställs in på program nr. _____
 - Hörapparaten kräver inte programbyte.
Stäng batteriluckan/starta hörapparaten.
3. Tala in i lärarmikrofonen. Din röst bör höras klart och tydligt genom hörapparaten.



Felsökningsmanual för Roger

Problem

Inget ljud från hörapparaten

Åtgärd

- Försök med ett nytt hörapparatbatteri
- Är slangen sprucken eller öroninsatsen igentäppt av fukt/smuts?
- Ta bort slangen från insatsen. När ljudet ut? Om så är fallet är slangen blockerad eller trasig.

Inget mikrofonljud

- Kontrollera att mikrofonen är påslagen
- Sätt fast audioskon på hörapparaten igen
- Fäst Roger X på nytt
- Försök med ett nytt hörapparatbatteri
- Kontrollera att hörapparaten är inställd på rätt program
- Kontrollera att mikrofonen inte är dämpad
- Klicka på **Anslut** på Roger inspiro

Ring din Roger-kontakt (se tfn nr ovan) om problemet inte avhjälps av ovanstående steg.