

Phonak Fast Facts



耳鳴りバランス・ノイズ・ジェネレーター

耳鳴りは、成人人口のおおよそ10-15%が悩む症状です(Seidman et al.)。耳鳴りと難聴との関連も強く、耳鳴りで悩む5人中4人は難聴と言われています(Axelsson A、Ringdahl A.)。耳鳴りの調整方法の目標は、音を遮ることと苦痛を減らすことです。増幅またはさらなる音響効果だけではなく、指導とカウンセリングも含めた治療を行うこともあります。広帯域の音の使用は、マスキングの前後関係またはTRT療法 (Tinnitus Retraining Therapy; 耳鳴り順応療法) のような堅実な治療は耳鳴り管理において一般的に行われています(Jastreboff et al.)。

耳鳴りバランス・ノイズ・ジェネレーターとは？

耳鳴りバランス・ノイズ・ジェネレーターとは、Phonak Audeo Q の全器種に搭載された機能です。耳鳴りの不快感を和らげるための広帯域のノイズを生成し、それをサウンドフローだけでなく独立した追加プログラムでも使用することができます。あらかじめ3種類のノイズがプリセットされています。適合する耳鳴り治療法、例えばマスカー療法 (Tinnitus Masking) や TRT 療法に合わせて、自由にカスタマイズすることも可能です。

メリット

Phonak Audeo Q は、耳鳴り治療法に限らず、装用者は補聴器の機能である Binaural VoiceStream Technology™ (両耳間音声通信技術) の恩恵を受けることができます。

設定・使用方法

Phonak Target 3.1 を起動し、【基本調整】→【耳鳴りノイズ・バランス】を選択し【耳鳴りノイズ・ジェネレーターを有効にする】を有効にします。【耳鳴りバランス・バランスの形状】を装用者の必要に応じて調整してください。

For more detailed information visit:
www.phonakpro.com/evidence

