

Phonak Fast Fact



フォナック チャージャーケースRICとパワーパック

What is it?

チャージャーケースRICは、ピロングシリーズのオーディオ Bに使用できる充電器です。チャージャーケースRICの蓋にドライカプセルを入れておくことで、充電しながら乾燥させることができる仕様になっています。

パワーパックは、電源を確保することができない外出時でも、オーディオ B-Rを充電することができるようチャージャーケースRICに取り付けて使用することができる充電パックです。



フォナック
チャージャーケースRIC

Why use it?

チャージャーケースRICは、一度に補聴器の充電と乾燥と保管を行うことができる理想的なケースです。さらにパワーパックもお使いいただければ、充電する場所さえも気にする心配はありません。パワーパックは、1回のフル充電で両方の補聴器を7回フル充電にすることができます。



パワーパックを取り付けた
フォナック
チャージャーケースRIC

How to use it?

補聴器の充電は、補聴器本体をチャージャーケースRICの補聴器差し込み口に入れるだけです。補聴器は自動的に電源がオフになり充電が開始されます。充電中は、LEDがゆっくり点滅しています。LEDの点滅が終わり点灯に変われば、フル充電が完了し補聴器を使用する準備が整ったことを示しています。電池を使い果たした状態からでも3時間で、フル充電が完了します。

もし電源を確保できない場合でも、パワーパックをチャージャーケースRICの底部に取り付けることで、いつでもどこでも充電ができます。パワーパックのフル充電で、両耳のオーディオ B-Rを7回フル充電させることができます。

チャージャーケースRICに取り付けられた状態でもパワーパックを充電することはできます。パワーパックを充電するためには、充電ケーブル差し込みソケットにACアダプターのケーブルを差し込むだけです。パワーパックを充電させながら、補聴器も充電することも可能です。