

マイフォナック アプリ Bluetoothの接続と 削除作業方法

Android編

こちらで紹介するのは一例です。Androidの場合、機種ごとに表示方法や表現が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。またスマートフォン本体の取扱説明書も併せてご参照ください。

必要条件

- マイフォナック アプリ : バージョン4.0.1以上
- 機器 : Bluetooth® 4.2および Android OS 7.0以降をサポートする Google Mobile Services (GMS) 認証の Android™ 端末 (4月28日現在)

今回使用したスマートフォン


- メーカー : SONY
- 機種名 : XPERIA xz3
- OS : Android 10
- Bluetooth : 5.0

Bluetoothの接続方法

スマートフォンでのBluetooth接続～
マイフォナック アプリでの接続までの流れについて


Bluetoothの接続方法

①

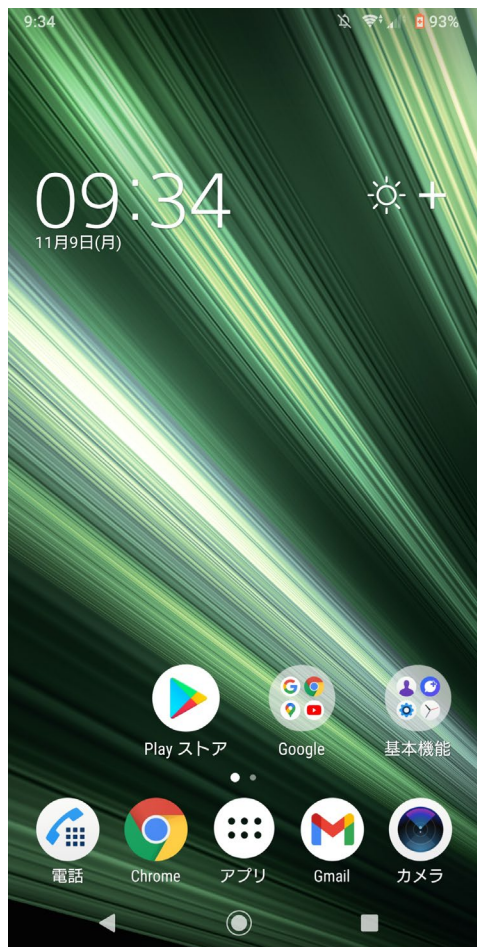

まずはスマートフォンのホーム画面を開きます。


②

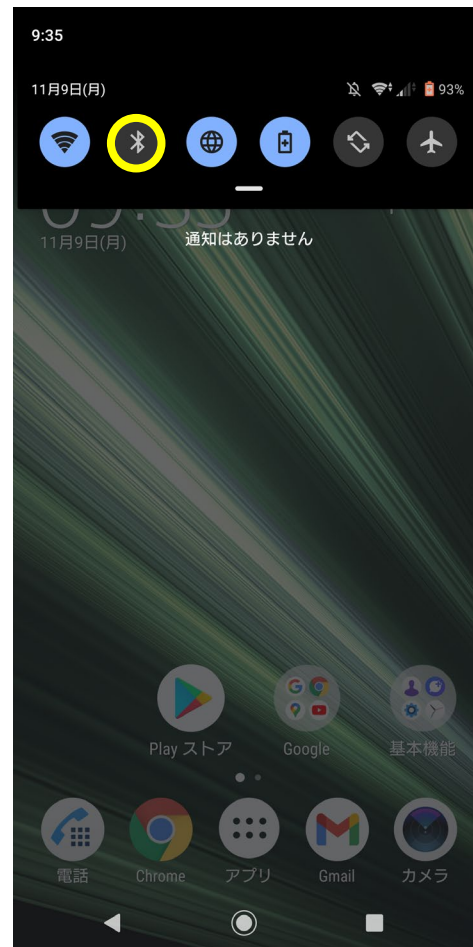

上部画面外から画面中央に向かってスワイプし、メニューバーを表示させます。黄色で囲ったBluetoothのアイコンを長押しします。



③

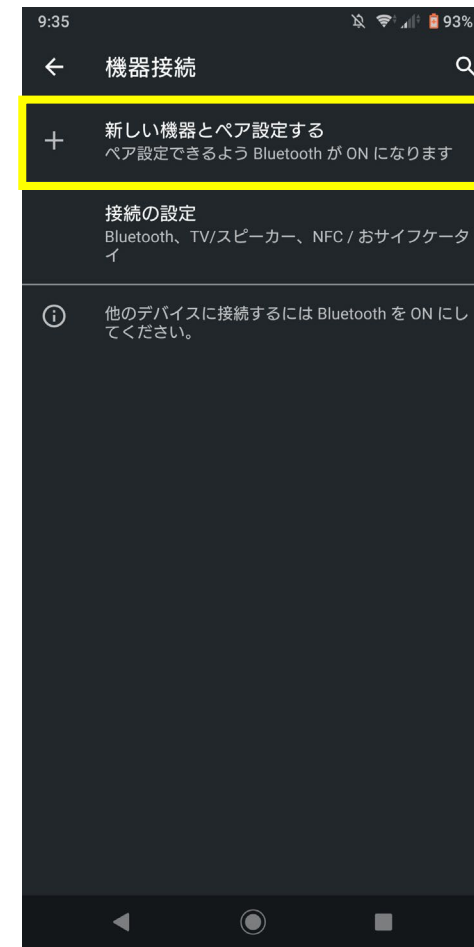

Bluetoothの設定画面が表示されるので、黄色で囲った箇所をタップします。また、Bluetoothがオフになっていた場合、タップした時点でBluetoothがオンになります。


Bluetoothの接続方法

④



補聴器の電源を入れなおし、『使用可能なデバイス』の一覧に、ヘッドセットのアイコンで『右-Phonak 補聴器』が表示されたらタップします。

⑤

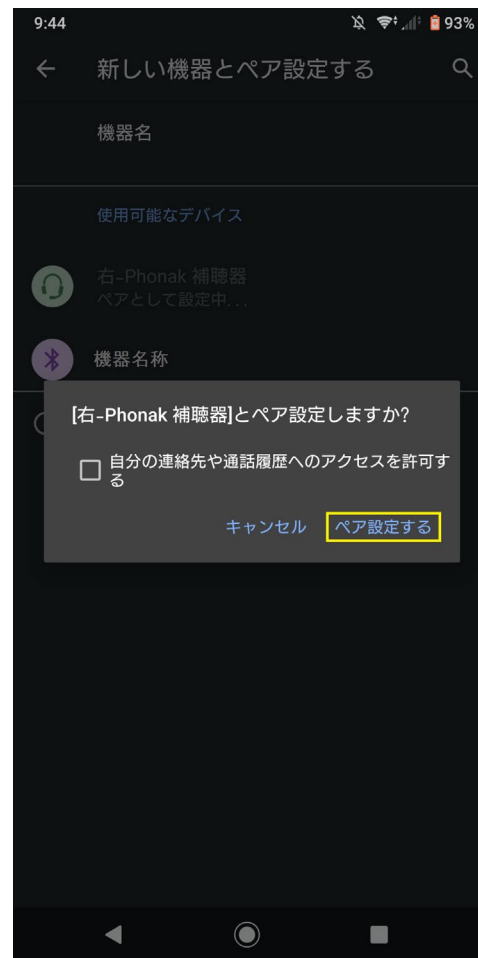

『ペア設定する』をタップします。『自分の連絡先や通話履歴へのアクセスを許可する』に☐を入れなくても先に進めます。


⑥



『右-Phonak 補聴器』が有効になったため、接続作業完了です。両耳装用の場合、左が表示されていませんが、両耳で通話や音楽を聴くことが可能になっています。音楽はステレオ再生されます。


Bluetoothの接続方法

⑦

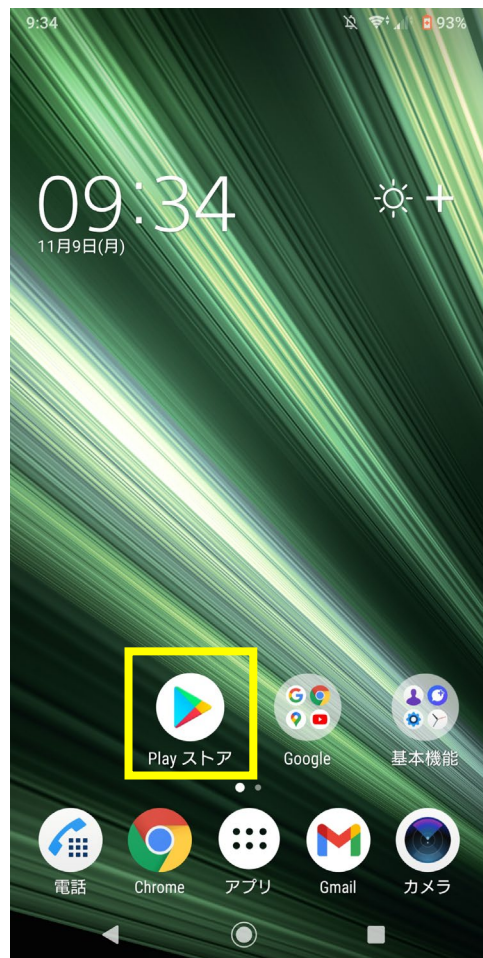


『Playストア』のアプリをタップし、マイフォナックアプリを入手します。

⑧

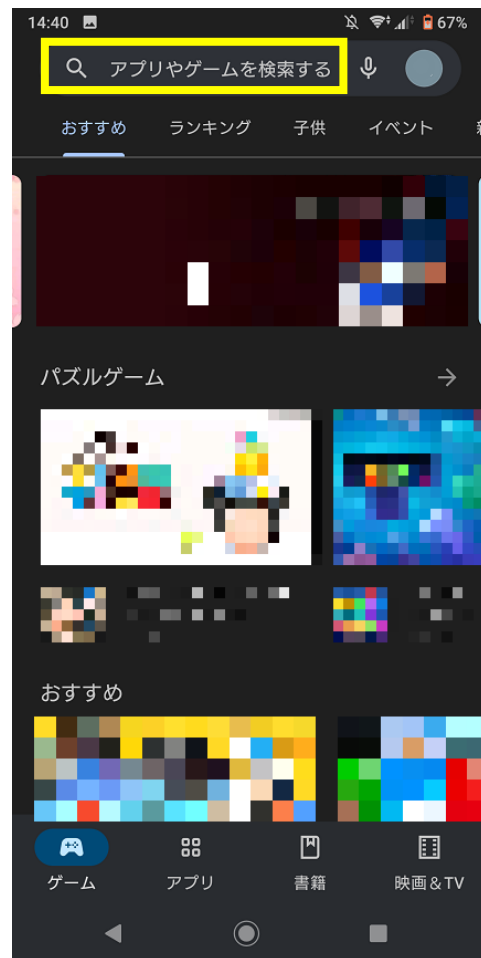

黄枠の検索バーにカタカナで『フォナック』と入力します。


⑨

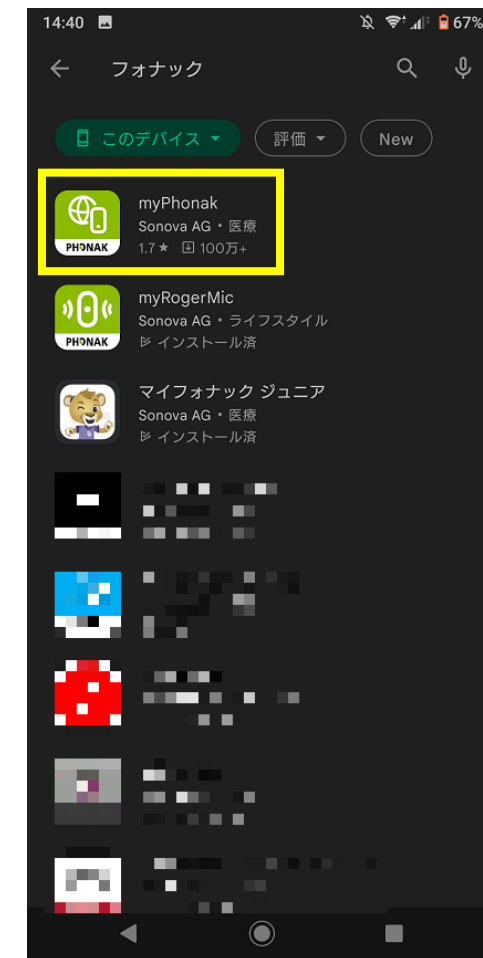

黄枠の『myPhonak』のアイコンをタップします。

Bluetoothの接続方法

⑩

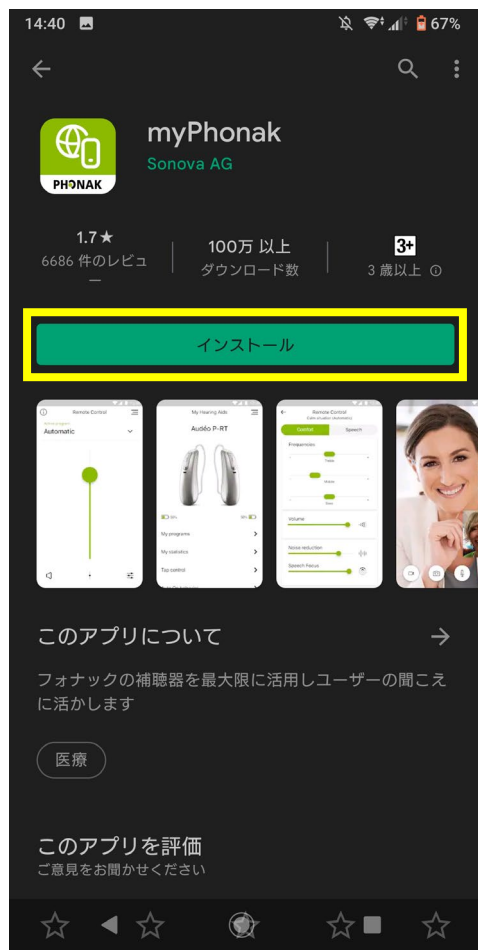


『インストール』をタップしてアプリをインストールします。

⑪



アプリを立ち上げ、画面の提示に従って『補聴器を探す』の画面まで進めます。
補聴器を探し始めたら補聴器の電源を入れ直します。



⑫

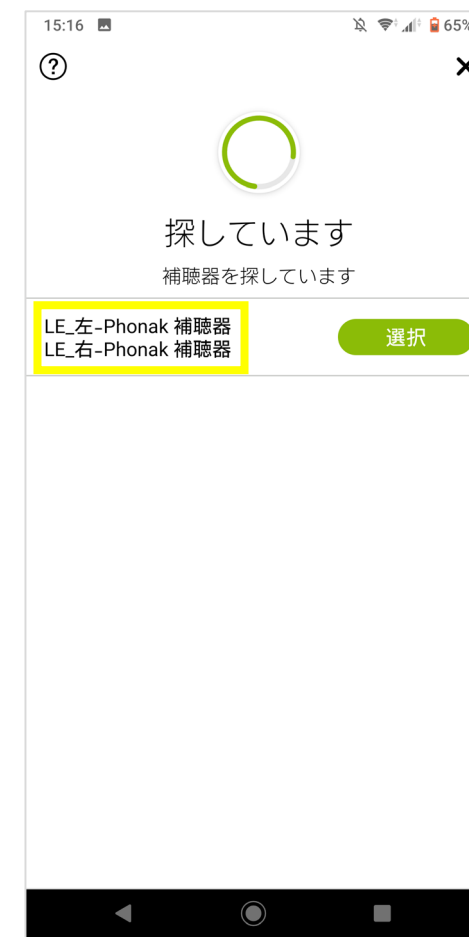

アプリとのペアリングは、左右両方表示されてから『選択』を選びます。


Bluetoothの接続方法

⑬

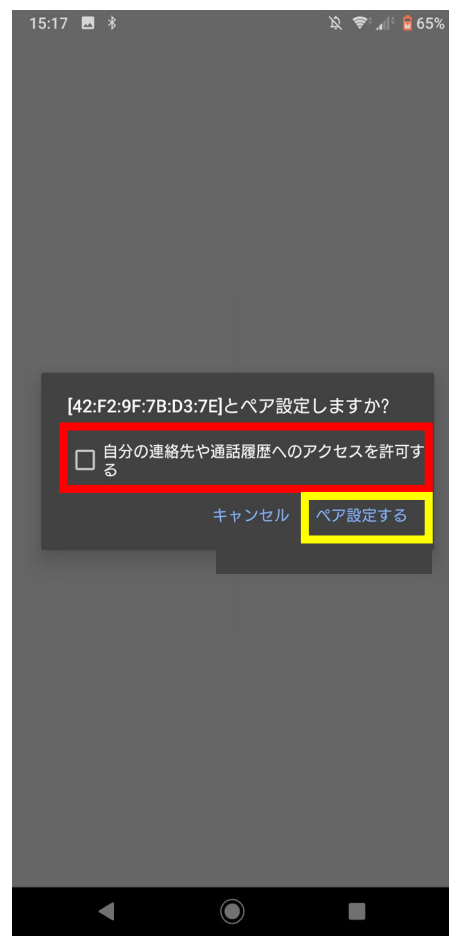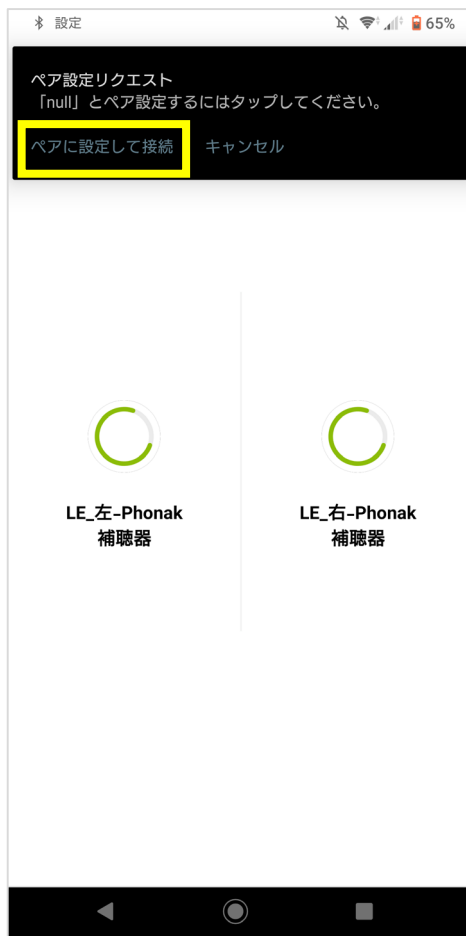

黄枠のようにペア設定を求められた場合はペア設定します。赤枠のようにメッセージが表示されても、を入れる必要ありません。

⑭

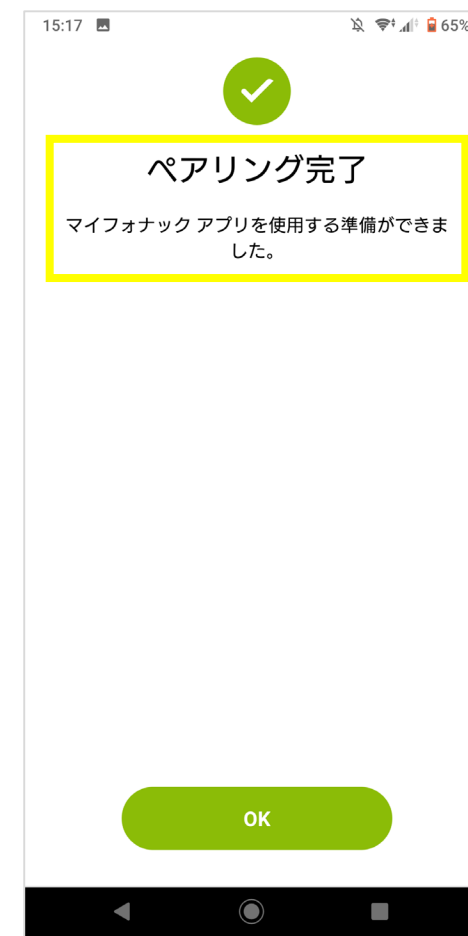

アプリとBluetoothペアリング完了です。

ペアリングデータの削除方法

スマートフォン内の操作～
マイフォナック アプリ内の操作～
Phonak Targetでの操作について

削除が必要な理由

Bluetoothが不安定な場合、または接続しにくくなったり、試聴器や他の補聴器のペアリングデータが残っている場合、一度Bluetoothデータを削除し、新たにペアリングしなおす必要があります。

スマートフォン内のペアリングの削除方法

①




『利用可能なメディアデバイス』や『以前接続されていた機器』がスマートフォン内に保存されているBluetoothデータです。Bluetooth名称の右側にある3つの歯車のアイコンをタップします。

②




『削除』をタップするとペアリングが削除されます。また、ペアリングを削除せず、一時的に無効にしたい場合は白枠の『電話』や『メディアの音声』のスイッチを切り替えることで、ハンズフリー通話やストリーミング再生をオフにすることが可能です。

③

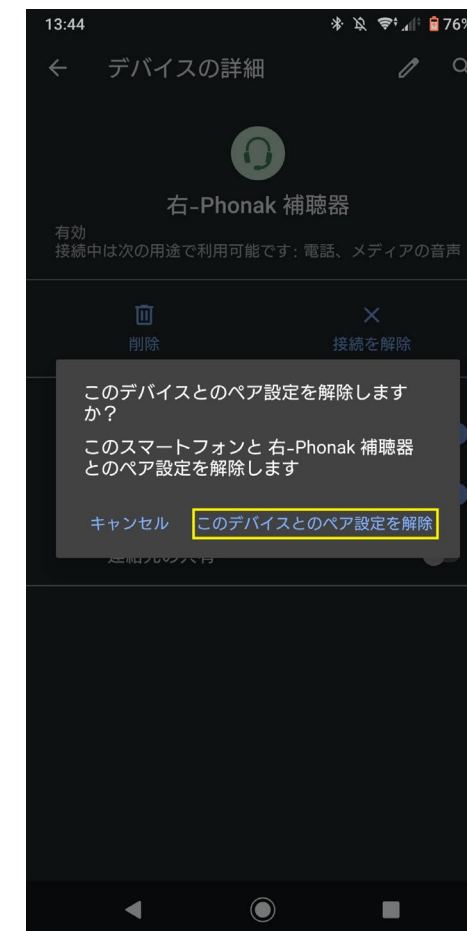


『このデバイスとのペア設定を解除』をタップすることで、スマートフォン内から補聴器のデータが削除されます。

マイフォナック アプリ内のデータの削除方法

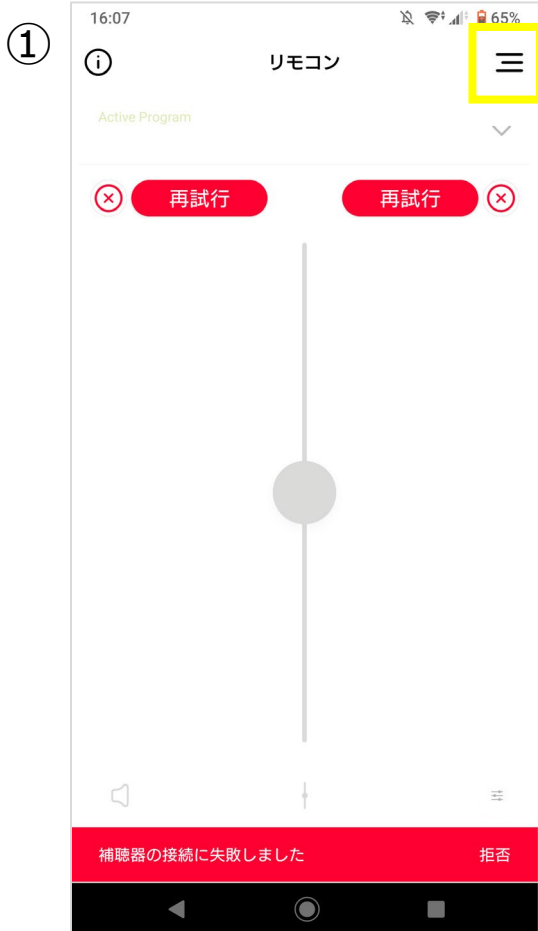

リモコン画面を開き、右上黄枠で囲ったナビゲーションアイコンをタップします。このとき、補聴器を接続する必要はありません。

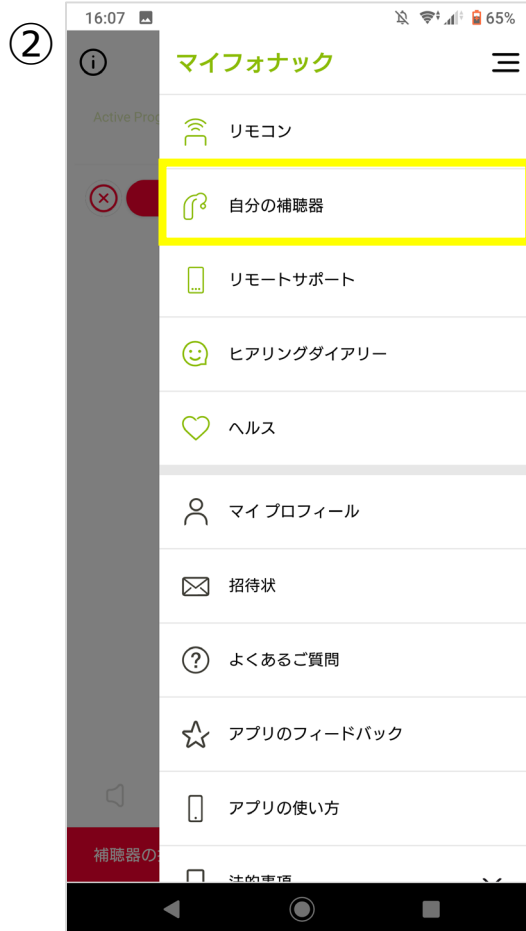

『自分の補聴器』をタップします。



『機器を削除する』をタップします。



『はい、削除します』をタップすると、アプリ内の補聴器のデータが削除されます。

