

# ノアリンク ワイヤレス

## ～設定方法～

Vol. 3

ノアリンク ワイヤレスは、マーベルシリーズ以降の無線通信可能な補聴器を調整するために必要なインターフェース(中継器)です。フィッティングを行う前にお使いのパソコンにノアリンク ワイヤレスを設定しておく必要があります。

この紙面では、ノアリンク ワイヤレスの設定方法およびアップデート方法について述べています。

※ AirLink 2 のアップグレード方法は掲載しておりません

### ❖ ノアリンク ワイヤレス 同梱物

表



裏



ノアリンクワイヤレス本体



接続ケーブルと固定ホルダー




ノアリンク ワイヤレス 全体梱包図

### ❖ ノアリンク ワイヤレス ドライバーを設定する方法

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

ノアリンク ワイヤレスのドライバーをインストールする方法は以下のとおりです。  
 ドライバーをインストールする前に、最新版の Phonak Target を予めインストールしておいてください。

インターネットを利用している場合		
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>ノアリンク ワイヤレス付属の接続ケーブルを本体裏側のソケットに差します。</li> <li>逆側を PC の USB ポートに差します。</li> </ul> <p>PC の USB ポートに差すと、ノアリンク ワイヤレスのインジケータランプが瞬間的に緑に点滅します</p>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>ドライバーが自動的に PC にインストールされます。(インストールが完了してもメッセージは表示されません)</li> </ul>

インターネットを利用していない場合		
1	 <p>左側 : Disc 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>過去出荷していた Phonak Target の DVD(左図)に格納されている NoahlinkWirelessドライバーをインストールします。</li> </ul> <p>【保存場所】        Phonak Target &gt; Support &gt; HIMSA &gt; NoahlinkWireless &gt;【Driver_NLW_V.1.1.0.0.exe】をクリック</p>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>インストール完了後、PC を再起動します。(インストールが完了してもメッセージは表示されません)</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>ノアリンク ワイヤレス付属の接続ケーブルを本体裏側のソケットに差します。</li> <li>逆側を PC の USB ポートに差します。</li> <li>PC の USB ポートに差すと、ノアリンク ワイヤレスのインジケータランプが瞬間的に緑に点滅します</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>PC がノアリンク ワイヤレスを認識し、ドライバーがインストールされます。(インストールが完了してもメッセージは表示されません)</li> </ul>

## ❖ ノアリンクワイヤレスの接続状態を確認する方法

ノアリンクワイヤレスのドライバーがインストールされた後、Phonak Target で正しくデバイスが認識されるか確認します。

ノアリンクワイヤレスの接続状況を確認する	
1	<div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ノアリンクワイヤレス付属の接続ケーブルを本体裏側のソケットに差します。</li> <li>■ 逆側を PC の USB ポートに差します。</li> <li>■ 予めインストールした Target を起動します。 (NOAH System を経由している場合は、Target のモジュールから開きます)。</li> </ul>
2	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● ① セットアップ &gt; ② フィッティング機器 &gt; ③ Noahlink Wireless 画面を開き、④ の <b>チェック</b> をクリックします。</li> </ul>
3	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 正しく認識されると、ノアリンクワイヤレスのシリアル番号とファームウェアバージョンが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 最新バージョンは 2.24 です(2023年2月現在)</li> </ul> </li> <li>※ <b>ファームウェアのバージョンが 2.17 以前である場合、ファームウェアのアップデートを行ってください。</b></li> <li>※ Target で正しく認識されていない場合、シリアル番号などの情報が表示されません。</li> </ul>
4	<p>※ 写真はマーベル補聴器です</p> <p><u>空気電池を使用するタイプ</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p><u>充電電池を使用するタイプ</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>上部ボタン</p> <p>下部ボタン</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>オン： 3 秒長押し</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>オフ： 3 秒長押し</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>【顧客とセッション】画面に戻り、実際にセッションを開いて補聴器を接続します。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>空気電池タイプをご使用の場合</b> 電池ホルダーを開閉し、ペアリングモードにしてからフィッティングソフトの <b>接続</b> をクリックしてください。</li> <li>➢ <b>充電電池タイプをご使用の場合</b> ※ <b>注意：補聴器を充電してから接続を行ってください。</b></li> </ul> </li> <li>多機能ボタンの下部を 3 秒長押しして、電源オンにします(オン: <b>緑色</b>に点滅/オフ: <b>赤色</b>に点灯)</li> <li>電源をオンにし、補聴器をペアリングモードにしてからセッション内の <b>接続</b> をクリックしてください。</li> <li>■ 2 回目以降、ペアリングモードにする作業は不要です。 (そのまま <b>接続</b> をクリックすれば接続されます)</li> </ul>

## ❖ ノアリンク ワイヤレス ファームウェアをアップデートする方法

お使いのノアリンク ワイヤレスのファームウェアが 2.17 以前である場合、次の方法でファームウェアをアップデートします。

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ノアリンク ワイヤレス付属の接続ケーブルを本体裏側のソケットに差しします。</li> <li>逆側を PC の USB ポートに差しします。</li> <li>予めインストールした Target を起動します。 (NOAH System を経由している場合は、Target のモジュールから開きます)。</li> </ul>
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Phonak Target &gt; トライアルとツール &gt; ファームウェアのアップデート画面にある Noahlink Wireless の【アップデート...】をクリックします。</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>アップデート専用のアプリケーションが表示されます。</li> <li>このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？と聞かれるので【はい】を選びます。</li> <li>PC の USB ポートに差したノアリンク ワイヤレスのファームウェアのバージョンが読み込まれます。 (読み込まれない場合、【Search】をクリックします)</li> <li>【Upgrade】を押してアップグレードを実行します。</li> <li>Status 部分が【Upgrading(アップグレード中)】と表示されます(黒いバーが左から右へゆっくり進みます)。</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>Status 部分が【Upgraded(アップグレード済)】という表示に変われば終了です。</li> <li>【Close】を押して画面を閉じます。</li> </ul>
4	<p>※ 写真はマーベル補聴器です</p> <p><u>空気電池を使用するタイプ</u></p>  <p><u>充電電池を使用するタイプ</u></p>  <p>オン： 3 秒長押し</p> <p>オフ： 3 秒長押し</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【顧客とセッション】画面に戻り、実際にセッションを開いて補聴器を接続します。             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>空気電池タイプをご使用の場合</u> 電池ホルダーを開閉し、ペアリングモードにしてからフィッティングソフトの <b>接続</b> をクリックしてください。</li> <li>➤ <u>充電電池タイプをご使用の場合</u> ※ 注意:補聴器を充電してから接続を行ってください。  多機能ボタンの下部を 3 秒長押しして、電源オンにします(オン:緑色に点滅/オフ:赤色に点灯)  電源をオンにし、補聴器をペアリングモードにしてからセッション内の <b>接続</b> をクリックしてください。</li> </ul> </li> <li>2 回目以降、ペアリングモードにする作業は不要です。 (そのまま <b>接続</b> をクリックすれば接続されます)</li> </ul>