



耳あな型 —お手入れ編—

お手入れ 1 お掃除の仕方


補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからのお手入れをおすすめします。

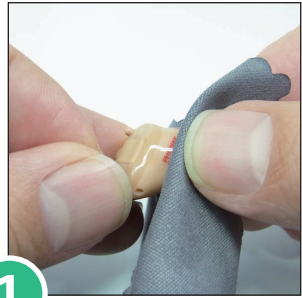

1 柔らかい素材の布で表面の汚れをふき取ります。

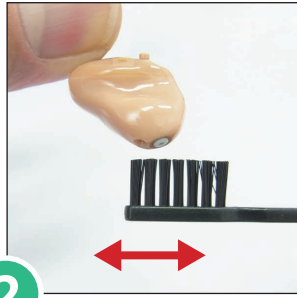


2 耳あなの奥に入る側(補聴器の先端)を下に向けてブラシがけをします。

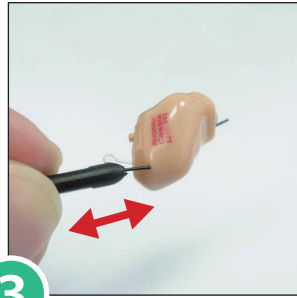


3 付属のベントクリーナーを使って、ベント(通気穴)の詰まりを取り除きます。

ブラシがけのポイント

ブラシがけの時はブラシを下にします。

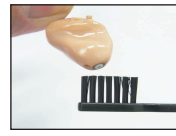

○

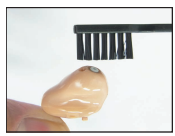

×


注意: ブラシを上にとすると、耳あかが補聴器内部に入り故障の原因になる場合があります。

お手入れ 2 耳垢浸入を防止する部品の交換


セルストップ編




1 ケースから交換用セルストップを1本取り出します。

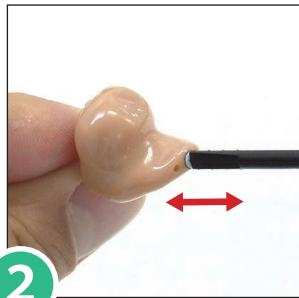

2 交換用セルストップを差し込んでから、手前に引いて古いセルストップを取り外します。

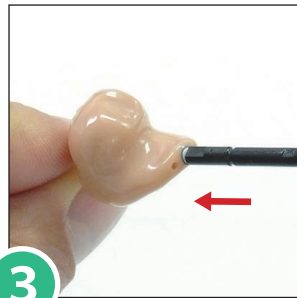

3 新しいセルストップをしっかり奥まで差し込みます。

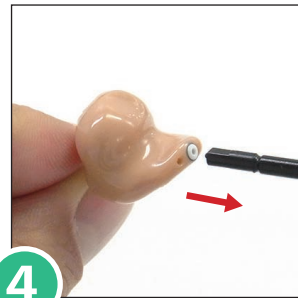


4 ゆっくりと手前に真っ直ぐ引き抜きます。


スマートガード編




1 ケースから交換用スマートガードを1本取り出します。

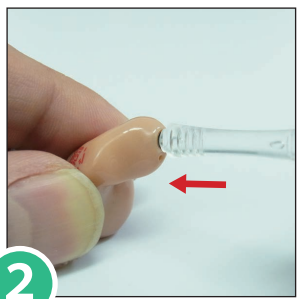

2 交換用スマートガード差し込んでから、手前に引いて古いスマートガードを取り外します。

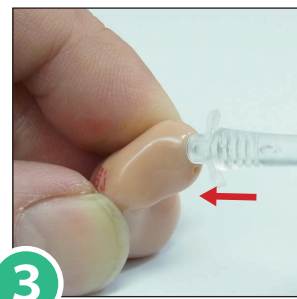

3 新しいスマートガードをしっかり奥まで差し込みます。

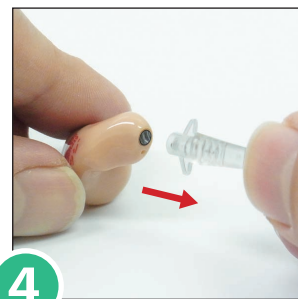

4 ゆっくりと手前に真っ直ぐ引き抜きます。

お手入れ 3 保管の仕方

補聴器にとって湿気は大敵です。特に夏場は外気の湿気から補聴器を保護するためにも乾燥ケースに入れて保管してください。




1 補聴器から電池を取り出し、電池ホルダーを開けた状態で乾燥ケースに入れます。




2 乾燥ケースのふたを閉めます。補聴器から取り外した電池は、ふたの上のマグネットに付けておきます。

シリカゲル(乾燥剤)の交換時期

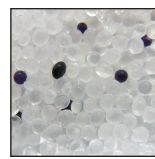

○

シリカゲルが新しいときは青い粒が混じっています。

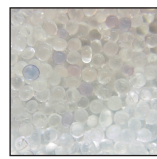

×

青い粒が、薄い紫色もしくは半透明に変わったら、シリカゲルの交換時期です。

フォナック製品のご相談・ご用命は・・・

フォナック

www.phonak.jp

ソノヴァ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル

TEL: 0120-06-4079

(お客様相談窓口 受付時間: 月～金 9:00～17:30 土日祝休み)

FAX: 0120-23-4080

PHONAK
life is on