

はじめに お読みください

フォナック クイックガイド

耳かけ型 — 入門編 —
RICタイプ



はじめに・・・準備をするもの

1. 補聴器



マイクロホン音口
音の入力口です。

プログラムスイッチ/
多機能ボタン
音量の調節やプログラムを
切り替えます。

レシーバ
音の出口です。

電池ホルダー
電池を挿入します(電源の入/切)。

2. 補聴器用電池



お客様の電池は

- PR48 (13)
- PR41 (312)

ステップ1 電池を入れて、スイッチを入れてみましょう！



1

電池パックの後ろを開け、
1粒電池を取り出します。



2

電池ホルダーのでっぱり
爪をかけ、手前に引きます。



3


電池のプラス(+)、マイナス(-)
を間違わずに電池ホルダー
に入れます。



ココを見てね

電池の向きは間違っていないか？

電池は平らで + と彫ってある面が上です。

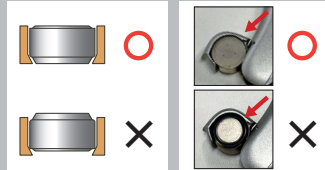

注意：電池を逆向きに入ると破損の原因になります。

電池が外れない時




電池ホルダーを開けて、
先端が細くなったもの
(つまようじなど)を使い
押し出してください。

● <電源の入/切> 電池ホルダーの開閉にておこなってください。

ステップ2 補聴器を耳につけてみましょう！

ドーム耳せん編

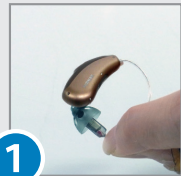

1

レシーバの付け根
(ジョイント)部分を
摘まみます。



2

補聴器本体を耳に
かけます。



3

レシーバを耳の中に入れ、
ストッパーを耳のくぼみ
(耳甲介)へ押し入れます。



4

補聴器本体およびストッ
パーが正しい位置にな
るようにしてください。

オーダーシェル編



1

オーダーシェルの取り
出し用テグスを指で
摘まみます。



2

オーダーシェルを耳
の中に入れます。



3

補聴器本体を耳にかけ
ます。

取り出す時

ドーム耳せんの場合



レシーバの付け根(ジョイ
ント)部分を摘まんで取り
外します。



補聴器本体を持って
外さないでください。

オーダーシェルの場合



オーダーシェルの取り出
し用テグスを摘まんで取り
外します。



補聴器本体を持って
外さないでください。

ステップ3 使用(練習)してみましょう！



練習1 ひとりで
～3日間

家の静かな場所で
練習してみましょう。



練習2 ふたりで
～1週間

1対1での会話で楽しんで
みましょう。



練習3 お部屋で
～2週間

テレビやラジオを
聴いてみましょう。



練習4 外出先で
～1ヶ月間

色々な音がする外で会話を
楽しんでみましょう。

ご不明な点はお購入販売店にお問い合わせください。点検、クリーニングは定期的に販売店でおこなってもらう事をおすすめします。

耳かけ型 RICタイプ – お手入れ編 –

お手入れ1


お掃除の仕方

補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからのお手入れをおすすめします。



1

補聴器クリーナー又は柔らかい素材の布で表面の汚れをふき取ります。

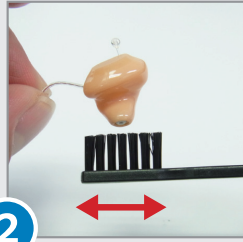

2

耳あなの奥に入る側(補聴器の先端)を下に向けてブラシをかけをします。

防水防塵IP68補聴器 ご使用の注意点

IP68を取得した補聴器は、防水・防塵性能を持ちます。防水・防塵性能を維持するために、補聴器の動作の異常の有無に関わらず1年に1度のメーカーによるメンテナンスをおすすめします。


【こんな時には使わないでください】

- × 強い水流や強い水圧がかかるような場合
(サーフィン、ジェットスキー等の海のアクティビティ、洗濯機、超音波洗浄機など)
- × 高温もしくは低温の環境条件の場合
(サウナでの使用、車のダッシュボードに置く、冷蔵庫の中での保管、ドライヤーの温風)
- × 整髪や散髪の時
(整髪料、ヘアスプレーの付着など)

お手入れ2

耳垢侵入を防止する部品の交換

セルストップを使用する場合

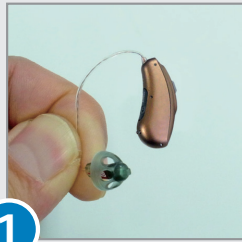

1


はじめに、耳せんをレシーバから取り外します。

※オーダーシールドをお使いの場合はこの作業は不要です。




2

ケースから交換用セルストップを1本取り出します。

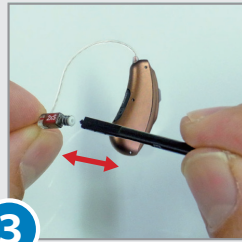


3

交換用セルストップを差し込んでから、手前に引いて古いセルストップを取り外します。

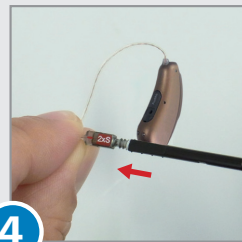

4


新しいセルストップをしっかりと奥まで差し込みます。

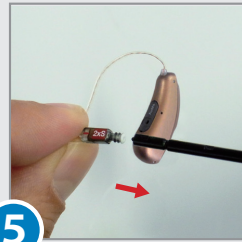

5

ゆっくりと手前に真っ直ぐ引き抜きます。

セルシールドを使用する場合

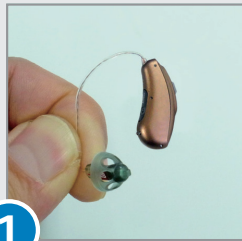

1

はじめに、耳せんをレシーバから取り外します。

※オーダーシールドをお使いの場合はこの作業は不要です。




2

ケースを右に回し"2"の穴に新しいセルシールドが見えるようにします。



3

ケースの"1"の穴にレシーバをしっかりと差し込み、古いセルシールドを取り外します。

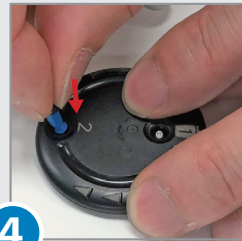

4

ケースの"2"の穴にレシーバをしっかりと差し込みます。



5

ゆっくりと手前に真っ直ぐ引き抜きます。

お手入れ3

保管の仕方

補聴器にとって湿気は大敵です。特に夏場は外気の湿気から補聴器を保護するためにも乾燥ケースに入れて保管してください。



1


補聴器から電池を取り出し、電池ホルダーを開けた状態で乾燥ケースに入れます。




2

乾燥ケースのふたを閉めます。補聴器から取り外した電池は、ふたの上のマグネットに付けておきます。

シリカゲル(乾燥剤)の交換時期

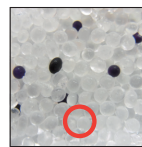

シリカゲルが新しいときは青い粒が混じっています。

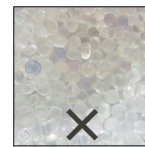

青い粒が、薄い紫色もしくは半透明に変わったら、シリカゲルの交換時期です。