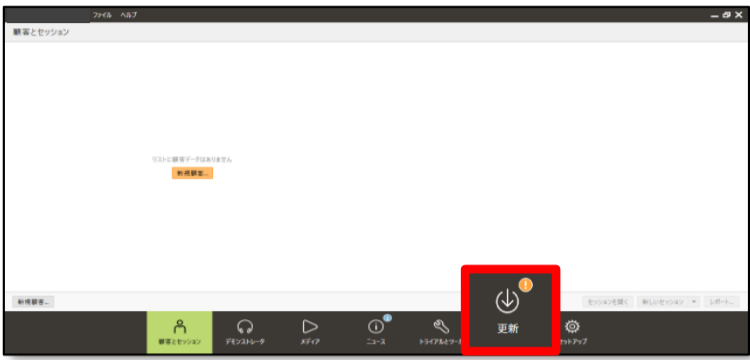
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

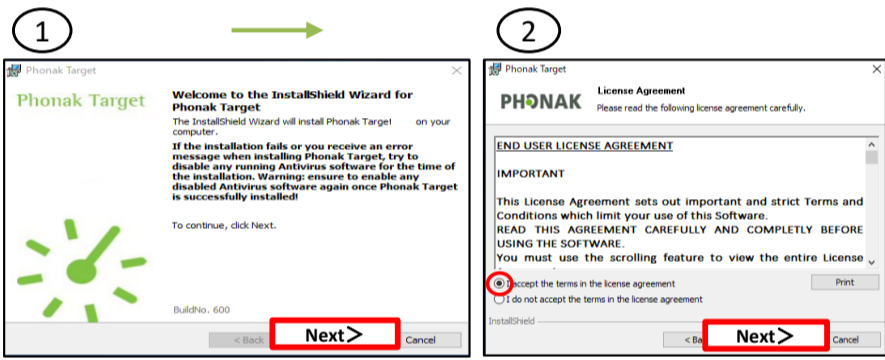
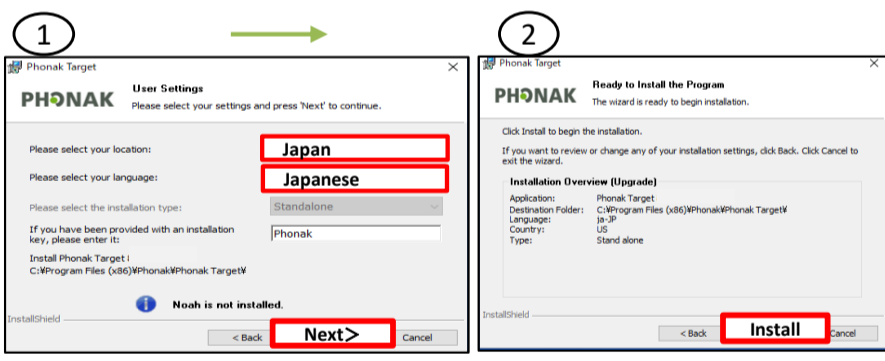
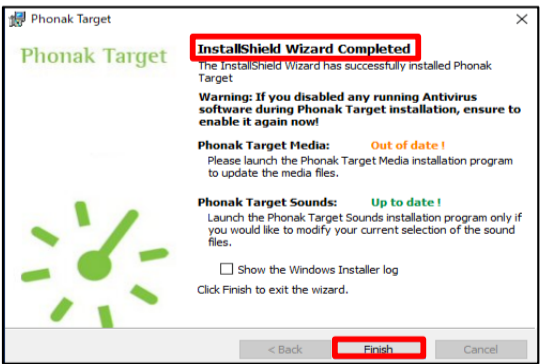



# Phonak Target オンラインアップデート ガイド

※インストールに必要なシステム要件は、Targetインストールガイドをご覧ください。 (Windows XP/Vista/7/8/8.1はインストール不可)

1		<p>ダウンロードするソフトがある場合  <b>【更新】</b>の右上に  マークが表示されます。          Phonak Targetが初期設定の状態であればダウンロードは自動で行われます。</p> <p>[セットアップ] &gt; [インターネット] &gt; [バックグラウンドでダウンロード]の<input type="checkbox"/>を外すことで、ダウンロードをマニュアル操作に変更できます。</p>
2		<p>ダウンロードが終了すると、表示が[キャンセル]から[インストール]に変わるのでクリックします。</p> <p>インストーラーが起動するので、アナウンスに従いPhonak Targetを閉じて進めていきます。</p>
3		<p>左図の事項が順に表示されますので、こちらもアナウンスに従い進めていきます。</p> <p>②は[<input type="radio"/> I accept the terms in the license agreement]を選択します。</p>
4		<p>左図の事項が順に表示されますので、こちらもアナウンスに従い進めていきます。</p> <p>①はソフトを使用する国および言語となります。          [Japan]、[Japanese]に変更しクリックします。</p> <p>インストール完了まで少し時間がかかります。</p>
5		<p>インストールが終了すると、「InstallShield Wizard Completed」と完了画面が表示されます。  <input type="button" value="Finish"/> をクリックすると終了します。</p>
6		<p>インストール終了後、Phonak Targetを立ち上げます。  <b>【更新】</b>ページには「ソフトウェアは最新版です」と表示されず。</p>