

Phonak Target

バックアップツールの使用方法

Vol.2

Phonak Target スタンドアロン版では、簡単な作業で顧客データを複製・復元ができる「Target Backup Tool」というバックアップ専用アプリが付属しています。このアプリは、スタートボタンから「すべてのプログラム」>「Phonak」>「Tools」>「Target Backup Tool」の順で基本的にはアクセスできます¹（詳細は2枚目以降）。

¹ OSによって操作方法は異なります

注意：

- ✓ 別のパソコンにバックアップのデータを移行させる場合、予め Phonak Target をインストールしておいてください。
- ✓ バックアップを取る Phonak Target のバージョンと、データベースを復元する Phonak Target のバージョンが同じである必要があります。
- ✓ Phonak Target を起動していると、Phonak Backup Tool を開くことはできません。


1. バックアップ (① or ②のいずれかの方法でバックアップを取ります)

※ Target 5.3 で作成

① 顧客データの手動バックアップ

「手動でバックアップ」をクリックします。


直ぐにバックアップ をクリックすると、バックアップデータが保存されます。必要に応じて、予め **閲覧...** をクリックして保存先フォルダを指定してください。

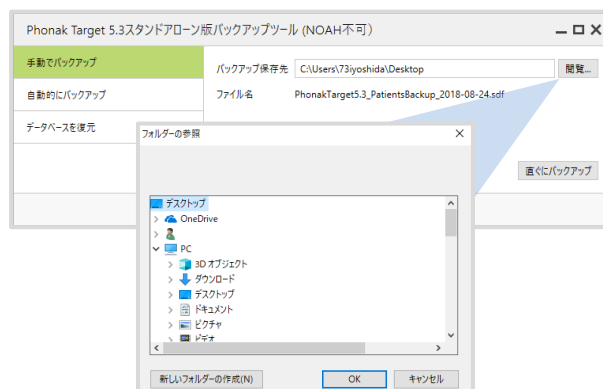

② 顧客データの自動バックアップ

「自動的にバックアップ」をクリックします。

自動的にバックアップを設定 にチェックを入れると、スケジュールに従って自動的にバックアップが行われます。必要に応じて、予め **閲覧...** をクリックして保存先フォルダを指定してください。

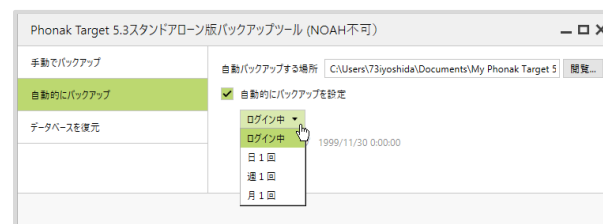


2. データベースの復元

「データベースを復元」をクリックします。

閲覧... をクリックして、バックアップで取ったデータが保存されたフォルダを指定してください。フォルダ内に複数のバックアップデータが保存されている場合、▼をクリックして、読み込むファイル名も指定してください。

直ぐに復元 をクリックするとバックアップデータが読み込まれます。

※ データベースの復元を行うと、これまでのデータは全て削除されますのでご注意ください。

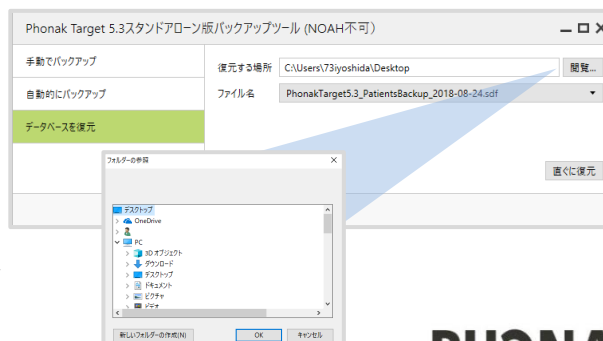


【バックアップツールへのアクセス】

上記のバックアップ作業を行うにあたり、バックアップツールへは次のようにアクセスします。

Windows 7 の場合

「Target Backup Tool」はスタートメニューのプログラム>Phonak>Toolsの順に開き、「Target Backup Tool」をクリックすると起動します。

- ※ アプリが存在しない場合、ショートカットの作成をお勧めします。
(下記参照、もしくは別途資料参照)

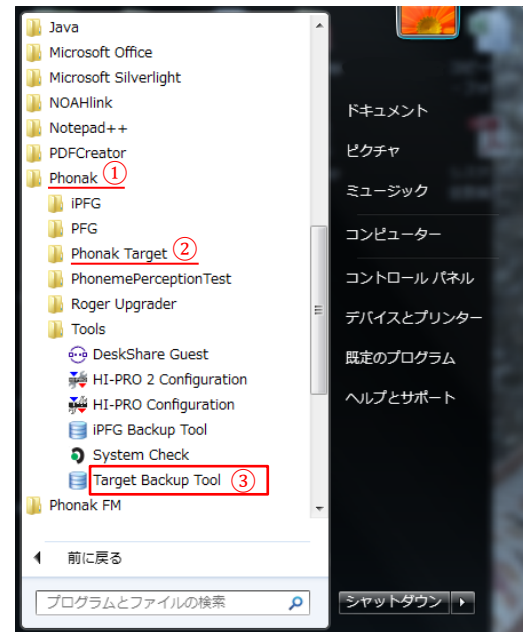


Windows 8 の場合

バックアップツールへのアクセスは、① or ② or ③のいずれかの操作で行うと簡単です。


① すべてのプログラムから選択する

スタートボタンをクリックして、パネルが表示される画面に移動します。下矢印(↓)をクリックすると、全てのアプリケーションが表示されます。

- ※ Windows 10 の場合、スタートボタンをクリックすると、「すべてのアプリ」が表示されます。

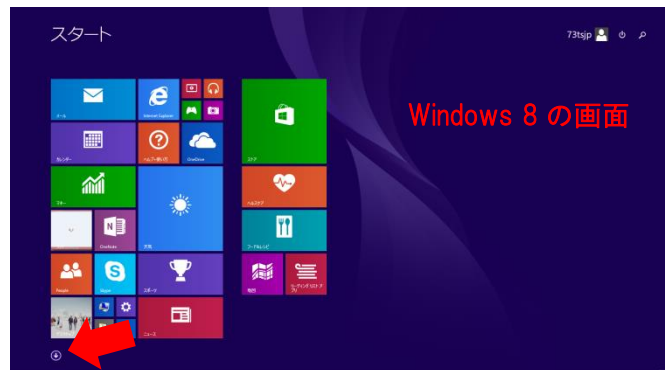


全てのアプリケーションから「Target Backup Tool」を選択します。

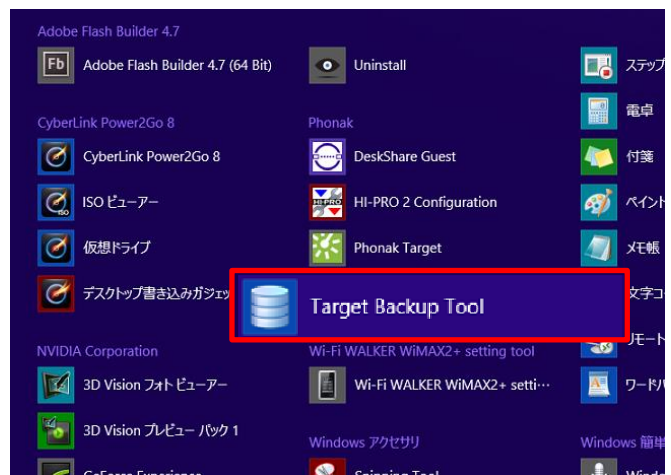

② 検索ツールを利用する

カーソルを画面右上（緑色矢印位置）に合わせると右端にメニューが表示されます。

- ※ Windows 10 の場合、スタートボタンを右クリックし、検索を選択すると利用することが可能です。

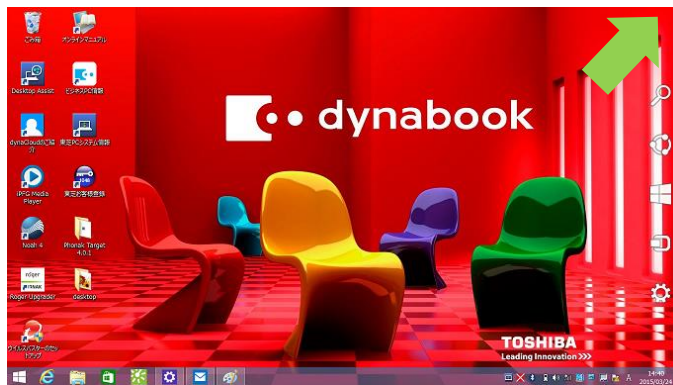


検索アイコンをクリックし、キーボードを使って検索欄に Backup…と打ち込みます。
検索結果に出てきた「Phonak Backup Tool」を選択します。



③ ショートカットを作成する


デスクトップ上で右クリックします。

「新規作成(X)」 > 「ショートカット(S)」の順に開きます。

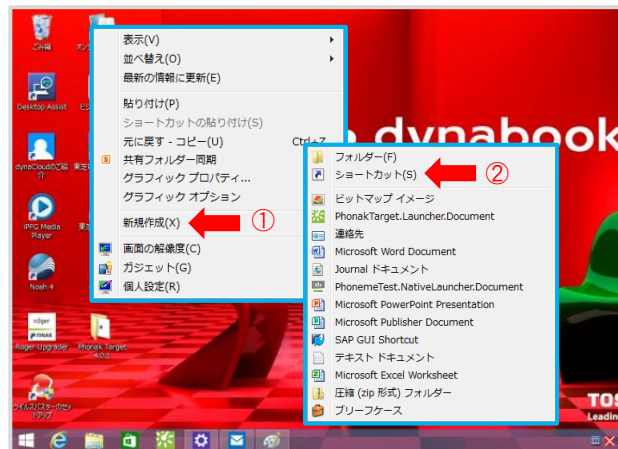


ショートカットの作成ウィンドウが開きます。


「参照(R)...」を押します。

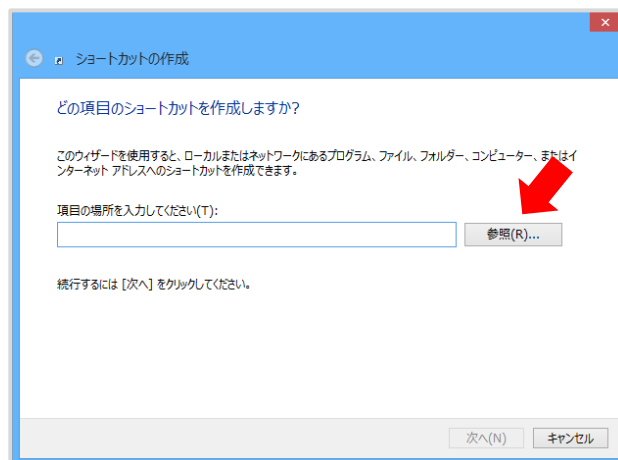


PC(C:)>Program Files (x86)>Phonak>Phonak Target の順にフォルダを開きます。
そのフォルダ内の「Target Backup Tool」ファイルを選択し、「OK」をクリックします。

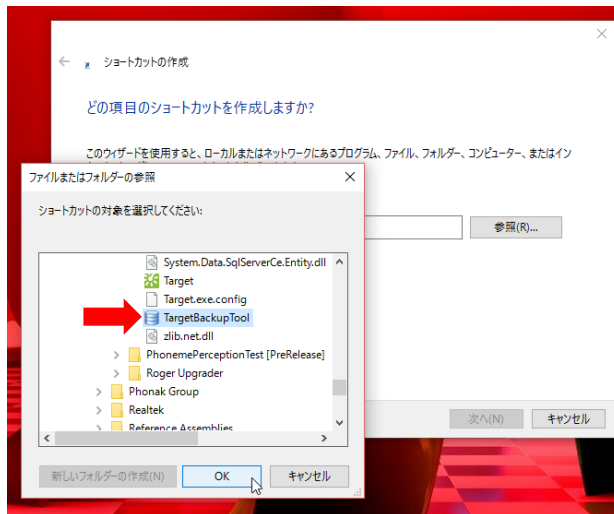

参照欄にファイル場所が表示されます。「次へ(N)」を押します。

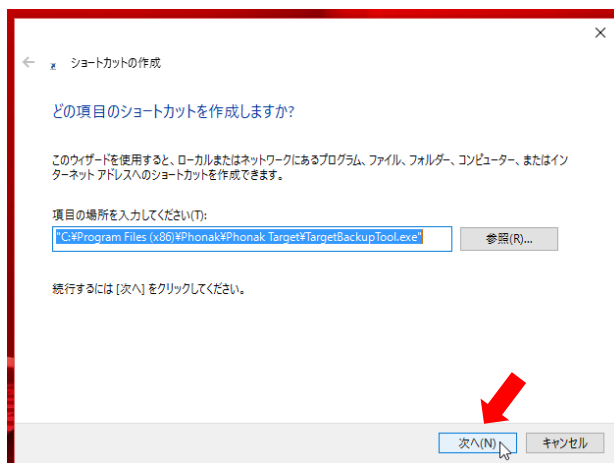

「完了(F)」をクリックします。

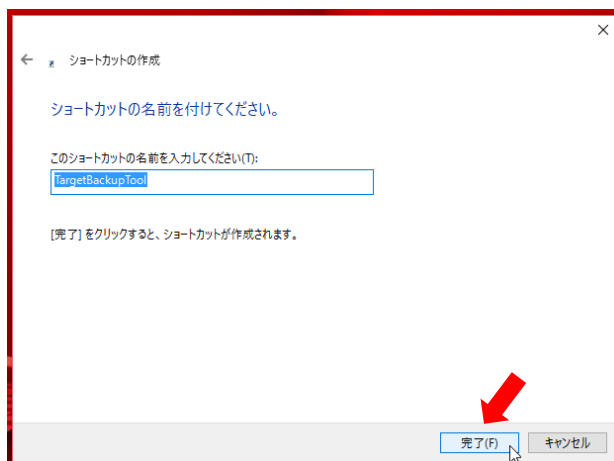

ショートカットを作成すると「Target Backup Tool」のアイコンがデスクトップに表示されるので、これをクリックします（右図）。




Windows 10 の場合

バックアップツールへのアクセスは、① or ② or ③のいずれかの操作で行うと簡単です。




① すべてのプログラムから選択する

スタートボタン  をクリックし、全てのアプリケーションにある [P] から [Target Backup Tool] を選択します。


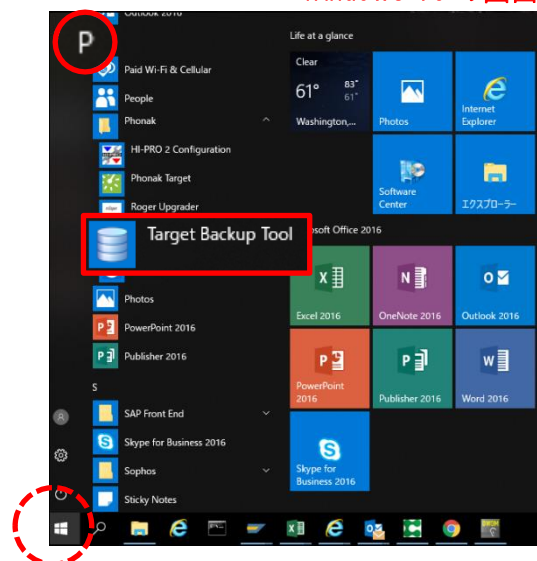
Windows 10 の画面



② 検索ツールを利用する

1) スタートボタン  を右クリックして「検索」か、
2) スタートボタン  横にある検索アイコン  を開き
検索欄に Backup... と打ち込みます。


検索結果に出てきた「Phonak Backup Tool」を選択します。

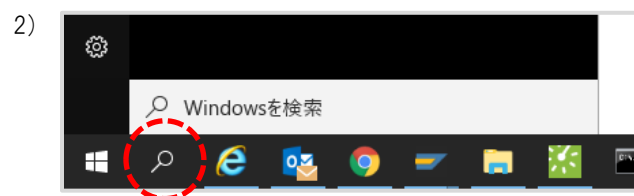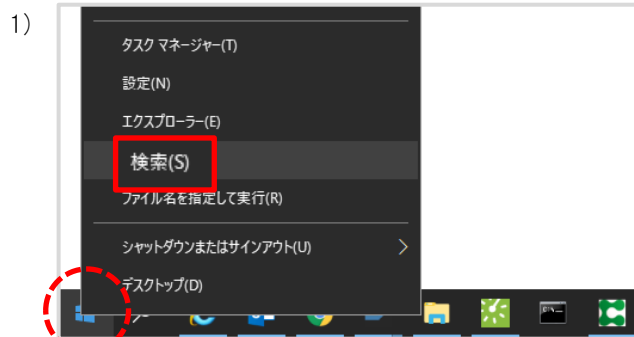

③ ショートカットを作成する


デスクトップ上で右クリックします。

①「新規作成(X)」 > ②「ショートカット(S)」の順に開きます。

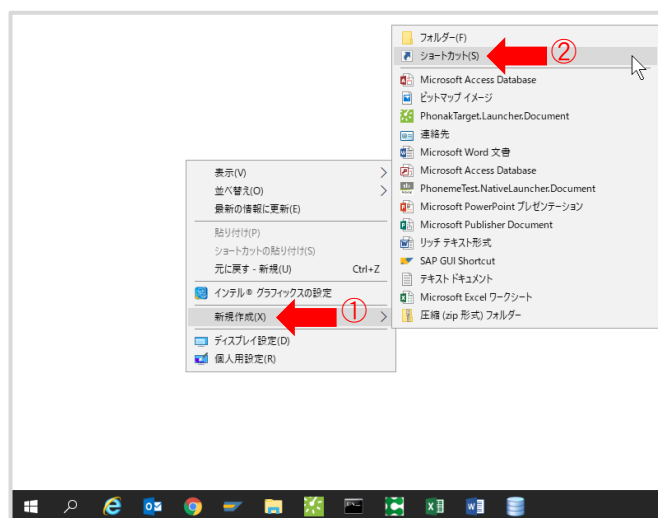


ショートカットの作成ウィンドウが開きます。
「参照(R)...」を押します。


PC(C:)>Program Files (x86)>Phonak>Phonak Target
の順にフォルダを開きます。
そのフォルダ内の「Target Backup Tool」ファイルを選
択し、「OK」をクリックします。

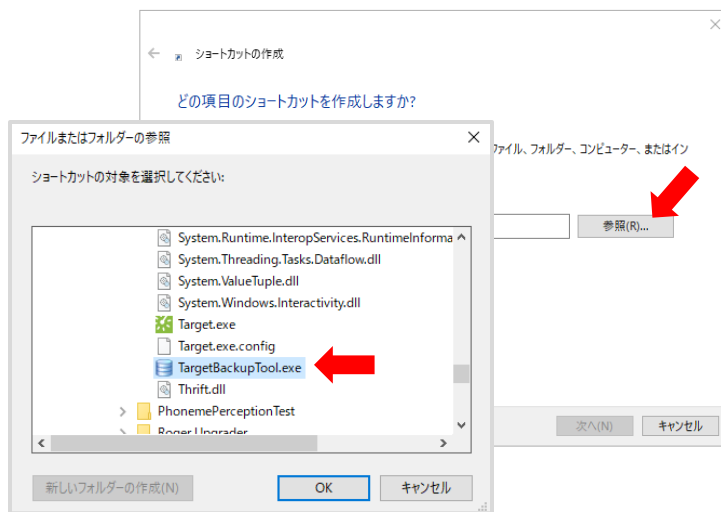



参照欄にファイル場所が表示されます。
「次へ(N)」を押します。

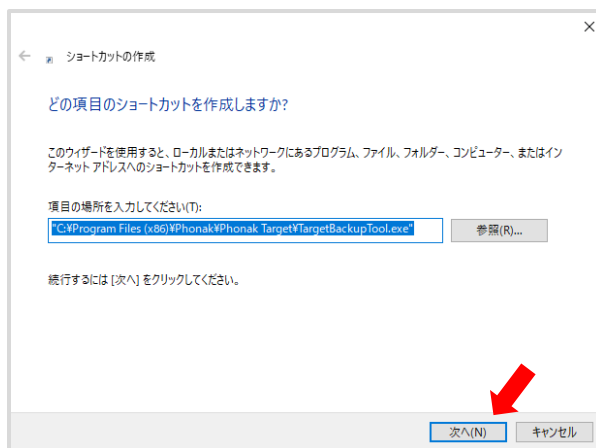


「完了(F)」をクリックします。

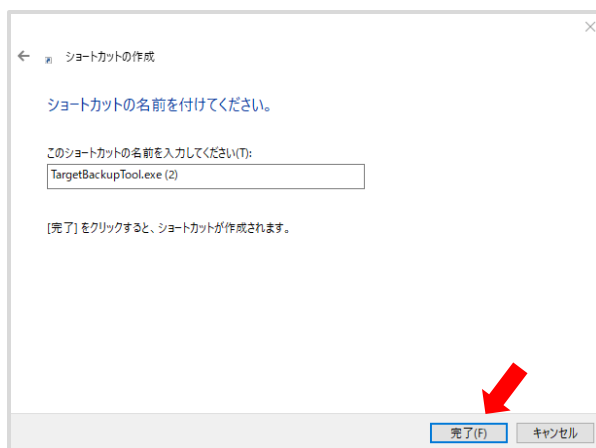

ショートカットを作成すると「Target Backup Tool」のアイコンが
デスクトップに表示されるので、これをクリックします（右図）。

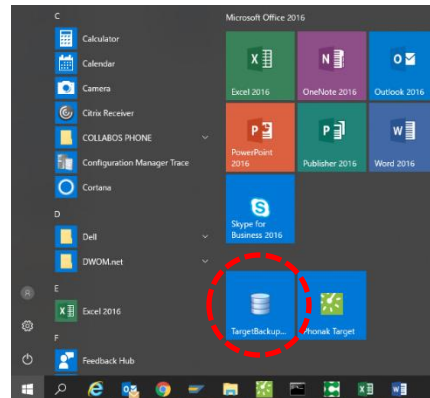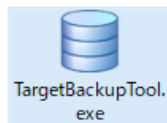

※ アイコン上で右クリックし「スタートにピン留めする」を
選択すると、スタートボタン  を押した時に表示される
すべてのメニューの右側に表示されます。