




## Phonak Naída L-UP (L90/L70/L50/L30/Trial)


JIS C 5512:2015 (2cm<sup>3</sup>カプラで測定) による公称値

### イヤフック HE11 2 cm<sup>3</sup> カプラ周波数レスポンス

#### 90dB入力最大出力音圧レベル

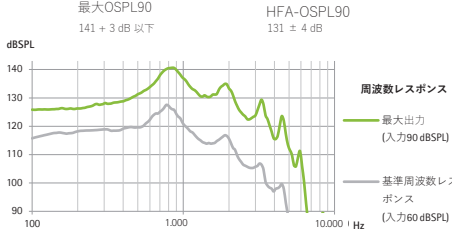


#### 音響利得

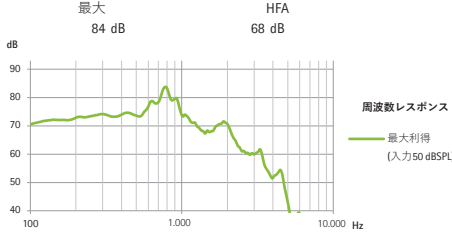

周波数帯	<100 Hz - 4700 Hz			
全高調波ひずみ (最大許容値)	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	5.0%	1.0%	1.0%	1.0%
電池電流	3.3 mA			
期待動作時間*	188 時間			
等価入力雑音レベル	19 dB SPL			

#### 誘導コイル感度


ETLS	HFA SPLIV
0 dB	115 dB

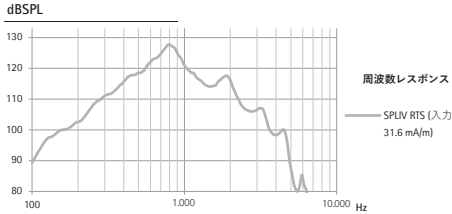


### スタンダードクラスイヤフック HE11 680 2 cm<sup>3</sup> カプラデータ

ANSI / ASA S3.22-2014(R2020)  
IEC 60118-0: 2022

#### 出力音圧レベル

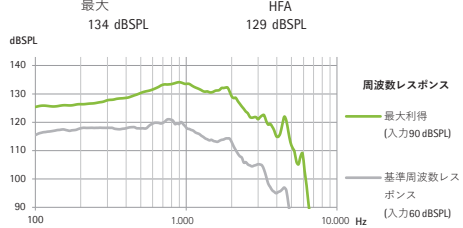


#### 音響利得

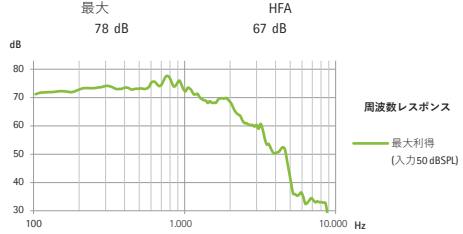

周波数帯	<100 Hz - 4700 Hz			
全高調波ひずみ (最大許容値)	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	3.0%	1.0%	1.0%	1.0%
電池電流	2.8 mA			
期待動作時間*	221 時間			
等価入力雑音レベル	19 dB SPL			

#### 誘導コイル感度

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	114 dB

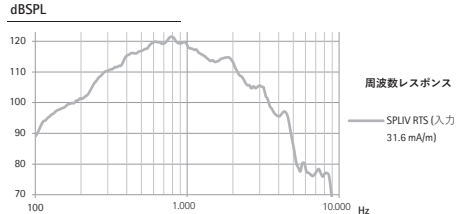

#### 一般的な試験情報

- 特殊な測定設定を使用。ボリュームコントロールによる RTS 調整
- 補聴器をリニアモードで動作
- 低音量伸長増幅を有効にする
- すべての収集データをフォナック ターゲットの測定設定で測定
- 音声信号の遅延は、社内規格に従って6.2 ms に決定

#### 警告

- ⚠ この補聴器の出力音圧レベルは、132 dB SPL を超える場合があります。
- ⚠ この補聴器をフィッティングする際、装着者の残存聴力を損なう危険があるため、特に注意してください。
- ⚠ 製造業者によって明示的に許可されていない本補聴器の変更または改造は禁止されています。そのような変更で、耳や補聴器が損傷することがあります。

\* 電池の性能は、有効にした機能、ワイヤレスアクセサリを使用、難聴、電池の寿命、音環境、耳栓により異なります。非充電式 ZnAir 電池の使用可能時間は、電池のモデルにより異なる場合があります。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland

A Sonova brand

