



テクニカルデータ


Roger™ Pass-around

ロジャー パスアラウンド マイクは、ロジャー タッチスクリーン マイクの子機として使用できるハンドマイク型のロジャー送信機です。

授業中にロジャー パスアラウンド マイクを使用することで、先生だけでなく他の生徒の発言も届けることができます。

各部の名称

- ① 電源（オン/オフ）
- ② マイクロホン
- ③ 状態表示インジケータ
- ④ マイクロホンボタン
- ⑤ 音量ボタン
- ⑥ マイクロUSBソケット
- ⑦ 回転ストッパー
- ⑧ 卓上スタンド

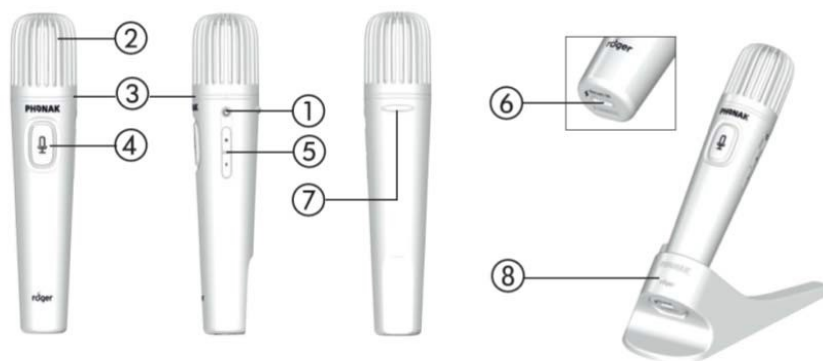

特長

ユーザビリティ

- インジケータで状態をひと目で確認可能
- 分かりやすい電源、スリープ操作

2種類の感度の内蔵マイクロホン

- 自動切り替えモード
(ハンドヘルド、テーブルスタンド)

マルチトーカー ネットワーク

- 生徒が受け渡しするロジャー送信機の子機
- 音声区間検出 モード (VAD)
- プッシュトゥトーク (PTT) 機能

仕様一覧

本体外寸 (L × φ) :	161 × 34 mm
重さ :	84 g
カラー :	シャンパン
動作環境条件 :	温度 : 0°C ~ 45°C / 相対湿度 95% 以下 (ただし、結露無きこと)
保管・輸送環境条件 :	温度 : -20°C ~ 60°C / 相対湿度 90% 以下 (ただし、結露無きこと)



PHONAK

電源仕様	
電池：	リチウムポリマー（電圧：3.7V）
充電時間：	120分 ※充電時間は電池状態により変わります。 ※最大性能のために、3回の放充電を行うことをお勧めします。
容量：	1200 mAh
使用時間：	約10 時間 ※電池残量はロジャー タッチスクリーンマイクの画面で確認できます
充電供給： （入力）	入力電圧：100 – 240 V 出力電圧：5 VDC / 1A 接続部：マイクロ USB ケーブルの長さ：1.3 m 過充電されない仕組みとなっていますが、充電中、高温になることがあります。 《重要！》 専用のACアダプターを使用して充電することを勧めます。

マイクロホン仕様	
マイクの数：	2つのマイクロホン
タイプ：	指向性マイクアレイ
モード：	- 自動音声区間認識（VAD） - マイクロホンボタンを押してプッシュトットーク（PTT）で使用可能 モードはネットワークにおける親機によって選択されます。
加速度計：	本体の状態（位置）をモニターし検知して、適切なマイクロホンモードを自動的に作動させます。 マイクロホンが横たわっていればミュートになり、スタンドに固定されればマイク感度が上がります。

音声信号	
再生周波数帯：	100 ～ 7,300 Hz

Roger仕様	
Roger：	2.4GHz帯のデジタル無線方式を用いた新しい補聴援助システムです。騒がしい教室や公共の場所など、補聴器や人工内耳を装着していても聞き取りが難しい騒音下での聞き取りを飛躍的に向上させます。
伝搬技術：	2.4GHz 自動適応型周波数ホッピング方式
電波出力：	100 mW
伝達範囲：	20 m
接続操作範囲：	10 cm

ロジャー機器との互換性	
Roger受信機：	全Roger受信機
ネットワークに参加できる Roger受信機数：	無制限
Roger送信機：	ロジャー タッチスクリーンマイク ロジャーパスアラウンドマイク ロジャー インスパイロ※ ロジャー ダイナマイク※ ※ ロジャータッチスクリーン特有の機能の使用は不可
ネットワークに参加できる Roger送信機数：	最大35台
DSF：	ロジャー デジマスター5000 ロジャー デジマスター7000
ネットワークに参加できる DSF数：	ロジャー デジマスター5000：1台 ロジャー デジマスター7000：2台
その他：	ロジャー ウォールパイロット

操作・使用	
使用オプション：	ハンドヘルド、テーブルスタンド
テーブル スタンド：	専用スタンドがない場合、テーブルに単独で立てての使用可能

基準認証	
電波法：	202-LSD063
El.Safety：	IEC/ EN 60950-1
Radiocom 2.4 GHz:	EN 300 328
EMC:	EN 301.489-1,-3,-9,-17
SAR (2.4 GHz):	E EN 62209-2 SAR 1g = 0.10 W/kg SAR 10g = 0.05 W/kg