

フォナック パートナーマイク

Phonak PartnerMic

取扱説明書



はじめに

このたびはフォナック製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。

フォナック パートナーマイク（以下「パートナーマイク」）は、離れた場所の会話が聞きやすいよう、高品位なデジタル電波で届けるマイクロホンで、フォナック マーベル補聴器専用のワイヤレスアクセサリです。

ご使用いただく前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書で不明な点がありましたら、本取扱説明書に記載されております「お客様相談窓口」までお問合せください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管ください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や他人への危害、財産への損傷を未然に防ぐための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損傷の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「損傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

危険

- 絶対に分解、改造をしないでください。火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
- 濡らさないでください。発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いに注意してください。
- 火のそばや、直射日光の強いところ、炎天下の車内など高温の場所に放置をしないでください。

警告

- AC アダプターのケーブルを無理に曲げたり、上に重いものをのせたりしないでください。ケーブルに傷がついて火災や感電の原因となります。ケーブルが傷ついた場合は使用しないでください。
- 本体および付属品を子どもの手の届くところやペットのそばに保管しないでください。万が一、誤って飲み込んでしまった場合は、ただちに医師にご相談ください。
- ペースメーカーなど医療機器の装用者が本製品を使用する際は医療機器製造会社や医師の指示に従ってください。

注意

- フォナック指定以外の AC アダプターは使用しないでください。発熱、発火するなどして、火災や事故の原因となります。
- 湿気の異常に多い場所や水分のかかる可能性のある場所では、絶対に使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- AC アダプターや接続ケーブルをコンセントやコネクタから抜くときはコネクタ部分を持って外してください。ケーブル部分を引っ張ると故障の原因となります。
- 次のような場合はただちに電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。
 - 異常な状態から回復できないとき
 - 異臭がする、煙が出た、または異常音が発生したとき
 - 本体の内部や隙間に金属片や水などの異物が入ったとき

このような状態のまま使用すると、事故や火災の原因となります。


- 本製品はソノヴァ・ジャパンまたはソノヴァ・ジャパンが指定するサービスセンターによるのみ修理可能です。
- フォナック指定の付属品を使用してください。

1. 本体付属品（要確認）

- パートナーマイク 本体



- 電源アダプター
- USB-C ケーブル

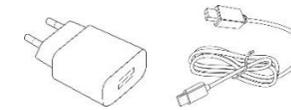


- ポーチ
- ストラップ
- 保証書
- 取扱説明書（本書）



2. 各部の名称


- ① マイクロホン音口
- ② USB-C ソケット
- ③ クリップ
- ④ ペアリングボタン
- ⑤ 電源スイッチ
- ⑥ インジケーター

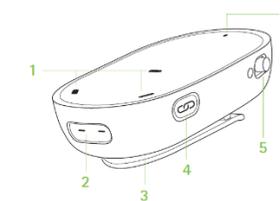


3. パートナーマイクの使用イメージ

パートナーマイクを装着した話者の声は、補聴器に直接伝送されます。パートナーマイクの電波が届く範囲は見通しで最大 25m です。（使用環境により異なります）

クリップを使用

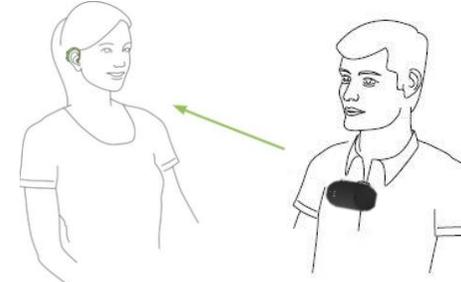

ストラップを使用

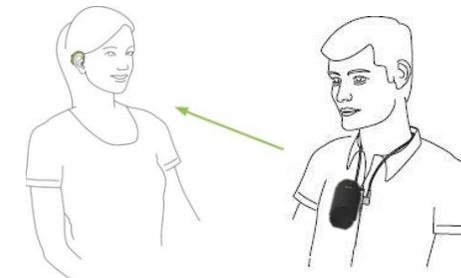


4. パートナーマイクの充電

ご使用前に、あらかじめパートナーマイクを充電してください。

（初めて充電する場合は、インジケーターが直ぐに緑色に光らなくても 2 時間は充電し続けるようにしてください）

充電時間	約 2 時間
使用可能時間	約 6 時間

- ① 充電はパートナーマイクに付属の AC アダプターを使用します。電源がオフであることを確認して、図のようにパートナーマイクの USB-C ソケットに AC アダプターのケーブルを差し込みます。

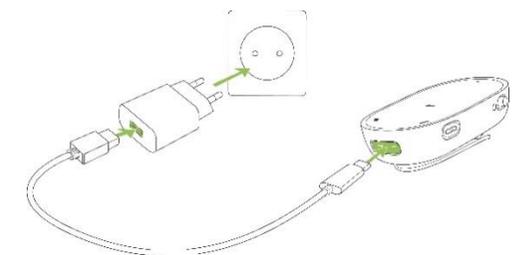

（充電中はインジケーターが緑色に点滅します。充電が完了すると、インジケーターは緑色に点灯します。）


- ② 充電が完了したら、パートナーマイクから AC アダプターのケーブルを抜いてください。充電完了後、AC アダプターを接続したままでも、安全性に問題はございません

5. 電源のオン・オフ

電源スイッチを横にスライドすると、電源のオン・オフが可能です。

（オン）（オフ）

電源オンの状態では、電源スイッチの部分に緑色の目印が現れます。

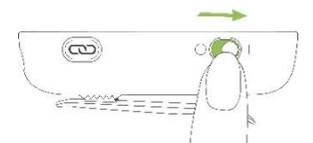

6. ペアリング


パートナーマイクと補聴器をワイヤレス通信させるには、ペアリング作業が必要となります。ペアリング作業とは、ワイヤレス通信機器どうしを通信させる際の初期登録のことです。この作業は初めて使うときに一度だけ行う必要があります。

ペアリング方法


- ① まず補聴器の電源をオンにします。
- ② パートナーマイクの電源をオンにし、パートナーマイクと補聴器を 10 cm 以内に近づけます。

③ パートナーマイクをペアリングモードにします。

初めてペアリングモードにする場合、パートナーマイクの電源をオンにすると、自動的にペアリングモードに移行し、インジケータが青色の速い点滅に変わります。

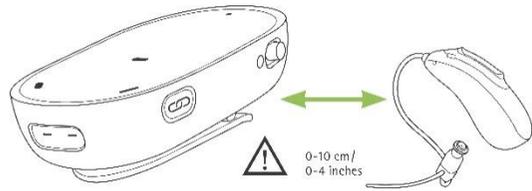

2回目以降にペアリングを行う場合、パートナーマイクの電源をオンにした後、ペアリングボタンを短押しすると、約3秒間ペアリングモードに移行し、インジケータが青色の速い点滅に変わります。

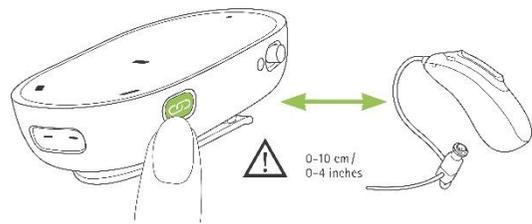

④ ペアリングは直ぐに完了します。ペアリングに成功すると、パートナーマイクのインジケータは緑色に点灯し、補聴器からお知らせ音が聞こえます。

※ パートナーマイクが別の補聴器とすでにペアリング済みであった場合、新しい機器とペアリングすると、以前ペアリングした機器とのペアリング内容は破棄されます。

ペアリング情報の削除

パートナーマイクに保存されたペアリング情報を削除するには、電源オフの状態から、ペアリングボタン()を押しながら電源をオンにします。インジケータが緑色に点灯し始めるまで約10秒間押し続けます。緑色に点灯した後、再度青色の点滅に変わりますが、これはペアリングモードになったことを示しています。



7. ペアリング台数

パートナーマイクは、左右を含む補聴器1セットとのみペアリングすることが可能です。2セット以上を同時にペアリングおよび使用することはできません。

8. パートナーマイクを使用する

パートナーマイクをご使用の際は、補聴器の電源をオンにして正しく身に着けてください。

① 直線距離 25m 以内の場所で、パートナーマイクの電源をオンにします。パートナーマイクは自動的に補聴器と接続します。通常、数秒程度で接続が完了しますが、環境によっては少し時間がかかる場合があります。接続してもお知らせ音は鳴りません。

② パートナーマイクが正しく動作しているか確認するには、マイクロホン音口を指で数回こすってください。補聴器からガサガサと音が聞こえればパートナーマイクと補聴器は正しく動作しています。

③ パートナーマイクが口元から 20cm 以内の距離に納まるよう、話し手の胸元にクリップで固定するか、ストラップを首から掛けてください。

※ クリップで固定させる場合、パートナーマイクが 45 度以上傾かないように取り付けてください。

※ パートナーマイクを衣服で覆わないようにしてください。雑音の原因になります。

④ 使用を終了する時は、パートナーマイクの電源をオフにします。接続が切れると、自動的に補聴器は直前まで使用していたプログラムに戻ります。



9. インジケータ表示

インジケータでパートナーマイクの状態を知ることができます。

状態	インジケータ表示
電源オン時	3秒間点灯(緑)
作動中	点灯なし
電源オフ時	点灯なし
充電中	点滅(赤)
充電完了	点灯(緑)
電池残量低下	一定間隔で点滅(赤)
接続待機中	点灯(緑)
通信中	点灯(青)
ペアリングモード	点滅(青)
ペアリング成功	点灯(緑)
ペアリング失敗	5秒間点灯(赤)
エラー	点灯(赤)

10. ボリューム調節

パートナーマイクからのボリューム調節は、補聴器の多機能ボタン、またはあらかじめお使いのスマートフォンと補聴器が Bluetooth ペアリングされていれば、リモートアプリ*から行うことが可能です。

* Android および iOS のスマートフォンからアプリをダウンロードすることが可能です。

11. 低電圧のお知らせ音

パートナーマイクの充電残量が約 30 分前になると、10 分に 1 回補聴器から 2 ビープ音が提示され、インジケータが赤色に点滅します。

12. Compliance information

Japanese Radio Law Compliance

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law (電波法). This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).

Certified Number (認証番号): 202-SMH022

13. 保証期間とアフターサービス

- 不具合がある場合は修理いたします。
- 本製品の無償保証期間はご購入日より 1 年間です。
- 無償保証期間が過ぎて不具合がある場合、有償修理となります。
- 保証期間内であっても、お客様による誤った使用、過失、改造による故障の場合、有償修理となる場合があります。
- 製品に同梱されている保証書に「販売店名」「お買い上げ日」などが記載されていることを確認し、大切に保管してください。
- 修理を依頼する際、お求めの販売店にご連絡ください。修理の際には保証書が必要となります。
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

14. シンボルマークの説明



CE 記号は、アクセサリ類を含む製品が医療機器指示文 93/42/EEC と R&TTE 指示文 199/5/EC のラジオと通信機器・送信機の基準を満たしていることを示しています。



この記号は、取扱説明書に載っている製品説明が EN60601-1 のタイプ B に則っていることを表します。



この記号は、製造工場が医療機器指示文 93/42/EEC の基準を満たしていることを示しています。



この記号は、通常と異なるごみ処理が要求される可能性があることを意味します。処分される際はお住いの自治体が定める方法に従ってください。

使用/輸送/保管時の環境条件 (温度/湿度)



製品の輸送・保管時の周囲温度は -20℃ から 60℃ の間、使用時の周囲温度は -10℃ から 45℃ の間でなければなりません。



この記号は、製品の輸送、保管時の水漏れ厳禁であることを示しています。



製品の保管時の環境は湿度 70% 以下、輸送・使用時の周囲温度は 90% 以下 (いずれも結露しないこと) でなければなりません。



製品の輸送・保管・使用時の気圧は 200 から 1500hPA の間でなければなりません。

Memo

販売店名

製造販売業

ソノヴァ・ジャパン株式会社

〒140-0002

東京都品川区東品川 2-5-8

天王洲パークサイドビル

TEL 0120-06-4079 (お客様相談窓口)

FAX 0120-23-4080

www.phonak.com/jp/ja



A Sonova brand

PHONAK
life is on