

# Phonak


## Bonnes pratiques

### Utilisation de Roger Select en télétravail

#### Utilisation de Roger Select pour téléphoner

En ces journées de télétravail isolées, Roger Select peut être votre partenaire idéal et servir de passerelle pour que vous puissiez travailler avec vos collègues lors d'appels en ligne. Voici les bonnes pratiques à privilégier pour connecter votre Roger Select à votre ordinateur à l'aide de la technologie Bluetooth.

Dans le menu « Paramètres Windows », sélectionnez « Périphériques », puis procédez à l'appairage depuis l'écran de Réglages « Appareils Bluetooth et autres ». Une fois l'appairage effectué, vérifiez que Roger Select est connecté et prêt à être utilisé.

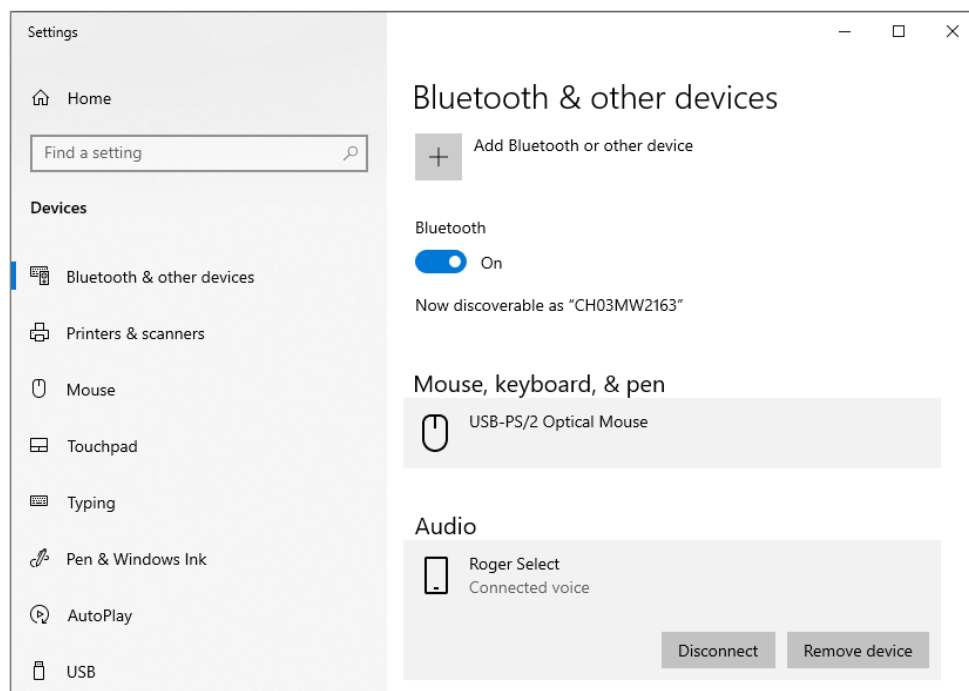


À présent, tous les sons, y compris les notifications du PC, les sons de vidéos et les musiques de sites Web, seront diffusés directement dans vos aides auditives.

Mieux encore, Roger Select peut être utilisé pendant les appels en ligne pour que vous gardiez le contact avec vos collègues. Pendant l'appel, portez Roger Select sur la poitrine : il capte la voix et propose une solution véritablement mains libres.


## Utilisation de Roger Select avec Microsoft Teams

Lorsque Roger Select est connecté à votre PC par Bluetooth, celui-ci est automatiquement sélectionné en tant que source audio dans Microsoft Teams. Si cela n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner Roger Select en suivant les indications ci-dessous :

1. Dans le menu « Autres actions » (...): cliquez sur « Afficher les paramètres de périphérique » :

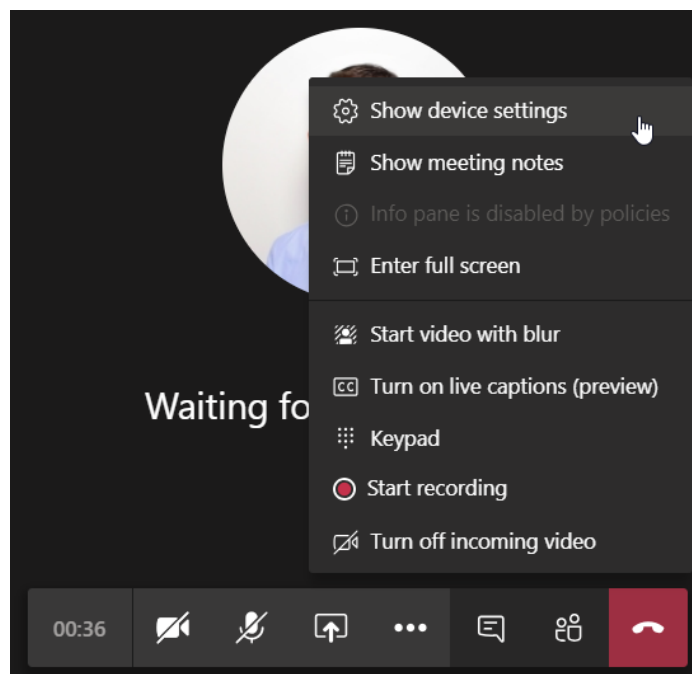

2. Vérifiez que Roger Select est bien sélectionné en tant que « Périphérique Audio » :

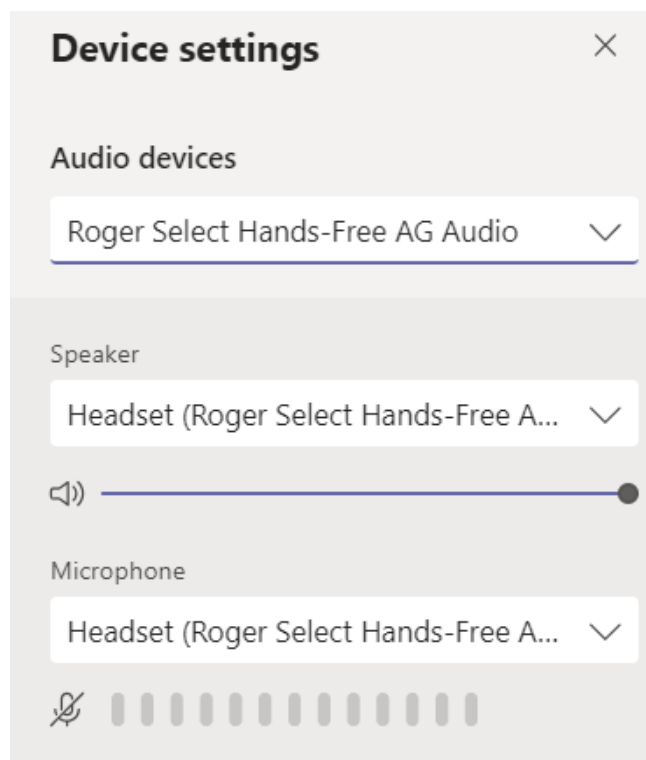

## Utilisation du sous-titrage en direct

Toujours dans le menu « Autres actions » (...), cliquez sur la fonction « Activez les sous-titres en directe » : les mots prononcés s'affichent alors sous forme de texte dans le coin supérieur droit. Cette fonction peut s'avérer très utile si vous n'avez pas compris la voix d'un point de vue acoustique.

