


Comment se connecter au Roger Multimédia Hub de Phonak

PHONAK
life is on

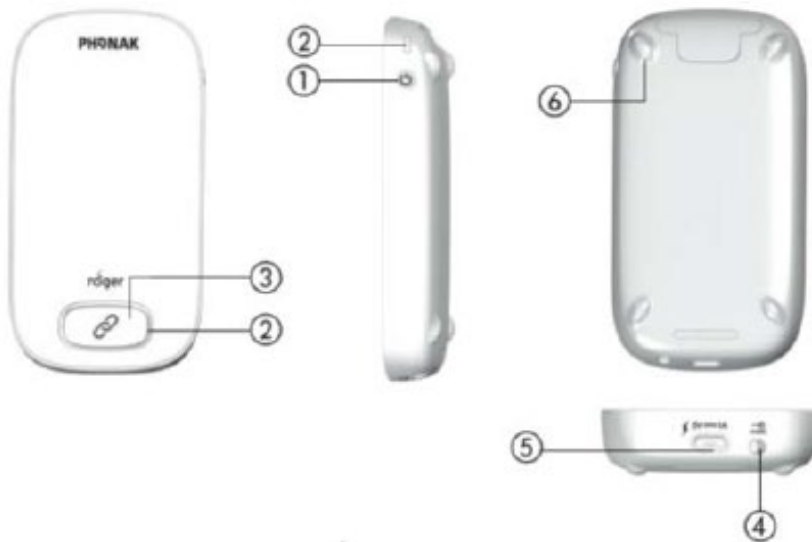

Description du produit

1. Marche/Arrêt
2. Témoin lumineux
3. Bouton de connexion
4. Entrée audio jack 3.5 mm
5. Prise micro-USB
6. Pieds

Fonctionnement général

- **Pour l'allumer**, appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le côté du Roger Multimédia Hub durant 3 secondes. Les voyants clignoteront rapidement en vert jusqu'à ce que le démarrage soit complété. Le voyant d'alimentation continuera de clignoter lentement en vert pendant l'utilisation.
- **Pour l'éteindre**, appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le côté du Roger Multimédia Hub durant 3 secondes. Les voyants lumineux clignoteront 3 fois en vert, puis s'éteindront.
- **Lorsque vous rechargez** votre Roger Multimédia Hub, le voyant lumineux clignotera en vert. Une fois la pile entièrement chargée, le voyant d'état de la pile passe au vert en continu.



Écoute indépendante

À utiliser lorsqu'un enfant a besoin d'écouter une source audio de manière indépendante, c'est-à-dire un livre audio ou une leçon de laboratoire informatique.

1. Tenez le Roger Multimédia Hub à moins de 10 cm du récepteur Roger de l'enfant et appuyez sur le gros bouton de connexion du Roger Multimédia Hub. Répétez ces étapes pour connecter d'autres récepteurs.
2. Branchez le Roger Multimédia Hub dans la prise de sortie audio de la tablette ou de tout autre appareil multimédia.
3. Sélectionnez «Headphones» ou «Casques» dans le menu contextuel de l'ordinateur (voir l'image 1)
4. Ajuster le volume en cliquant sur l'icône du haut-parleur dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur (voir l'image 2).
5. Faites jouer la source audio. Le Roger Multimédia Hub diffusera l'audio aux récepteurs connectés.

Image 1

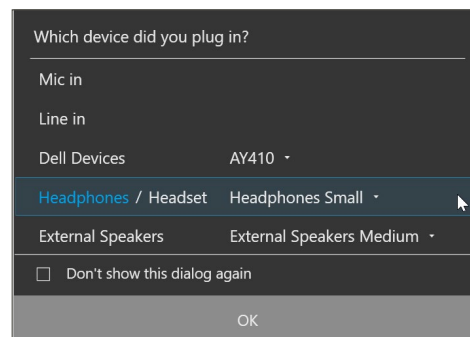


Image 2

