


Comment se connecter avec Roger Table Mic II


PHONAK
life is on


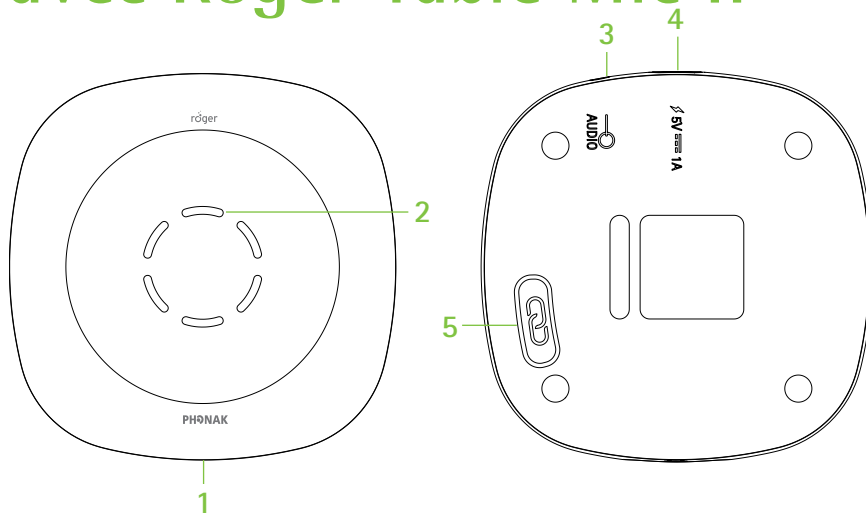


Device Description

1. On/Off/ Mute
2. Microphones and indicator light
3. Audio input
4. Charging input
5. Connect

Fonctionnement général

- **Pour l'allumer**, appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le côté du Roger Table Mic II jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne vert (voir l'image 1). **Pour l'éteindre**, appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le côté du Roger Table Mic II pendant 2 secondes.
- **Pour vous connecter**, tenez votre Roger Table Mic II à moins de 10 cm du récepteur Roger (voir l'image 2)
- Appuyez sur le bouton de connexion  du Roger Table Mic II (voir l'image 3)
- **Lorsque vous rechargez** votre Roger Table Mic II, le voyant lumineux clignotera en vert. Une fois la pile entièrement chargée, le voyant d'état de la pile passe au vert continu.

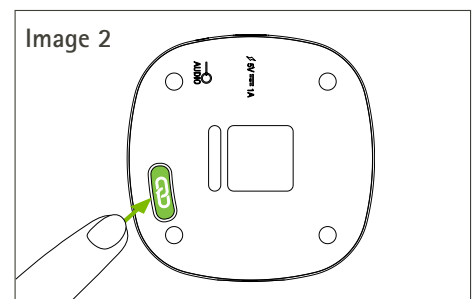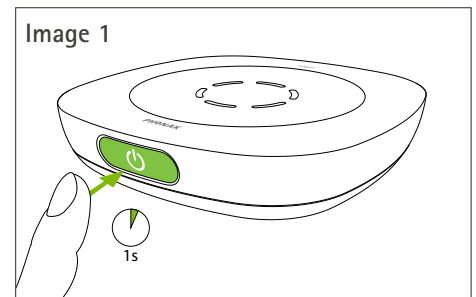

Connexion aux ordinateurs et tablettes

1. Assurez-vous que votre Roger Table Mic II est allumé.
2. Branchez une extrémité du câble audio fourni à l'entrée auxiliaire de votre Table Mic II (voir l'image 4).
3. Branchez l'autre extrémité à la sortie audio de votre ordinateur ou de votre appareil multimédia (voir l'image 4).
4. Sélectionnez "Headphones" ou "Casques" dans le menu contextuel de l'ordinateur (voir l'image 5).
5. Ajustez le volume en cliquant sur l'icône du haut-parleur dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur (voir l'image 6).

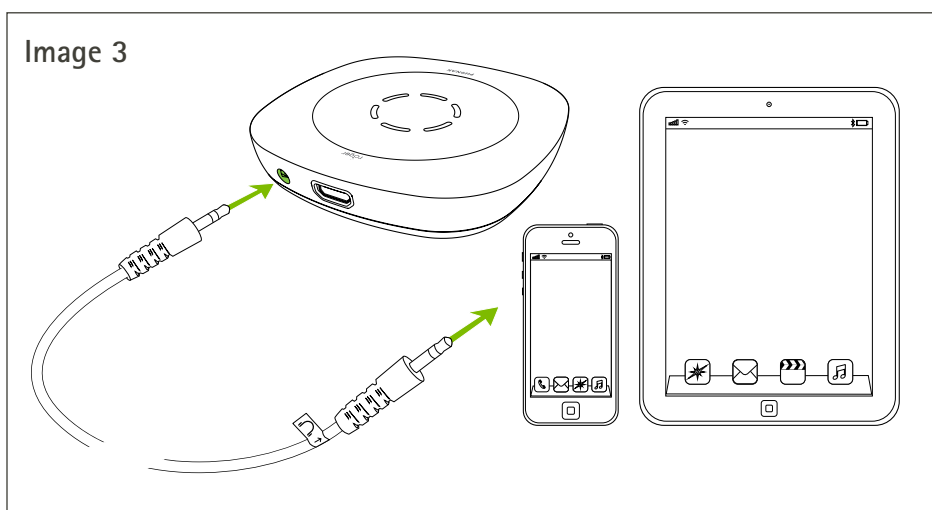


Image 4

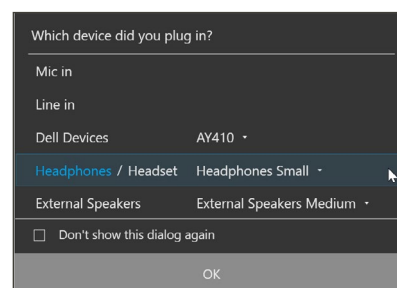


Image 5

