


myPhonak Junior 1.2

מדריך למשתמש

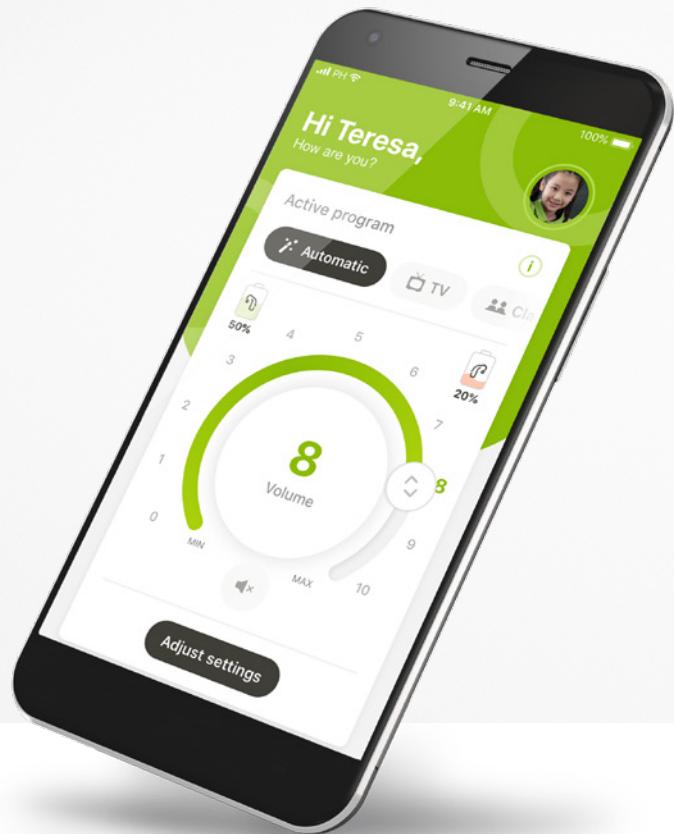

PHONAK
life is on



A Sonova brand

תחילה עבודה

myPhonak Junior הוא יישום שפותח על-ידי Sonova, מוביילית עולמית בפתרונו של מוצר הנמצא בצריך, שוייצ'ריה. יש לקרוא היטב את ההוראות למשתמש כדי ליהנות מכל האפשרויות שהיישום מציע.

מידע בנושאי תאימות:

לשימוש ביישום זוונאךJunior, myPhonakJunior, נדרש מכשיר Bluetooth® עם קישוריות myPhonakJunior. ניתן להשתמש-myPhonakJunior בטלפון עם Bluetooth® low energy (LE) והוא תואם למכשירים המרצים מערכת הפעלה iOS® בגרסת 14.0 או מתקדמת יותר. אפשר להשתמש-myPhonakJunior בהתקני Android™ מורשי (GMS) Google Mobile Services התומכים ב-Android 4.2 ו-Bluetooth® 8.0 ו-Android OS 8.0 ו-Bluetooth® 4.2. המרצים מושגים על ידי myPhonakJunior.



הסימן המ好似ני והסמלים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בעלות Inc. SIG, Bluetooth SIG, AG Sonova בעריכת. סימן המסחרי זה משמש בסימנים אלה על-ידי Apple Inc. הרשות בארה"ב ובארצות אחרות. iPhone® הוא סימן מסחרי של Google LLC. Android הוא סימן מסחרי של Cisco Systems, Inc. / או שותפותה בארצות הברית ובסימניות אחרות.

מדריך זה למשתמש מתאר את התכונות של יישום myPhonakJunior, וכך המשמש יכול להפעיל תוכנות אלו. הוא גם מתאר כיצד לחסום תוכנות מסוימות עבור ילדים באמצעות נעלית הרים, כדי שנitin יהיה להשתמש בתוכנות אלו רק בליווי הורה. קראו את המדריך למשתמש עד סוף לפני השימוש ביישום.

לילדים שונים יש התפתחות קוגניטיבית שונה, אפילו אם הם באותו גיל. כדי להעיר האם הילד מתאים לשימוש-myPhonakJunior יש להעיר את רמת הבשלות ואת המודעות לסיכון אצל כל ילד על בסיס אישי. ניתן להשתמש בהמלצות הבאות כמדריך:

שימוש עצמאי בשלט-רחוק: ילדים מגיל 10 ומעלה יכולים לקבל החלטות מידיעות לגבי האופן שבו הגדרות היישום יופיעו על השמייה שלהם ועל המודעות שלהם לצליים מסביב.

חווני שתיהיה ליד יכול לקרוא ולהבין הודעות אזזהה.


שימוש נתמך בשלט-רחוק: ילדים מגיל 7 ומעלה יכולים לספק משב ברור לגבי שינוי או התאמות שנעשו על ידי צד שלישי באמצעות היישום. בתרחיש זה, הורים/матפלים יכולים לבצע שינויים לטובתו של הילד.

הרעה: חשוב מאד שההורם/מתפלם לא יבצע שינויים אלא אם הילד מסוגל לספק משב אמין.

תוכן העניינים

4	סקירה מהירה
6	התקנת היישום myPhonak Junior
7	齊美得與麥可瑞耳聲助聽器的兼容性
9	בקרת הורים
10	התאמנה אישית
11	פתרון בעיות ב齐美得
12	שלט רחוק
13	פעולות תמיינה מרוחק
15	מכשורי השמיעה שלי
16	מידע בנושא בטיחות ותיאור הסמלים
20	הסברים על הסמלים

סקירה מהירה - שלט רחוק

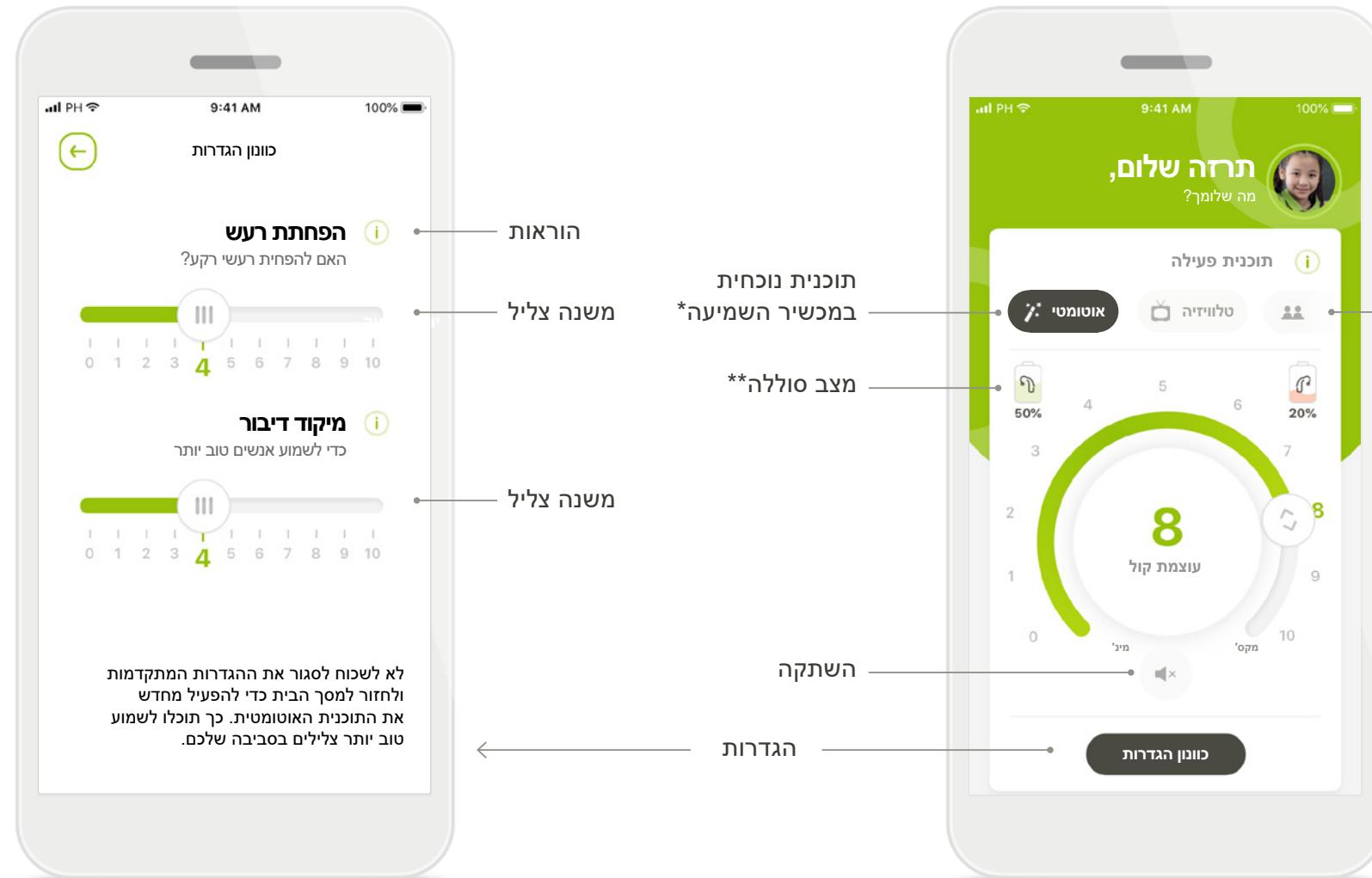

כוונון הגדרות

שליטה מרוחקת


* AutoSense™ Sky OS עברו מכשירי השמיעה של Audéo-Bolero, Naïda ו-Sky OS עבור מכשירי השמיעה של.

** זמין רק עבור מכשירי שמיעה נתוניים.

סקירה מהירה - תמיכה מרוחק*




שיחת תמיכה מרוחק

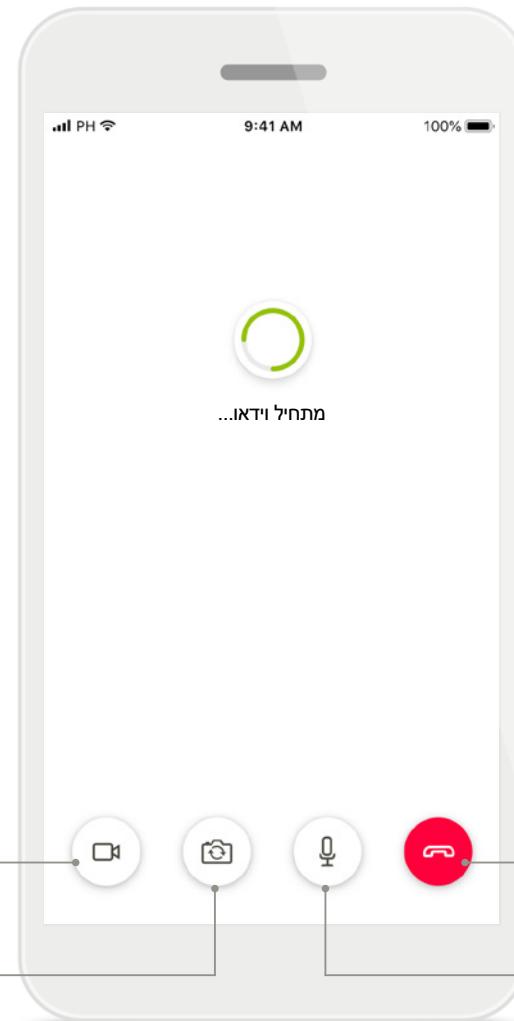

שיחת תמיכה מרוחק

התקנת יישום myPhonak Junior

- חיבורו את הטלפון החכם לאינטרנט דרך Wi-Fi או נתוני סולריים
- הפעילו את Bluetooth בטלפון החכם

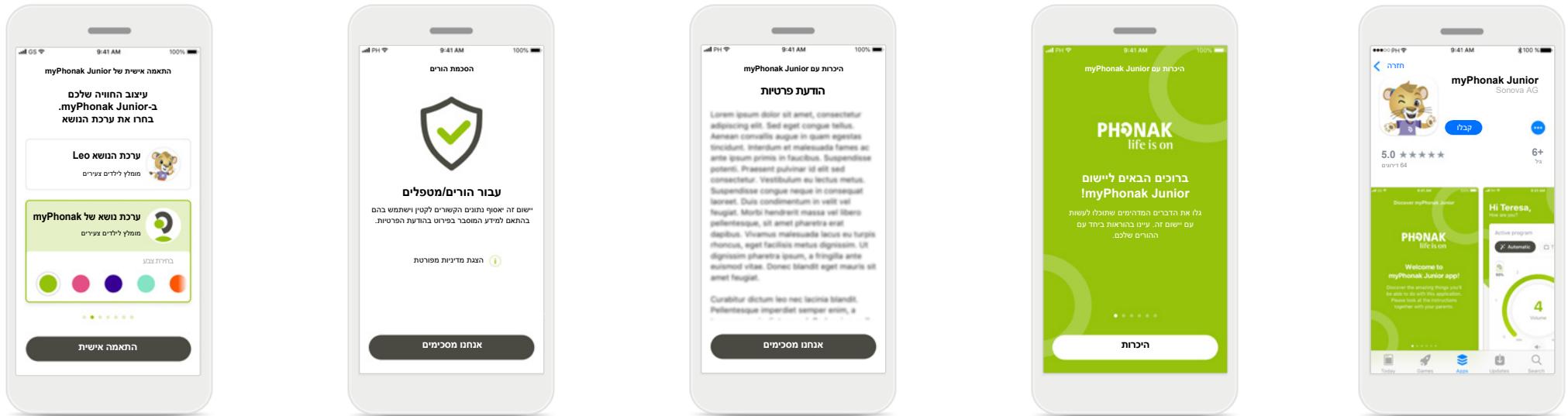

בחירה ערכת נושא
הורים, מטפלים או
משתמשי היישום יכולם
לחזור בין ערכת הנושא
'myPhonak' או 'Leo'.
בשתי ערכות הנושא
יש את אותן תוכנות
של היישום. אפשר
לחזור את ערכת הנושא
במהלך ה가입ות או
ב'הפרופיל שלי'.

הסכמה הורים
כהורה או מטפל,
עליכם לאשר את
הסכמה הורים כדי
להשתמש ביישום.
myPhonak Sonova[®] נתונים
הקשורים לקטין
וישתמש בהם בהתאם
למידע המוסף בפירוט
בהודעת הפרטיות.


הודעת פרטיות
כדי להשתמש ביישום,
עליכם להקיש על **אנחות מסכימים** על-מנת לקבל
את הודעת הפרטיות
ולהמשיר.

פתחו את
myPhonak Junior
פתחו את היישום ולהצלו
על **היכרות**.

הורידו את היישום
myPhonak Junior
הורידו את היישום מהחנות.
לאחר ההתקנה פתחו את
myPhonak Junior

צימוד עם מכשירי שמיעה תואמים*

כדי לחבר מכשירי שמיעה התומכים ב-Bluetooth, myPhonak Junior עם Bluetooth, בצעו את ההוראות של להלן.**

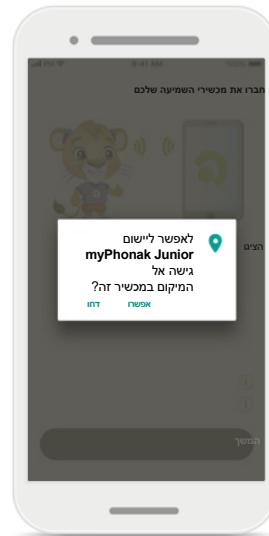

מייקום
במכשירי iOS, Android,
צריך להפעיל שירות
מייקום כשםבעאים צימוד
של מכשירי Bluetooth.
אחר בפעמי הראשונה. לאחר
הגדרה ראשונית תוכלו
להשבית שוב את
שירותי המייקום.

ריבוי מכשירים
אם יזוהו מכשירי
שמיעיה מרובים, הם
יוצגו בהתאם. כדי
להציג את מכשיר
השמיעיה שלכם, לחוץ
על הלחץ במכשיר
השמיעיה.

בחירה
ה קישוש על **בחירה** כאשר
מכשירי השמיעיה שלכם
מופיעים בראשימה.

מחפש
הישום מחפש מכשירי
שמיעיה תואמים, ויציג
אתם לאחר שייזהה
אתם. זה יכול לקחת
כמה דקות.


הוראות צימוד
ה קישוש על המשיכו
ופעלו לפי ההוראות
עבור מכשירי
השמיעיה שלכם

*תאימות עם M ,Audéo P-Naida P ,Audéo M ,Bolero M ,Naida M ,Sky Link M ,Sky M .

**הזרמת Bluetooth: כדי להזרים מזיקה או לקבל שירותי טלפון במכשירי השמיעיה, עברו אל "הגדרות" <Bluetooth> והוסףו את מכשירי השמיעיה לרשימה התקנים המוחברים. לאחר מכן חזרו לישום כדי להמשיך בצימוד.

צימוד עם מכשירי שמיעה תואמים*

כדי לחבר מכשירי שמיעה התומכים ב-Bluetooth, בצעו את ההוראות של להלן.

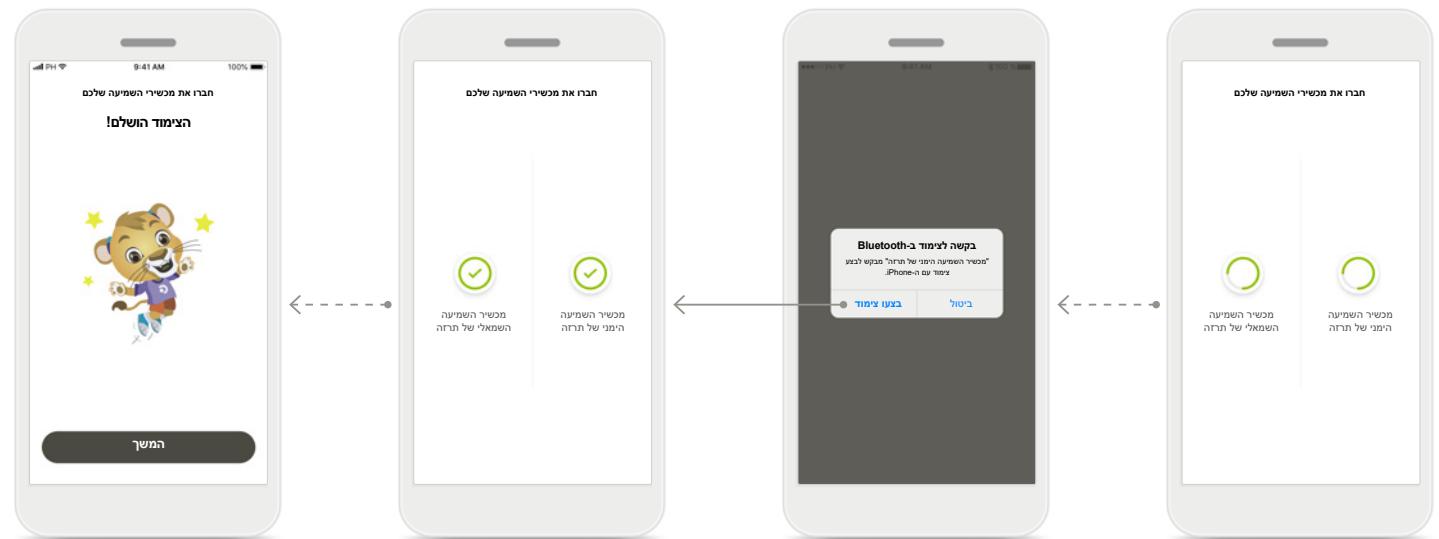

ההגדירה הושלמה
אתם מוכניםCut
להשתמש בכל
התפקודים התואמים
בשימוש. הקישו על
המשך כדי לגשת
למסך הראשי.


הצימוד הושלם
הצימוד של שני
מכשירי השמיעה
הסתיים. היישום
ימשיך אוטומטית
לשלב הבא.

אישור עבור כל
מכשירי השמיעה
כמפורט בהמשך,
אשרו את הצימוד על ידי
הקשה על **צימוד** בחילון
ה קופץ עבור כל מכשיר
בנפרד.

צימוד מכשירי
השמיעה
היישום יתחבר לכל
מכשיר שמיעה בנפרד.

*תאימות עם M,Audéo L-i ,Naída L ,Sky L ,Audéo P ,Naida P ,Audéo M ,Bolero M ,Naida M ,Sky Link M ,Sky M

כדי להפעיל בקרת הורים עם myPhonak Junior ע"מ, בצעו את ההוראות להלן.

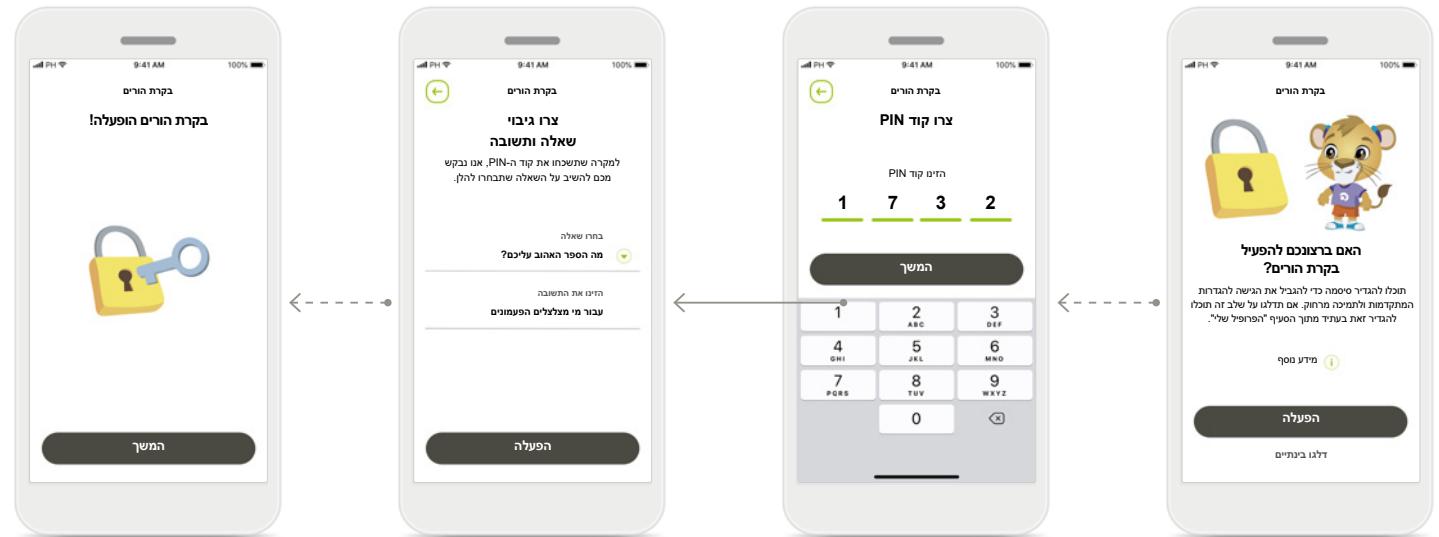


בקרת הורים הופעלה
לאחר בחירת שאלת
הגיבוי והקלידת
התשובה, תוכלו להפעיל
את בקרת הורים.
אפשר גם להשבית את
בקרת הורים בתפריט
היישום, במידה ואי
בכך צורך.

שאלות גיבוי
בחרו שאלת גיבוי והקלידו
את התשובה הנכונה.
שאלת זו משמשת לגישה
אל פונקציות מוגבלות,
במקרה ששכחתם את
הקוד בן ארבע הספרות.

צורך קוד PIN
הגדירו קוד PIN בן ארבע
ספרות כדי להפעיל בקרת
הורים. אפשר לשנות קוד
זה או לאפס אותו בכל עת
לבחרת הורה/המתפל.

הפעלת בקרת הורים
אפשר להפעיל בקרת הורים
במהלך ההצטרפות/ההפעלה
הראשונית של היישום, ואפשר
גם אחר כך, לפי בחירת
הורה/המתפל בהפרופיל
שלכם. פונקציה זה עוזרת
בהגבילת הגישה לתוכנה
"הפעלה אוטומטית" של
"תמיימה מרוחוק" עבור מכשירי
שמיעת נטענים, ובבחירה
רווחב פס Bluetooth עבור
שייחות טלפון.

כדי להשתמש באפשרויות ההתאמת אישית עם יישום myPhonak Junior, בצעו את ההוראות להלן.

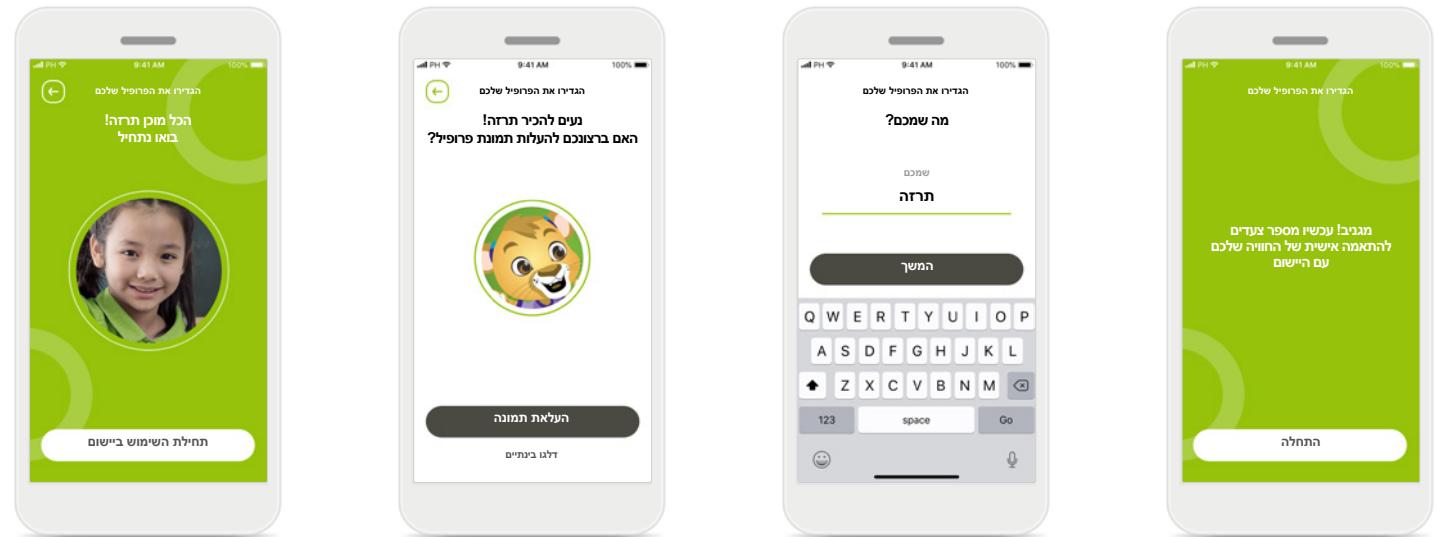

אפשרויות נוספות

אפשרויות ההתאמת אישית אישית נוספות כוללות החלפת צבע ערכת הנושא של רקע היישום, שינוי הצבע של מכשירי השמיעה הווירטואליים והוק המכשיר.

תמונת פרופיל משתמש

בחרו תמונה פרופיל. אפשר לדלג על שלב זה ולהגדיר אותו מאוחר יותר במקטע 'הפרופיל שלכם'.

שם פרופיל משתמש


בחרו שם משתמש.

התחלת ההתאמת אישית

אפשר להתחיל את ההתאמת אישית במאלה הצעירות, ואפשר גם אחר כר דרכ' 'הפרופיל שלכם' או מסך הבית.

פתרון בעיות בצדימוד

שגיונות אפשריות בתהליך ההגדרה.
למידע נוסף לפתרון בעיות, בקרו בדף התמיכה של **Phonak**.

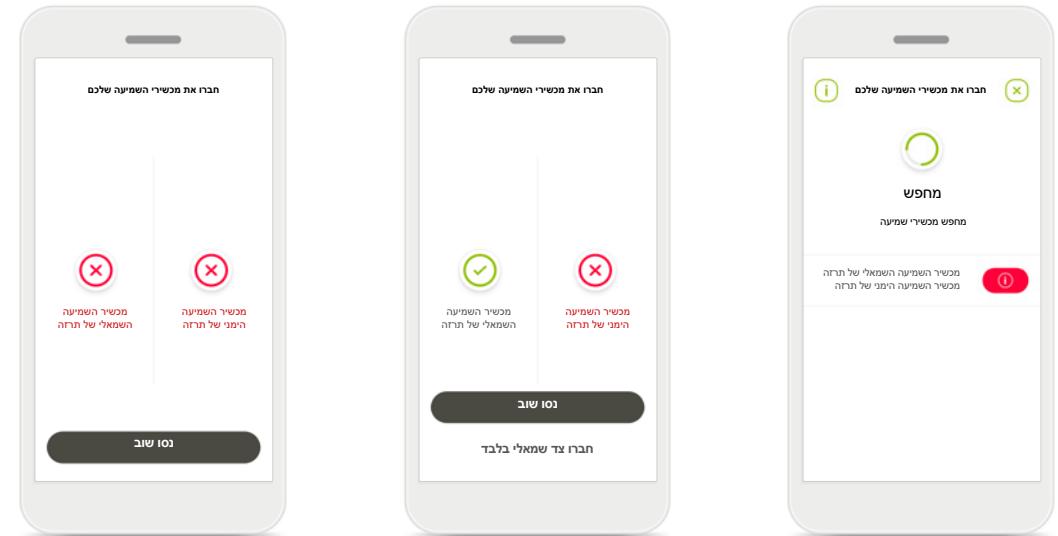

ההתחברות לשניים נכשלה
הקיים על **נסו שוב** כדי להתחילה מחדש את תהליך הצדימוד ופعلו לפי ההוראות.

- שגיאה בחיבור למכשיר השמיעת**
אם נכשל הצדימוד לאחד ממכשירי השמיעת, תוכלן לבצע אחת מהאפשרויות הבאות:
1. הקיים על **נסו שוב** כדי להתחילה מחדש את תהליך הצדימוד.
 2. המשיכו עם רק אחד מתוך שני מכים השמיעת בלבד.


מכשים לא תואמים
השימוש לא מסוגל להתחבר למכשים, משום שאינם תואמים. למידע נוסף, צרו קשר עם קלינאי התקשרות שלכם.

תצוגה ראשית של שליטה מרוחק


פונקציונליות זמינה בכל מכשירי השמיעה.



רמת סוללה נמוכה
אם רמת טעינת הסוללה
נמוכה מ-20%, הסמל
ישנה צבע לאדום. כדי
לשקל לטעון בהקדם את
מכשירי השמיעה.

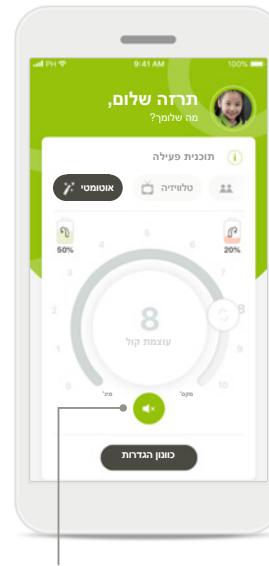

השתקה
ניתן להשתיק את
מכשירי השמיעה על-
ידי לחיצה על הסמל
השתקה.

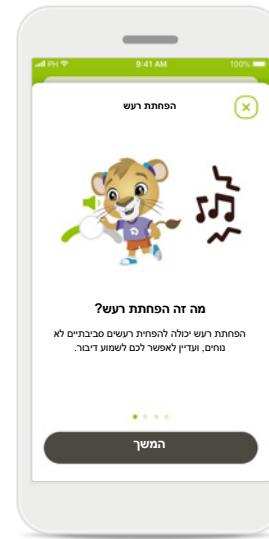

מידע
תאפשרו לגשת למידע
נוסף על תוכנות
מוסומות באמצעות
לחיצה על הסמל .




כונן עוצמת קול
במכשיר שמיעה
הziejוז את גלגל המחוון כדי
לשנות את עוצמת הקול.
החולפת התוכנית הפעילה
הקיישו על התוכניות הזמיןות
כדי לכונן לסייעת האזנה
ספציפית. התוכניות הזמיןות
תלוויות באופן שבו קלינאי
התקשרות שלכם הגדר את
מכשירי השמיעה שלכם.



פעילות תמיינה מרוחק

אם אתם משתמשים בנתונים סלולריים, יתכן שהדבר כרוך בתשלום לספק הטלפון שלכם לפני התחלת פעילות תמיינת Phonak מרוחק. פעילות תמיינה מרוחק תשמש בכ-**MB 56** לשיחת וידאו באורך 10 דקות, בעוד ששיעור קולית תשמש בכ-**MB 30**.

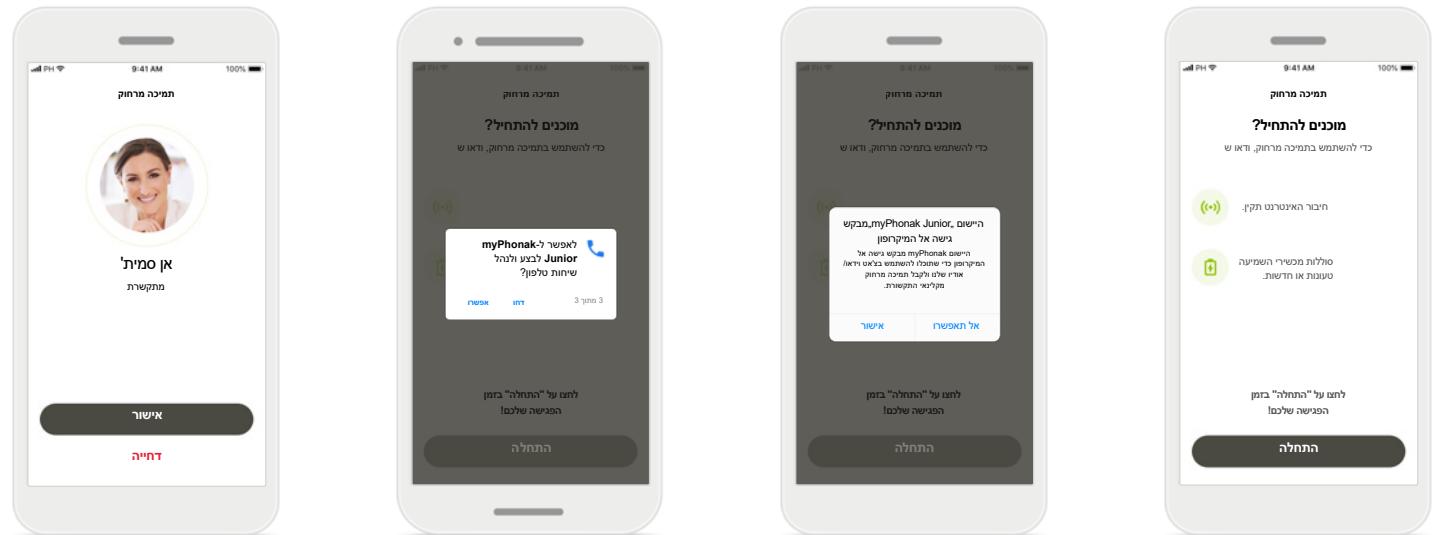

קבלת שירותי וידאו
האפליקציה יחבר אתכם אל
קלינאי התקשרות. הקישו
על **אישור** כדי לקבל
את השיחה מקלינאי
התקשרות שלכם.

גישה לשירותים ומיקרופון
אם ברשותכם טלפון חכם
של Android הקישו על
אפשר כדי לחתן לישום
myPhonak Junior הרשאה
לבצע ולנהל שירותי טלפון.

גישה לצלמה ומיקרופון
לחצו על **אישור** כדי לאפשר
ליישום myPhonak Junior
להשתתף בצילום ומיקרופון.

**התחלת פעילות תמיינה
מרוחק**
בזמן הפגישה, פתחו את
אפליקציה myPhonak Junior והקישו
על **התחלת** כדי לידע את
קלינאי התקשרות שאתם
מושכים לפגישת התמיינה
מרוחק של Phonak.

פעולות תמיינה מרוחק

תוך כדי הפעולות, ניתן להתאים אישית את החוויה על ידי הפעלה או כיבוי של הוויידאו או השמע שלכם, לפי מה שתרצו.




הגדרות חדשות נשמרו
מכשיiri השמיעה יושתקו
לזמן קצר במהלך תהליך
החיבור ובמהלך שמירת
הגדרות אל מכשיiri
השמיעה. תוכלו לראות
את המצב על-גבי המסך.




אין וידאו
אם ברצונכם להסתיר את
הוויידאו, ניתן להשבית את
החיבור בלחיצה על הלחצן.



מכשיiri שמיעה מחוברים
אם קליניAI התקשרות
שלכם צריך להתחבר
למכשיiri השמיעה שלכם,
ניתן לעשות זאת מרוחק
באמצעות הטלפון החכם.
קליניAI התקשרות שלכם
ידע אתכם מתי הוא או
היא יתחברו למכשיiri
השמיעה שלכם.

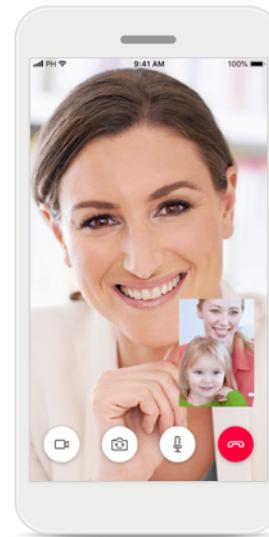


שיחת מתנהלת
עכשיו אתם מחוברים אל
קליניAI התקשרות שלכם.

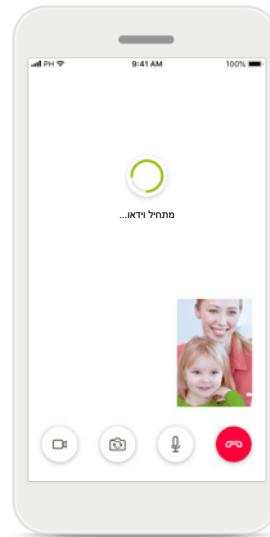

מתחילה שיחת וידאו
לאחר מספר שניות
תמונה הוויידאו תוגדר
ותוכלו לראות את קליניAI
התקשרות שלכם.

מכשירי השמיעה שלי

פונקציונליות שטחיה באופן התכונות של מכשירי השמיעה ובאבייזרים האלחוטיים שברשותכם.

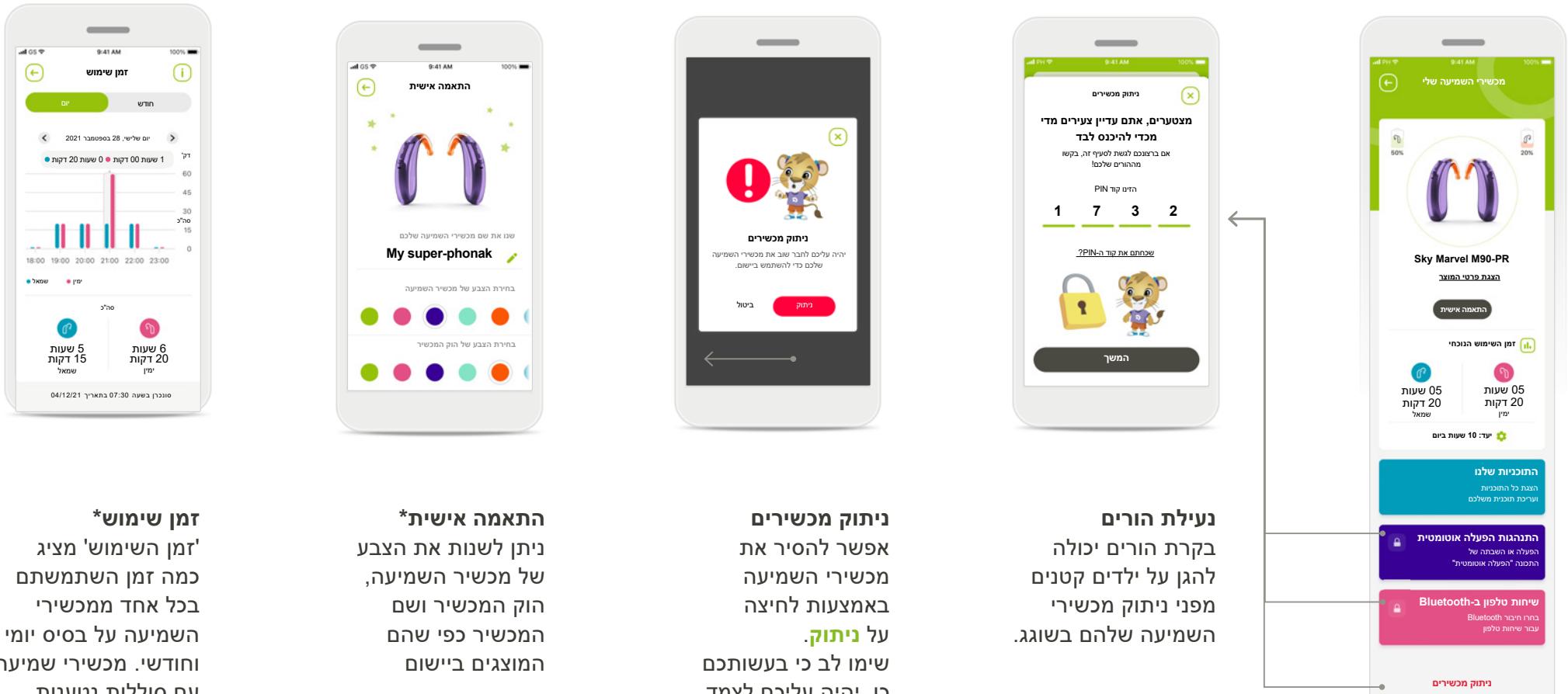

זמן שימוש*

זמן השימוש מציג כמה זמן השתמשת בכל אחד ממכשירי השמיעה על בסיס יומי וחודשי. מכשירי שמיעה עם סוללות נתונות מספקים את המידע הרוב ביותר על זמן השימוש.

התאמת אישית*

ניתן לשנות את הצבע של מכשיר השמיעה, הוק המכשיר ושם המכשיר כפי שהם המוצגים ביצוע

ניתוק מכשירים

אפשר להסיר את מכשירי השמיעה את מכשיטם מהן על **ניתוק**. שימושם לב Ci בעשיותם כן, יהיה עליהם לצמד את מכשירי השמיעת שלהם שום דבר כדי להשתמש ביצוע.

נעילת הורים

בקרט הוריהם יכול להגן על ילדים קטנים מפני ניתוק מכשירי השמיעת שלהם בשוגג.

מכשירי השמיעה שלי

המסך 'מכשירי השמיעה שלי' מספק מידע חשוב על מצב הסוללה (למכשירים נתונים), סוג מכשיר השמיעת, התקנת רישיונות Roger, זמן השימוש, התוכניות שלי, התנהלות הפעלה אוטומטית ושיחות טלפון ב-Bluetooth. כן אפשר גם לבצע התאמת אישית למראה של מכשירי השמיעת.

מידע חשוב בנושא בטיחות

קראו את מידע הבטיחות הרלוונטי בעמודים הבאים לפני השימוש במכשיר.

הודעת אבטחה

נתוני מטופלים הם נתונים פרטיים וחשוב להגן עליהם:

- וודאו שהטלפון החכם מעודכנים בעדכוני האבטחה האחרון של מערכת הפעלה. הפעילו עדכונים אוטומטיים.
- וודאו שגרסת היישום המותקנת עדכנית SohoS השתמשו רק ביישומים מקוריים של SohoS.
- מחניות רשותם עם מכשירי השמיהה שלהם.
- התקינו רק יישומים מהימנים מחניות רשותם.
- הקפידו להשתמש בסיסימות חזקות ולשמור על סודיות הפרטים שלכם.
- נעלו את הטלפון באמצעות קוד PIN /או אמצעי ביומטרי (למשל טביעת אצבע, זיהוי פנים) והגדירו את הטלפון להינעל באופן אוטומטי לאחר מספר דקות ללא פעולה.
- וודאו שהישומים המותקנים קיבלו רק את ההרשאות הדורשות להם.
- הימנוו מיצירת ציוד Bluetooth עם מכשירי השמיהה שלכם במקום ציבור. זאת בשל הסיכון להפרעות בלתי רצויות מצד גורם שלישי. מומלץ לבצע את ציוד Bluetooth בביתה.
- אל תשתמשו בתלפונים פרטיזם הקפידו לשמר על הנתונים באופן אופן בטוח בכל עת. שימוש לברשימה זו אינה כוללת הכל.
- בעת העברת נתונים דרך ערוצים לא בטוחים, שלחו נתונים אונימיים או מזפינים.
- הגנו על גיבוי הנתונים של הטלפון החכם שלכם לא רק מפני איבוד נתונים אלא גם מפני גניבה.
- הסירו את כל הנתונים מטלפון חכם שאין משמש אתכם עוד או שמיועד להשלכה.

המדריך למשתמש עברו כל גרסאות היישום בכל השפות הרלוונטיות זמין בגרסה אלקטרוני דרכן באינטרנט. כדי לגשת למדריכים למשתמש, בצעו את הפעולות הבאות:

- לחצו על <https://www.phonak.com/en-int/>
- בחרו את המדינה הרלוונטית Support (תמיכה) (Support באנגלית) או שווה ערך בשפה המתאימה
- בחרו אל "מדריכים למשתמש" (User Guides) באנגלית) או שווה ערך בשפה המתאימה
- בחרו אל "ישומים" (Apps באנגלית) או שווה ערך בשפה המתאימה
- בחרו "וישום myPhonak Junior" myPhonak Junior

לחופין, אפשר לגשת לגרסה הנוכחית של המדריך למשתמש-זסאונר myPhonak ישירות מתוך היישום על-ידי ניוט לסעיף "תמיכה", ולאחר מכן הקשה על הכרטיס שנקרא "מדריך למשתמש". המדריך למשתמש יפתח בחולון דףדף חיצוני.

שימוש המיעוד:

שימוש מיועד ביחסם הינו בחירה, כוונון ושמירה של פונקציות מכשיר שמיעה קיימות, גישה למידע מצב ותקשורת בין משתמש הקצה וקלינאי התקשרות, באופן אלחוטי לצורה מוחשית.

אוכלוסיות מטופלים מיועדת:

אוכלוסיות המטופלים המיועדת לפתרון זה כוללת משתמשי קצה (אנשים וילדים) המעריכים נוחות, כמו היכולת למידה השמיהה שלהם במצבים רלוונטיים ומציאותיים, והיכולת לגמישות של הימנעות מהגעה למוגפה לצורך כוונונים, והרצים להיות מעורבים בשיתוף החוויות שלהם.

• **פרופיל יעד:**

ראו עמוד 2 למידע מפורט

מידע חשוב בנושא בטיחות

קראו את מידע הבטיחות הרלוונטי בעמודים הבאים לפני השימוש במכשיר.

- חזות חריגה של עור התוף ותעלת האוזן, כמו למשל:
- דלקת של תעלת השמע החיצונית
- נקב בעור התוף
- תופעות חריגות אחרות שקלינאי התקשרות סבור שהן מהוות בעיה רפואית

קלינאי התקשרות יכול להחליט שאין צורך בהפניה או שזו אינה הפטرون המיטב עבור המטופל כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

- כאשר יש עדויות מספיקות לכך שהמצב נבדק בסיסודיות על-ידי מומחה רפואי והוא יספק כל טיפול רפואי אפשרי.
- המצב לא החמיר או השתנה משמעותית מאז הבדיקה /או הטיפול הקודם
- אם המטופל נתן הסכמה מודעת וקיבול החלטה כשרה לא להיענות לעצה של פניה לקבלת חוות דעת רפואית, מותר להמשיך ולהמליץ על מערכות מכשירי שמיעה מתאימות בכפוף לשיקולים הבאים:
- להמלצת לא יהיו השפעות שליליות על בריאותו או איכות חייב של המטופל
- הרשותות מאשרות שנשקלו כל השיקולים הדרושים לתוכה מיטבית עבור המטופל. במידה ונדרש משפטית, המטופל חתום על כתוב ויתור כדי לאשר שייעוץ ההפניה לא התקבל ושהזיהו החלטה מיודעת.

התוויות נגד
שים לב, התוויות הנגד אין גזרות מהשימוש לנוייד, אלא מכשירי השמיעה התואמים. ההתוויות הקליניות הכליליות לשימוש במכשיר שמיעה ואיזון טינטונג הן:

- ליקי השמיעות אינן בטוחות התאמה של מכשיר השמיעות (למשל הגבר, תגבות תדרים)
- טינטונג חמוץ
- עיוות של האוזן (למשל תעלת אוזן סגורה, הייעדר אפרכסת)
- ליקי שמיעה עצבי (פתולוגיות retro-cochlear כגון הייעדר או אי פעילות של עצב שמיעה)

הקריטריונים העיקריים להפניות למטופל לקבלת חוות דעת רפואית או של מומחה אחר /או לטיפול המ:

- עיוות גלי לעין של האוזן, מולד או טראומטי.
- היסטוריה של ניקוז פעל מהאוזן-ב-90 הימים הקודמים
- היסטוריה של ליקי שמיעה פתאומי או מתקדם במהלך 90 הימים האחרונים
- סחרחוות חמורות או כרוניות
- פער הולכת אויר-עצם שווה או גדול 2,000 Hz-1,500 Hz dB-m 15
- עדות נראה לעין של הצטברות שעונות אוזן משמעותית או גוף זר בתעלת האוזן
- כאבים או אי-נוחות באוזן

תחזוקת תוכנה:
אנו מנטרים כל העת את המשוב מהשתח. אם אתה מתקלים בעוות כלשהו עם גרסת היחסום الأخيرة, צרו קשר עם נציג היצרן המקומי /או שלחו משב בבחנות היישומים Appstore או Google Play Store.

- התוויות:**
שים לב, התוויות אינן גזרות מהשימוש לנוייד, אלא מכשירי השמיעות התואמים. ההתוויות הקליניות הכליליות לשימוש במכשיר שמיעה ואיזון טינטונג הן:
- קיום ליקי שמיעה חד-צדדי או דו-צדדי
 - הולכת, תחושתי-עצבי או מעורב קל עד חמוץ
 - קיומ טינטונג כרוני (רק עבור מכשירי שמיעה המציגים איזון טינטונג)

מידע חשוב בנושא בטיחות

קראו את מידע הבטיחות הרלוונטי בעמודים הבאים לפני השימוש ביחסום.

הגבולות על השימוש

השימוש ביחסום מוגבל לכליות של המכשירים התואמים.

תופעות לוואי

שימוש לב, תופעות הלואן אין גדרות מהיחסום לניד, אלא מכשירי השמיעה התואמים. קלינאי התקשרות שלכם יכול לפטור או להפחית תופעות לוואי פיזיולוגיות של מכשירי שמיעה, כגון טינטון, סחרחות, הצטברות שעווה, לחץ, הצעה או לחות רביים מדי, שלפוחיות, גירוד ו/או פריחה, תחושת אטיימות או מלאות, נהשלכות שלחן כגון כאבי ראש ו/או כאבי אוזניים. מכשירי שמיעה رجالים עשויים לחשוף מטופלים לרמות חשיפת רעש גבוהות יותר, שעלולות לגרום לתזוזת ערכי סף בתחולמי התדרים המושפעים מטראומה אקוסטית.

יתרונות

היחסום תורם למשתמשים המיעדים בכך שהוא מספק את האפשרות לבצע התאמות במסגרת הטווח המותר על פי ההתאמת הראשונית.

היחסום מספק למשתמשים המיעדים דרך נוחה להתחבר אל קלינאי התקשרות ולתקשר אליו לצורך כוונונים של מכשירי השמיעה מרוחק. תיאור מכשירי שמיעה תאומים, רשיימת פלטפורמות. עבור תצורות: פירוט כל התצורות

כל אירוע חמור שהתרחש בהקשר של היחסום, חייב להיות מדווח לנציג היצגן ולרשوت המתאימה בארץ המגורים. אירוע חמור מתואר ככל אירוע אשר הוביל באופן ישיר או עקיף, או עשוי היה להוביל או עשוי להוביל לכל אחד מהמצבים הבאים:
א. מוות של מטופל, משתמש או אדם אחר
ב. פגיעה חמורה זמנית או קבועה במצבו הבריאותי של מטופל, משתמש או אדם אחר
ג. אירוע חמור על בריאות הציבור

מידע חשוב בנושא בטיחות

קראו את מידע הבטיחות הרלוונטי בעמודים הבאים לפני השימוש במכשיר.

לקבלת עותק מודפס בחינם של הוראות השימוש, יש לפנות לנציג המקומי של Sonova. ישלח עותק תוך שבעה ימים.



אם מכשירי השמיעה לא מגיבים למכשיר, עקב הפרעת שدة חריפה, התרחקו מהשدة המפဖיע.



אם מכשירי השמיעה אינם מגיבים, בדקו אם מכשירי השמיעה פועלים וכי הסוללה אינה ריקה.



הפעילו את Bluetooth. יש להפעיל את Bluetooth כדי לחבר את מכשירי השמיעה.



אתם האחראים לשימוש בטלפון החכם האישי. עליו נזקוט בזהירות בעבודה עם הטלפון החכם ובשימוש במכשיר.

ההפחתה בהגברת או הגברת מגנון סינון הרעש עשויים לבטל את הנגישות השמיינית של אוטות בטיחות או אזהרה רלוונטיים. מצב זה עלול לגרום למצבי מסוכנים.



הסבר על הסמלים

סמל זה מציין שחשיבותו יקרה וייקח בחשבון את המידע הרלוונטי
שבמדריך זה למשתמש.



סמל זה מציין שחשיבותו יתיחס להודעות האזהרה הרלוונטיות
שבמדריך זה למשתמש.



מידע חשוב על העבודה עם המוצר ובתייחותו.



עם הסמל של CE, Sonova AG מאשרת שמווצר זה מבית Phonak עומדת
בדרישות הדיקטיביה למכשור רפואי EEC 93/42/EEC. סימן CE הוחל בשנת 2021.
המספר של אחר הסמל של CE תואם לקוד של המוסדות המוסמכים אשר נתנו
יעז במסגרת הדיקטיביות הנזכרות לעיל.



מצין את הנציג המורשה בקהילה האירופאית. EC REP הוא גם היבואן
לאיחוד האירופי.



מצין שהתקן הוא התקן רפואי.



סמל משולב של "יצן התקן רפואי" ו"תאריך יצור", כפי שמוגדר בתקינה
האירופאית 2017/745 (EU)



חייב על כרך שהוראות שימוש אלקטרוניות זמינים. אפשר למצוא את ההוראות
באטר phonak.com/junior/userguide





Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

EC | REP

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Germany

CE
0459

lagosha קודמתה של המדריך למשתמש בישום צרו קשר עם הנציג המקומי או עיינו באתר האינטרנט.
מדריך למשתמש זה מתאים ל-myPhonak Junior 1.2-my ותת-גרסאות מאוחרות יותר של יישום myPhonak Junior 1.
© Sonova AG V3.00/2023-06/NLG 2021-2023