

テレビコネクター

～設定方法～

Vol. 1

テレビコネクターはテレビや音楽機器と接続させて、補聴器に直接音声を送信することができるフォナック オーデオ B-ダイレクト（以下、オーディオ B-ダイレクト）専用のワイヤレスアクセサリです。使用する前に、補聴器とのペアリングを行う必要があります。

この紙面では、テレビコネクターの設定方法について述べています。

❖ テレビコネクター 同梱物



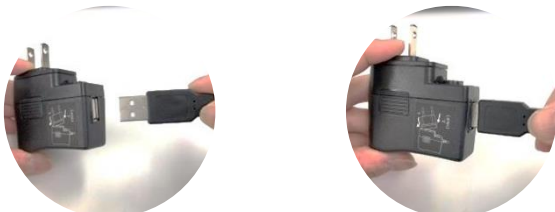
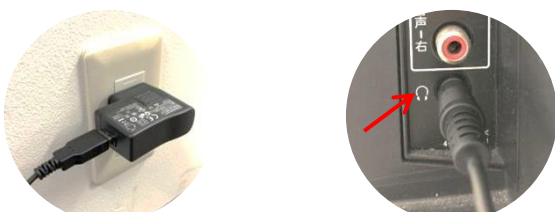
❖ テレビコネクター 各部の名称

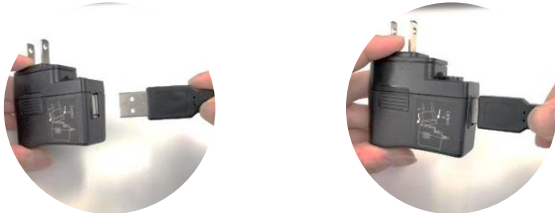
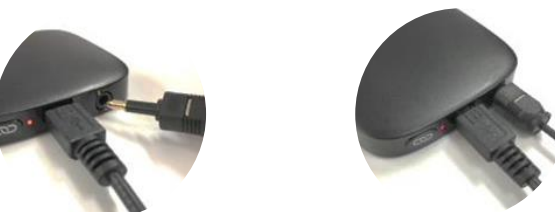



❖ テレビコネクタの準備

テレビコネクタとお使いのテレビの準備を行います。お使いのテレビによって、接続方法・設定方法・表示方法が異なります。

テレビの取り扱いに関しては、テレビの取扱説明書およびメーカーにお問い合わせください。


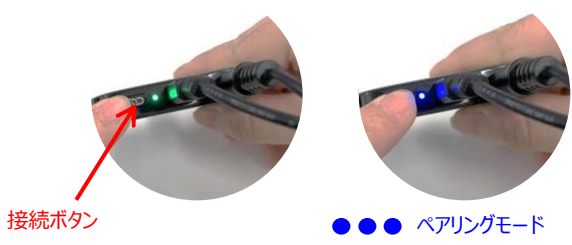

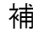



| ヘッドホン端子用 3.5mm オーディオジャックケーブル使用 | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> 同梱されている電源プラグと USB-マイクロ USB ケーブルを組み合わせます。 |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> 電源プラグはコンセントに差します。 オーディオジャックケーブルは、テレビのイヤホン端子 (赤矢印) に差します。 |

| 光デジタル音声出力用ケーブル使用 | | |
|------------------|---|--|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> 同梱されている電源プラグと USB-マイクロ USB ケーブルを組み合わせます。 |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> テレビコネクタに予め取り付けられているオーディオジャックケーブルを抜いて、光デジタル音声出力用ケーブルに取り替えます (カチッと鳴るまでしっかり差します)。 |
| 3 |  <p>光デジタル 音声出力端子</p> | <ul style="list-style-type: none"> 電源プラグはコンセントに差します。 光デジタル音声出力用ケーブルは、テレビの光デジタル音声出力端子 (角型) に差します。 |



| | | |
|---|--|--|
|  <p>電源オン、音声送信中 ●</p> |  <p>電源オン、入力音声なし ●</p> | <ul style="list-style-type: none"> テレビコネクタの表示ライトが一時的に緑色の点灯します。テレビからの音声が無ければ、その後、赤色の点灯に変わります。 <p>誤った音声信号 (DOLBY 等): 赤色点滅 ● ● ●</p> |
|---|--|--|

❖ テレビコネクタと補聴器のペアリング

テレビコネクタは、**初めて**電源を入れる際には自動的にペアリングモードになります。**2回目以降**に電源を入れる際は、接続ボタンを長押ししてペアリングモードにする必要があります。

| オーディオ B-ダイレクトとのペアリング方法（テレビコネクタ2回目以降の場合） | | |
|---|--|--|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> テレビコネクタと 1m 以内の距離に置きます。 |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> テレビコネクタの表示ライトが青く点滅するまで接続ボタン  を押し、機器をペアリングモードにします。 補聴器とテレビコネクタが正しくペアリングされると、補聴器からペアリング成功のビーブ音  が聞こえます。 (5ビーブ連続上昇 ) |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> ペアリング成功のビーブ音が提示された後、テレビの電源状態によって次のように異なります： 【テレビの電源がオン】 <ul style="list-style-type: none"> ♪ 「テレビコネクタ」のプログラム設定がオートマチックの場合： ペアリング成功のビーブ音が聞こえると、直ぐにテレビの音声聞こえ始めます。 ♪ 「テレビコネクタ」のプログラム設定がマニュアルの場合： ペアリング成功のビーブ音が聞こえると、テレビコネクタが使用可能状態であることを意味するビーブ音が続けて聞こえます。 テレビ音声を開始するには、プログラムスイッチを押して切り替えます。 – 【テレビの電源がオフ】 <ul style="list-style-type: none"> ♪ ペアリング成功のビーブ音が聞こえると、直ぐに別のビーブ音  が聞こえます(3ビーブ連続上昇 )。これはテレビコネクタの電源はオンだけれども、テレビからの音声入力はないということを意味します。 <p>※ 3ビーブ音は、テレビコネクタの接続ボタンを押してペアリング作業を実施する際に、テレビの電源がオフだった場合のみ提示されます。</p> | |

❖ テレビコネクタと補聴器のペアリング解除

表示ランプがオレンジ色  に点灯するまで、テレビコネクタの接続ボタン  を約 7 秒間押し続けます。

オーディオ B-ダイレクトと再接続を行う場合は、上記表の 1～3 を繰り返します。

